

- Поверхностная и дермальная обезвоженность.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Острые воспалительные высыпания (акне, герпес) или проявления хронических кожных заболеваний в зоне предполагаемых инъекций.
2. Повышенная чувствительность к гиалуроновой кислоте и другим компонентам препарата.
3. Наличие в анамнезе аутоиммунных заболеваний или проведение аутоиммунной терапии.
4. Наличие постоянного импланта в зонах предполагаемой коррекции.
5. Беременность и лактация.
6. Возраст менее 18 лет.

6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал - гель Meso - Wharton P 199™ может вводить только дипломированный практикующий врач-специалист. Для проведения успешной коррекции врач должен пройти курс обучения по технике введения средств заполнителя морщин.

Работа должна проводиться в подходящих асептических условиях. Данные изделия предназначены для использования в медицинском кабинете.

Гели должны вводиться только в здоровую, невоспаленную и продезинфицированную кожу.

В силу присущих гелю Meso - Wharton P 199™ характеристикам рекомендуется вводить в дерму в соответствии с описанием.

При навинчивании иглы на наконечник необходимо крепко его держать. Снимите с иглы защитный колпачок, поворачивая его в том же направлении, в котором закручивалась игла. Медленно начните введение препарата в дерму.

Если игла закупоривается и инъекционное давление становится слишком высоким, немедленно прекратите введение и смените иглу.

После введения врачу следует мягко промассировать обработанную зону для равномерного распределения геля.

После использования шприц и оставшийся продукт должны утилизироваться. Не подвергать повторной стерилизации и повторному использованию!

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от 2 до 25°C.

Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока годности.

Избегать механических ударов.

Средний срок годности – 24 месяца после даты изготовления. Не использовать по истечении указанного срока годности.

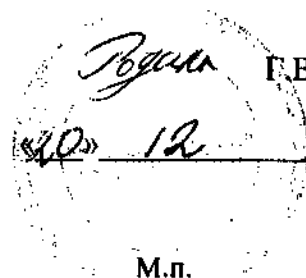
Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»


подпись заявителя

Г.В. Родина

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»

 Г.В. Родина
«10» 12 2009 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Материал - гель для интрадермального введения Meso -Wharton P199™,
производства

Caregen Co., Ltd, South Korea, Южная Корея (по контракту для ABG LAB LLC (limited liability company, 55 Forest Row, USA).

1. ВВЕДЕНИЕ
2. СОСТАВ
3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Meso - Wharton P 199TM – стерильный апиrogenный, вязкоэластичный, бесцветный, прозрачный гель для интрадермального введения в кожу лица. Действие препарата направлено на интенсивную биоревитализацию кожи (коррекция возрастных изменений, восстановление, укрепление овала лица).

Meso - Wharton P 199TM представляет собой препарат на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты биоферментативного происхождения в композиции с регуляторными пептидами, олигопептидами, витаминами, микроэлементами, аминокислотами, нуклеиновыми кислотами.

2. СОСТАВ

Основные компоненты

Гиалуроновая кислота Hyaluronic Acid (молекулярный вес 3300 кД, концентрация 1,5%).

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Перед лечением пациент должен быть проинформирован о средстве, противопоказаниях к его применению и возможных побочных действиях.
- Перед использованием необходимо убедиться в целостности пакетов, в которых упакованы шприцы, а также проверить срок годности шприца и иглы. Запрещается использовать изделия с истекшим сроком годности, а также в том случае, если нарушена целостность упаковки.
- Гиалуронат натрия осаждается в присутствии четвертичных аммониевых солей (таких, как бензалкония хлорид), поэтому рекомендуется избегать контакта геля с такими веществами.
- Чувствительную кожу можно предварительно подвергнуть анестезии. Необходимо обратить внимание на то, что анестезия может вызвать местное покраснение или гиперчувствительность.
- Избегать гиперкоррекции.
- Пациентам следует строго воздерживаться от нанесения макияжа в течение минимум 12 часов после прохождения процедуры, а также от посещения сауны, турецкой бани и длительного воздействия солнца или УФ-лучей в течение 2 недель после прохождения процедуры. В течение недели пациентам следует избегать надавливания на области, подвергшиеся коррекции.

4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика увядания кожи;
- Возрастные изменения кожи (морщины, потеря тонуса и эластичности);
- Подготовка к пластическим операциям;
- Реабилитации кожи в послеоперационном периоде;
- Восстановление кожи после поверхностных и глубоких пилингов, лазерных шлифовок, ожогов различного происхождения;
- Гиперпигментация;