

ТЕЛЕЖКА ПРИБОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

ИМТ-4, ИМТ-5, ИМТ-6, ИМТ-8, ИМТ-9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тележка приборная медицинская (далее - тележка) предназначена для использования во всех отделениях и кабинетах ЛПУ (операционные, процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты; больничные палаты, приемные покои, сестринские посты, лаборатории, аптеки и т.д.) независимо от их специализации: больницы, диспансеры, родильные дома, поликлиники (в том числе стоматологические), консультации, диагностические центры и т.д.

Каркас тележки сварной, выполнен из тонкостенной трубы (углеродистая сталь) с нанесением полимерного покрытия. Полки изготовлены из стали. Используются импортные колеса диаметром 75, 100 мм из серой резины (не оставляющей следов на полу). Одно колесо с автономным тормозным устройством. По периметру полок - бортики из трубы круглого или квадратного сечения, приваренные к каркасу.

Поставляется в собранном виде.

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса не более 21 кг.

1.2. Габаритные размеры:

ИМТ-4, ИМТ-5 - 610х450х870 мм, ИМТ-6 - 725х445х882 мм,

ИМТ-8 - 850х500х1120 мм, ИМТ-9 - 750х440х780 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики при равномерном распределении нагрузки:

- на полку - не более 25 кг;

2.3. При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 (от +10 °C до +35 °C).

3. Комплектность

1. Каркас с полками сварной.

2. Колесо с тормозом -1 шт.

3. Колесо без тормоза -3 шт.

4. Транспортная упаковка -1шт

5. Руководство по эксплуатации -1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Тележка транспортируется в собранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °C до +50 °C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °C).

4.3. Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °C до +40 °C и относительная влажность не более 98% при +25 °C).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644 и 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

Примечание: Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей стола и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

5.2. Наружные поверхности стоек и полки протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

6. Правила эксплуатации

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения тележки или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию тележки, освободите ее от транспортной упаковки.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода тележки из строя не допускается:


- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- подвергать поверхности воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

Генеральный директор

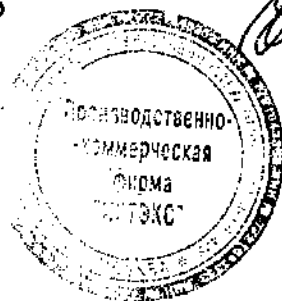

Столбовая И.Р.

Применяется,
апрель
В 10-11-11

