

ОКП 94 3820

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора

От «__» _____ 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Медтехника»



А.Ш.Борода

» 03 2007 г.

Нормативный документ

КОМПЛЕКТЫ ШИН ПОЛИМЕРНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ

ВАКУУМНЫХ «МЕДТЕХНИКА»,

соответствующий требованиям

ТУ 9438 – 018 – 27418804 – 2006

Назначение.

Комплекты шин полимерных иммобилизационных вакуумных «МЕДТЕХНИКА» (в дальнейшем – шины), предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей.

Шины иммобилизационные вакуумные (в дальнейшем шины) применяются при подозрении на переломы костей голени, стопы, предплечья, повреждение локтевого и коленного суставов, при повреждении мягких тканей конечностей с наружным кровотечением для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных конечностей на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения.

Шины предназначены для оказания само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи.

Шины могут применяться в службе скорой и неотложной медицинской помощи, в службах медицины катастроф, в формированиях МЧС и гражданской обороны, в подразделениях МВД и МО, на крупных производственных и добывающих предприятиях, в спортивных обществах и спортивных комплексах, в различных транспортных предприятиях, в автомобилях ДПС.

Шины позволяют проводить щадящую иммобилизацию травмированных конечностей и обеспечивать необходимую фиксацию конечностей продолжительное время.

Шины соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444 и требованиям технических условий ТУ 9438–018–27418804-2006.

Технические данные и характеристика изделия:

Шины могут эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Масса шины – не более 1,15 кг.

Максимальное рабочее разряжение в конечностных шинах –20 мм рт. ст.

Рентгенография возможна без снятия шин.

Средний срок службы шины – 2года.

Специальных действий по утилизации не требуется.

1. Комплектность:

Комплекты вакуумных шин формируются по заказу покупателя из следующих шин:

- «Медтехника» НВ - предназначена для иммобилизации нижних конечностей, для взрослых.
- «Медтехника» УВНс - предназначена для иммобилизации верхних конечностей для взрослых или нижних конечностей для детей (детская средняя).
- «Медтехника» ВДс - предназначена для иммобилизации верхних конечностей для детей (средняя).
- «Медтехника» НДм - предназначена для иммобилизации нижних конечностей для детей (малая).
- «Медтехника» ВДм - предназначена для иммобилизации верхних конечностей для детей (малая).
- Кроме того в состав комплекта поставки входят:
головка клапана 2– 5 шт,
насос вакуумный ручной – 1шт,
этикетка (инструкция по эксплуатации) –1шт.
сумка транспортная – 1шт.

По заказу покупателей могут изготавливаться специальные формы шин, аналогичные указанным выше, по конструктивному исполнению.

Комплекты шин могут комплектоваться и другими видами вакуумных насосов, обеспечивающих необходимую откачку воздуха.