

А.С. Богдан
генеральный директор
ЗАО «Медтехника»

198616 г. С-Петербург
Петродворец, ул. Фабричная д. 1
Тел/факс 8-812-326-54-71

198616 г. С-Петербург
Петродворец, ул. Фабричная д. 1
Тел/факс 8-812-326-54-71

Сумка – холодильник медицинская для переноски вакцин (6 литров).

ТУ 9452-040-27418804-2007

Этикетка.

1. Назначение:

- 1.1. Сумки-холодильники медицинские предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов.

2. Технические данные и характеристика изделия:

- 2.1. Габаритные внешние размеры 300х160х220 (мм)
2.2. Максимальный объем полезного груза – 6000 см³.
2.3. Масса с охлаждающими элементами – 2600 г
2.4. Масса без охлаждающих элементов – 550 г
2.5. Время сохранения температуры в диапазоне от 0°C до +8°C – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от минус 10°C до плюс 40°C.
2.6. Время установления рабочего температурного режима внутри сумки – не более 15 мин.
2.7. Сумки изготовлены из прочной безопасной синтетической ткани.
2.8. Сумки имеют специальные карманы для размещения охлаждающих элементов и документации.
2.9. Стенки сумок, крышка и дополнительный изолирующий клапан изготовлены из высококачественного термоизолирующего материала.
2.10. Сумки комплектуются одноразовыми термоиндикаторами «ВОММАРК» или другими температурными индикаторами, обеспечивающими контроль установленного диапазона температур.

3. Комплектность:

- 3.1. В комплект входят:
3.1.1. сумка-холодильник – 1 шт.,
3.1.2. охлаждающие элементы – 6 шт (№1 - 2шт, №2 - 4шт),
3.1.3. термоиндикаторы – 1шт,
3.1.4. этикетка – 1шт.

4. Указания мер безопасности:

- 4.1. Использовать сумки-холодильники по назначению.
4.2. Не подвергать хладоэлемент воздействию агрессивных жидкостей.
4.3. Не подвергать хладоэлемент воздействию острых режущих и колющих предметов.
4.4. Во избежание повреждения хладоэлемента при его использовании сразу после извлечения из морозильника избегайте резких перегибов хладоэлемента.

5. Порядок работы:

- 5.1. Для резерва необходимо держать запас охлаждающих элементов в бытовом холодильнике и морозильной камере.
5.2. Для снаряжения сумки-холодильника для хранения и транспортировки в условиях внешних температур в диапазоне от +10 °C до +40 °C необходимо:
5.2.1. Достать охлаждающие элементы из морозильной камеры (минус 18°C - минус 12°C, выдержка не менее 10-ти часов).
5.2.2. Охлажденные в морозильной камере элементы перед загрузкой в сумку необходимо выдержать при комнатной температуре (18°C - 25°C) в течение 10 - 15 минут, отбросить конденсат, после чего загрузить охлаждающие элементы в сумку.
5.2.3. Разместить в сумке градусник и закрыть сумку для равномерного охлаждения внутреннего ее объема.
5.2.4. Через 15-20 минут открыть сумку и проверить температуру в сумке (установившийся необходимый режим от 0 до +5°C).
5.2.5. Загрузить в сумку материалы, предназначенные для транспортирования.
5.2.6. Одновременно с материалами для транспортировки в сумку помещается термоиндикатор, предварительно выдержанный в холодильнике 30 минут при температуре от 0 до +5°C.
5.2.7. Для закрепления термоиндикатора снять защитный слой на обратной стороне индикатора и самоклеющимся слоем закрепить в верхней части сумки с внутренней стороны.
5.2.8. Провести активацию индикатора («ВОММАРК») отрывом и вытаскиванием ярлыка со стрелками из тела индикатора.
5.2.9. Закрыть и застегнуть крышку сумки-холодильника, после чего она отправляется по назначению.

5.3. Для снаряжения сумки-холодильника для хранения и транспортировки в условиях внешних температур от -10°C до +10°C необходимо:

- 5.3.1. Достать охлаждающие элементы из холодильной камеры (0°C – плюс 5°C, выдержка не менее 10-ти часов).
- 5.3.2. Охлажденные в холодильной камере элементы перед загрузкой в сумку необходимо обтереть, после чего загрузить охлаждающие элементы в сумку.
- 5.3.3. Разместить в сумке градусник и закрыть сумку для равномерного охлаждения внутреннего ее объема.
- 5.3.4. Через 15-20 минут открыть сумку и проверить температуру в сумке (установившейся необходимый режим от 0 до +5 градусов).
- 5.3.5. Загрузить в сумку материалы, предназначенные для транспортирования.
- 5.3.6. Одновременно с материалами для транспортировки в сумку помещается термондikator, предварительно выдержанный в холодильнике 30 минут при температуре от 0 до +5 °C.
- 5.3.7. Для закрепления термондikatorа снять защитный слой на обратной стороне индикатора и самоклеющимся слоем закрепить в верхней части сумки с внутренней стороны.
- 5.3.8. Провести активацию индикатора («ВОММАРК») отрывом и вытаскиванием ярлыка со стрелками из тела индикатора.
- 5.3.9. Закрыть и застегнуть крышку сумки-холодильника, после чего она отправляется по назначению.

6. Рекомендации по дезинфекции сумки-холодильника.

- 6.1. Дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора стирального порошка, или 5% раствором хлорамина.

7. Гарантии изготовителя:

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие параметров и характеристик сумок-холодильников требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации сумки-холодильника 12 месяцев от даты получения.
- 7.3. Гарантийный ремонт осуществляется ЗАО «Медтехника» при наличии этикетки.

8. Изготовитель.

ЗАО «Медтехника», 198516, г. Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Фабричная, д.1 тел 8-812-326-54-71

9. Срок эксплуатации.

Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения.

Принят ОТК _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

