



Закрытое акционерное общество «Медтехника»

198516 г. С-Петербург
Петродворец, ул. Фабричная д. 1
Тел/факс 8-812-326-54-71

Носилки мягкие «МЕДТЕХНИКА»

ТУ 9451-007-27418804-2006

ЭТИКЕТКА

1. Назначение и технические данные.

- 1.1 Носилки мягкие «Медтехника» (в дальнейшем – носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно. В частности мягкие носилки могут использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам.
- 1.2 Основные размеры: длина 2000 ± 50 мм, ширина 850 ± 50 мм. Имеют четыре пары ручек, ремни для фиксации пострадавшего.
- 1.3 Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой 150 ± 5 кг.

2. Комплектность

В комплекты НМ-01 и НМ-02 входят: носилки мягкие – 1 шт, сумка-чехол, этикетка – 1 шт. По заказу покупателя носилки дополнительно комплектуются плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

3. Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция.

- 3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.
- 3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.
- 3.3 Носилки изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи транспортируемых людей.
- 3.4 Обеззараживание рабочей поверхности носилок производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, типа «Лотос». Время дезинфицирующей выдержки – 60 минут. Обеззараживание производится из расчёта 700 мл/ кв.м.
- 3.5 При видимых обильных загрязнениях носилок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием носилок двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. После выдержки по п.3.4 дезинфицирующий раствор удаляется с поверхности носилок путём протирания салфеткой, смоченной водой. После чего носилки протираются сухой салфеткой.
- 3.6 Носилки могут подвергаться стирке в стиральной машине с использованием режимов стирки, определённых для синтетических тканей.

4. Срок эксплуатации

- 4.1 Средний срок службы носилок – 2 года.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации носилок - 12 месяцев со дня продажи.
- 4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.
- 4.4 Гарантийный ремонт осуществляется ЗАО «Медтехника».

Штамп ОТК

Дата выпуска:

Дата продажи:

Исполнения: НМ-01 НМ-02 (с фиксирующими ремнями) НМ-03 (с фиксирующими и плечевыми ремнями.)

Генеральный директор
ЗАО «Медтехника»



А.Ш.Борода