


ОКП 94 5210

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЕХСТРОЙ»


« 02 » 03 2007 г.

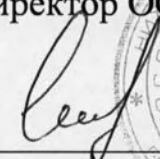

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ
КФЗ-«ТЕХСТРОЙ»

Паспорт

ТЕХТ.942811.001 ПС

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв.	Инв. № дуб	Подп. и дата

2007

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Кровати функциональные трехсекционные передвижные с боковыми ограждениями КФЗ- «Техстрой» (в дальнейшем – кровати), предназначены для физиологически адекватного пребывания пациентов в стационаре. Кровати могут использоваться как и при стационарном обслуживании, так и для транспортирования пациентов внутри больничного корпуса.

В зависимости от вида привода механизма трансформации кровати изготавливаются следующих моделей:

- кровать функциональная трехсекционная передвижная с электрическим приводом КФЗ-«Техстрой-1»;
- кровать функциональная трехсекционная передвижная с пневматическим приводом КФЗ-«Техстрой-2»;
- кровать функциональная трехсекционная передвижная с винтовым приводом КФЗ-«Техстрой-3».

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

В зависимости от потенциального риска применения кровати относятся к классу 1 ГОСТ Р 51609.

1.2 Кровати соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, технических условий ТУ 9452-001-14692415-2007 и комплектам документации ТЕХТ.942811.001, ТЕХТ.942811.001-01, ТЕХТ.942811.001-02.

1.3 Габаритные размеры кроватей не более:

- длина – 2050 мм;
- ширина – 800 мм;
- высота – 930 мм.

1.4 Масса кроватей - не более 48 кг.

1.5 Конструкция кроватей при расположении на панели предельной рабочей нагрузки массой $150 \pm 5,0$ кг обеспечивает наклоны секций в заданных пределах значений.

Нагрузка на отдельные секции должна быть распределена:

- 45% - на спинную секцию;
25% - на тазобедренную секцию;
30% - на ножную секцию.

1.6 Усилие, необходимое для равномерного передвижения кроватей с предельной рабочей нагрузкой по ровному полу, - не более 250Н (20 кгс).

1.7 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения положения секций - не более 120 Н (5 кгс).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	длина – 2050 мм; - ширина – 800 мм; - высота – 930 мм. 1.4 Масса кроватей - не более 48 кг. 1.5 Конструкция кроватей при расположении на панели предельной рабочей нагрузки массой 150±5,0 кг обеспечивает наклоны секций в заданных пределах значений. Нагрузка на отдельные секции должна быть распределена: 45% - на спинную секцию; 25% - на тазобедренную секцию; 30% - на ножную секцию. 1.6 Усилие, необходимое для равномерного передвижения кроватей с предельной рабочей нагрузкой по ровному полу, - не более 250Н (20 кгс). 1.7 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения положения секций - не более 120 Н (5 кгс).					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	ТЕХТ.942811.001 ПС				
						КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ КФЗ-«ТЕХСТРОЙ» Паспорт	Лит		Лист	Листов
							A		2	9
							ООО «ТЕХСТРОЙ»			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Разраб. Пров. Н.контр. Утв.					

1.26 Кровати в транспортной таре устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 и сохраняют свою работоспособность.

1.27 Средний срок службы до списания - не менее 7 лет. За предельное состояния принимают такое состояние кровати, при котором годовая стоимость ремонтов для восстановления ее работоспособности достигает 60% стоимости нового изделия.

1.28 В зависимости от последствий отказа кровать относится к классу Г по ГОСТ Р 50444 и РД 50-707.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки кровати должен соответствовать указанному в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование	Обозначение документа	Количество на исполнение, шт		
		ТЕХТ.942811.001	-01	-02
1 Кровать КФЗ-«Техстрой-1»	ТЕХТ.942811.001	1	-	-
2 Кровать КФЗ-«Техстрой-2»	-01	-	1	-
3 Кровать КФЗ-«Техстрой-3»	-02	-	-	1
4 Боковые ограждения	-03	2	2	2
5 Колеса		4	4	4
6 Матрац		1	1	1
<u>Эксплуатационная документация</u>				
7 Паспорт	ТЕХТ.942811.001 ПС	1	1	1

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам инв.№	Инв.№дуб	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЕХТ.942811.001 ПС	Лист
						4

3 Требования безопасности

3.1 Для изготовления кроватей должны использоваться материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кроватей, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали при их нормальной эксплуатации.

3.2 Детали кровати не должны иметь острых кромок, заусенцев, остатков сварочной проволоки.

3.3 Тормоза колес должны включаться при приложении на педаль усилия не более 150 Н (15 кгс).

3.4 По безопасности кровати с электроприводом должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0 для изделий с внутренним источником питания типа BF.

Изм. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№дуб	Подп.и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЕХТ.942811.001 ПС		Лист 5

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

ремонта _____
параметр, характеризующий наработку

лет (года) _____

В складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

при _____ ремонте (ах) в течение срока службы _____ лет.

Линия отреза при поставке на экспорт

Гарантии изготовителя (поставщика)

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

№ _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован _____
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Изм. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дуб	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЕХТ.942811.001 ПС	Лист			
						7			

6 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
Предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Подп. и дата	
Инв. № дуб	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подп.	

					ТЕХТ.942811.001 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

[illegible]