

6.5. Монтаж консоли на месте эксплуатации и проведение пуско-наладочных работ может осуществляться только предприятием - изготовителем ЗАО "Альтернативная наука" или организацией, уполномоченной для проведения этих работ.

6.6. При установке консоли в операционной палате должны быть выполнены требования РТМ 42-2-4-80:

6.6.1. Напряжение питания ~ 220 В, 50 Гц должно быть подано на консоль через разделительный трансформатор.

6.6.2. Консоль должна быть обязательно заземлена.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Секция консольная зав. N _____ соответствует требованиям комплекта чертежей ГАКЕ.99.00.00-01 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ 2011. ____ Подпись отв. лица Иванова В.А.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Секция консольная зав. N _____

Упаковано ЗАО «Альтернативная наука»

н в а м е ч е н и ю в н и с и л и ю д и з л о ж е н и я

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник отдела сбыта

должно быть

личной подписи

Макарова Г.Ф.

расшифровка подписи

2011. ____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие секции консольной требованиям

ТУ 9444-057-16793014-2001 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки предприятию потребителю.

9.3 Изготовитель не несет ответственность за дефекты, возникшие из-за небрежного обращения с консолью или ее монтажом и ремонтом лицами, не уполномоченными изготовителем.

9.4 О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу:

192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д.22. лит.Б

Тел. (812) 767 - 03 - 75.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

10.1 Упаковка консоли изготовлена из материалов, не наносящих вреда окружающей среде.

Упаковку можно сдать в организации, осуществляющие вторичную переработку сырья.

10.2 По истечении срока эксплуатации консоль следует разобрать и утилизировать по правилам и требованиям, установленным местной администрацией.



«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НАУКА»

ОКП 9444 68

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХЯРДНАЯ

ПАСПОРТ

ГАКЕ.99.00.00-01 ПС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Консоль реанимационная соответствует ТУ 9444-057-16793014-2001.

1.2 Консоль соответствует требованиям РТМ 42 - 2 - 4 - 80 "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии" и ГОСТ 12.2.025-76 "Изделия медицинской техники. Электробезопасность".

1.3 По электробезопасности секция консольная соответствует классу I тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.

1.4 Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия наружных поверхностей сделаны по ГОСТ 9.032 для групп условия эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104. Класс покрытий не ниже III по ГОСТ 9.032. Покрытие устойчиво к дезинфекции по ОСТ 42-2-21.

1.5 Конструкция и технические характеристики консоли могут быть изменены с целью ее усовершенствования без уведомления в паспорте.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Консоль предназначена для оптимальной организации рабочего места, компактного размещения медицинской аппаратуры, обеспечения рабочего места электропитанием и медицинскими газами. Консоль используется в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, оперблоках, родильных залах и больничных палатах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (не более): высота/глубина, мм	206/68
длина, мм	800 1200 1600 2000
Максимальная нагрузка на рельс (не более), кг	50
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	10-35
Условия хранения в транспортной таре по ГОСТ 15150-69	2/C/+40...-50/У3/-/-/Н/-
Напряжение электрической сети, подводимой к консоли, В/Гц	220±10(%) / 50±1(Гц)
Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам секции консольной (не более), кВт	2
Сопротивление изоляции фазных проводников сети 220 В, 50 Гц относительно основания консоли и провода "общий 0" (не менее), МОм	10
Переходное сопротивление заземления (зануления) между болтом заземления консоли и любой точкой металлической конструкции (не более), Ом	0.1
Переходное сопротивление заземления между болтом заземления и заземляющим контактом любой розетки 220 В, 50 Гц (евроконструктив) (не более), Ом	0.2
Рабочее давление в газовых магистралях консолей (не более), МПа (атм)	0.6 (6)
Пропускная способность одного клапана консоли по мед. газам / по вакууму (не менее), л/мин	40 / 10
Утечка газа на любом коммутационном устройстве консоли (клапан, кран) при максимальном рабочем давлении (6 атм) (не более), мл/мин	1
Масса нетто (не более), кг	14
Назначенный срок службы, лет	5

Переменные параметры

КЛАПАН	Розетки (евростандарт 220 В, 50 Гц), шт.	8
	Автоматический выключатель сети, шт.	2
	кислород, шт.	1
	сжатый воздух, шт.	1
	сжатый воздух высокого давления, шт.	1
	закись азота, шт.	1
	вакуум, шт.	1
	углекислый газ, шт.	1
	Вентиль, шт.	
	Индикатор давления, шт.	

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- секция консольная - 1 шт.;
- кронштейн ГAKE.01.00.21 - 1 ком.плект;
- планка-рельс (сечение 10х30 мм) - 1 шт.;
- трубки медные d 8 мм - 1 ком.плект;
- крепеж - 1 ком.плект;
- штекеры угловые ГAKE.70.00.00 - 1 ком.плект;
- схема электрическая принципиальная ГAKE.99.00.00 ЭЗ;
- паспорт ГAKE.99.00.00-01 ПС;
- паспорт на газовые клапаны ГAKE 55.00.00 ПС.

Дополнительные комплектующие

- дополнительный (нижний) рельс - 1 шт.
- кронштейны для дополнительного рельса - 1 ком.плект.

Общий вид двухрядной консольной секции ГAKE.99.00.00-01 приведен на рис.1

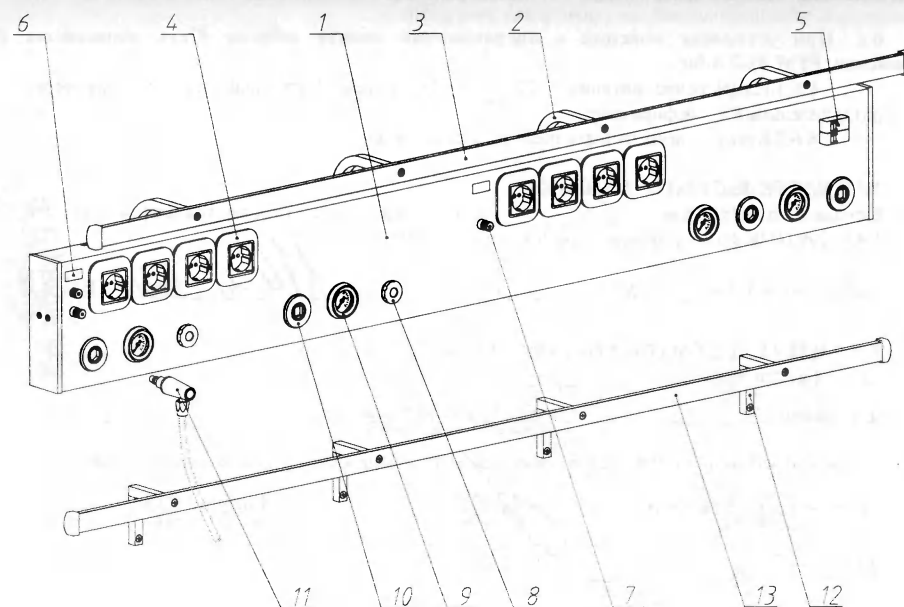


Рис.1

- 1 – консоль реанимационная;
- 2 – кронштейны для установки планки-рельса сечением 10 x 30 мм;
- 3 – планка - рельс для навесного оборудования;
- 4 – розетки (евростандарт) 220 В, 50 Гц;
- 5 – автоматические выключатели сети;
- 6 – индикаторы наличия питания 220 В, 50 Гц;
- 7 – клемма заземления;
- 8 – входной запорный вентиль газовой магистрали секции консольной;
- 9 – манометр контроля давления в газовой магистрали секции консольной;
- 10 – газовый клапан для подключения дыхательной аппаратуры;
- 11 – штекер угловой для подключения дыхательной аппаратуры к клапану поз.10;
- 12 – кронштейн дополнительного рельса;
- 13 – дополнительный (нижний) рельс.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При подключении к консоли сети ~ 220 В, 50 Гц с глухо заземленной нейтралью не допускается заземление консоли без предварительного ее зануления.

6.2. Не допускается работа на консоли со снятыми боковыми крышками и лицевыми панелями.

6.3. Не допускается попадание смазочных материалов во внутренние отверстия клапанов и на наконечники угловых штекеров, работающих с кислородным и клапанам.

6.4. Запрещается применение клапанов закиси азота в присутствии аммиака, его растворов и окиси углерода (угарного газа) в любых концентрациях.