

Инструкция по применению



Материал пломбировочный временный светового отверждения текучей консистенции «Флекс Флоу» ТУ 9391-030-40151387-2015.

Регистрационный номер:

Торговое название: «Флекс Флоу».

Состав: Олигоуретан, триэтиленгликоль диметакрилат, бутилированный гидрокситолуол, камфорохион, триметакрилат триэтаноламин, бариевое алюмоборосиликатное стекло, силан, аэросил, пигменты железистые.

Назначение:

«Флекс Флоу» материал временный пломбировочный светового отверждения текучей консистенции предназначен для использования:

в терапевтической стоматологии:

- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены;
- для временного пломбирования при восстановлении полости вкладкой, изготовленной непрямым методом;
- для временного пломбирования при отсроченном лечении до 3-х месяцев;

в ортопедической стоматологии:

- для герметизации винта абатмента в технике создания ортопедических конструкций на имплантатах.

Свойства

«Флекс Флоу» – полимерный материал с высокой текучестью до отверждения и высокой эластичностью после отверждения. В неотвержденном виде материал «Флекс Флоу» представляет собой однородную пасту текучей консистенции без вздутий, сухих мест, следов пигмента и посторонних примесей, консистенция 35-40 мм, глубина отверждения за 10 сек. не менее 3 мм, водопоглощение не более 50 мкг/мм³. Эти свойства материала обеспечивают герметичное закрытие полости и возможность удаления временной пломбы без применения вращающихся инструментов, с помощью экскаватора или зонда. Отверждается материал светом длиной волны 450-500 нм. Цвет материала соответствует шкале расцветки VITA, выпускается цветов: A1, A2, A3, B1, B2.

Способ применения

Материал «Флекс Флоу» вносится в высушенную полость зуба одной порцией и отверждается светом. Рекомендуется отверждать под матрицей, пропускающей световой поток. Время отверждения зависит от толщины слоя материала. Рекомендуемое время отверждения 30-40 секунд. При закрытии глубоких полостей (более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить. Временная пломба не должна входить в окклюзионный контакт.

Комплектность

Материал пломбировочный временный светового отверждения текучей консистенции «Флекс Флоу»

Вариант 1

Шприц с материалом цвета А1 - не более 3 шт.

Принадлежности:

Насадки не более - 9 шт.

Инструкция – 1 шт.

Потребительская тара – 1 шт.

Вариант 2

Шприц с материалом цвета А2 - не более 3 шт.

Принадлежности:

Насадки не более - 9 шт.

Инструкция – 1 шт.

Потребительская тара – 1 шт.

Вариант 3

Шприц с материалом цвета А3 - не более 3 шт.

Принадлежности:

Насадки не более - 9 шт.

Инструкция – 1 шт.

Потребительская тара – 1 шт.

Вариант 4

Шприц с материалом цвета В1 - не более 3 шт.

Принадлежности:

Насадки не более - 9 шт.

Инструкция – 1 шт.

Потребительская тара – 1 шт.

Вариант 5

Шприц с материалом цвета В2 - не более 3 шт.

Принадлежности:

Насадки не более - 9 шт.

Инструкция – 1 шт.

Потребительская тара – 1 шт.

Противопоказания

Противопоказаний нет.

Возможные побочные действия

Паста пломбирочного временного светового материала «Флекс Флоу» может вызвать аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

После работы с материалом тщательно мойте руки.

Условия транспортирования

Материал «Флекс Флоу» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта. Условия транспортирования по ГОСТ 15150 при температуре + (5-24)°С.

Условия хранения

Шприцы с материалом должны быть закрыты сразу после использования, их необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре + (5 -24)°С.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие материала «Флекс Флоу» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия применения

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

Утилизация

Утилизация насадок и шприцев и материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями.

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.

Телефон/факс: +7(495)514-93-47/48 /514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 3 лист.

Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ» Ю.В.Кузовков

