

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДМЭЛ»



Н.Г. Ломидзе

2003г.

«Тележка больничная внутрикорпусная со съмными носилками с подголов-
ником ТБВсн - «МЕДМЭЛ»»

ПАСПОРТ

ГАБР.942819.004 ПС

Срок действия с

до

2003 г.

Инов. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	5
5. Условия эксплуатации.....	5
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7
11. Сведения о рекламациях.....	8

					ГАБР.942819.004 ПС				
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Тележка больничная внутрикорпусная со съемными носилками с подголовником ТБВсн Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
Разработал		Сотников И.В.	<i>Сотников</i>						
Проверил		Ушаков А.В.	<i>Ушаков</i>				2	8	
Нач. отдела									
Н. контроль									
Утвердил		Ломидзе Н.Г.	<i>Ломидзе</i>						

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние тележки больничной внутрикорпусной со съемными носилками с подголовником ТБВсн-«МЕДМЭЛ» (в дальнейшем тележка) зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Тележка предназначена для больниц и других лечебных учреждений.
- 2.2 Конструктивно тележка представляет собой установленную на четыре колесные опоры и съемные носилки. Два колеса по диагонали имеют тормозные устройства.
- 2.3 Носилки имеют подголовник с изменяемым углом наклона, и комплектуется матрасом.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в тележку приведен в таблице.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГАБР.942819.004	Тележка ТБВсн в составе:	
	Тележка	1
	Носилки	1
	Матрас	1
АУКС.942819.033 ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

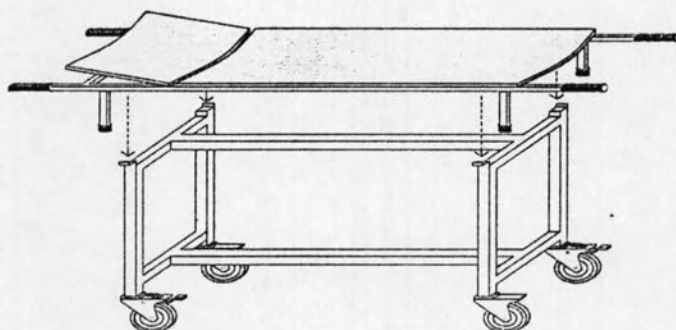


Рис. №1

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры тележки в мм: длина – 2105, ширина – 572, высота ложе – 800.
- 4.2 Масса изделия – 34 кг.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка – до 160 кг.
- 4.4 Угол наклона подголовника: 0°, 15°, 30°, 45°.
- 4.5 Диаметр колес – 150 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Транспортировка тележки может осуществляться одним человеком.
- 5.2 Для фиксации положения тележки следует поставить на тормоз оба колеса с тормозным устройством.
- 5.3 Угол наклона подголовника изменяется вручную.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Тележка подвергается регулярному внешнему осмотру.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Тележки допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Хранение тележек должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отопливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка больничная внутрикорпусная со съемными носилками с подголовником ТБВсн

зав. № _____, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Тележка больничная внутрикорпусная со съемными носилками с подголовником ТБВсн

зав. № _____, упакована на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

Тележку ТБВсн
после упаковки принял _____

Подпись

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода тележки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в тележку.

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав тележки, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание тележки.

11.2. Гарантийное обслуживание тележки производит предприятие ЗАО «МЕДМЭЛ», расположенное по адресу:

111250, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, 11

Тел./факс : (095) 152-17-46, (095) 152-19-84.

11.3. Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание Рекламационного Акта	Меры, принятые по рекламации

					ГАБР.942819.004 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		