



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Андросов В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений
гражданской обороны, на 100-150 человек
по ТУ 9398-030-85535470-2015», производства ЗАО «Виталфарм»

ИМЮЕ.939.1045-001И

Назначение медицинского изделия: для оснащения каждого защитного сооружения федеральной муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики РФ вне зависимости от формы собственности.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки:

1. Аммиак, раствор 10% 40мл – для стимуляции дыхания
2. Бикарбон, таблетки – внутрь при повышенной кислотности желудочного сока;
3. Бромкамфора – внутрь при тревожных ситуациях;
4. Бриллиантового зеленого спиртовой раствор – дезинфицирующее средство;
5. Валидол, таблетки – седативное, сосудорасширяющее средство;
6. Йод - дезинфицирующее средство;
7. Калия перманганат – обеззараживающее и антисептическое средство;
8. Ацетилсалициловая кислота, таблетки – обезболивающее и жаропонижающее средство;
9. Кислота борная – наружно, как дезинфицирующее и антисептическое средство;
10. Настойка валерианы – успокаивающее средство;
11. Корвалол, капли – сосудорасширяющее средство;
12. Нитроглицерин (таблетки, капсулы) – для купирования острых приступов стенокардии;
13. Натрия гидрокарбонат - для нейтрализации ожогов кожи и внутрь при повышенной кислотности при воспалениях глаз;
14. Сульфацил натрия, капли – при воспалении глаз;
15. Таблетки от кашля – при кашле, отхаркивающее средство;
16. Фталазол, таблетки – внутрь при острой дизентерии;
17. Анальгин, таблетки – болеутоляющее средство;
18. Цитрамон П, таблетки – обезболивающее и жаропонижающее средство;
19. Бинт марлевый медицинский – перевязочное средство;
20. Вата – применяется при перевязке;
21. Грелка резиновая – для местного согревания тела;
22. Салфетка марлевая медицинская 14 см x 16 см – перевязочное средство;
23. Лейкопластырь рулонный – применяется при перевязке;
24. Жгут кровоостанавливающий – для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавливания конечности;
25. Ванночка глазная – для промывания и вакуумного массажа глаз;
26. Пипетка глазная в футляре – для закапывания капель в глаза;
27. Стаканчик для приема лекарств – для приема лекарств;
28. Ножницы хирургические прямые – при перевязке;
29. Термометр медицинский - для измерения температуры тела.

ИМЮЕ.939.1045-001И

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Противопоказания:

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до 25°C. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Лекарственные средства, непригодные к использованию, складировать в пакеты и маркировать («отходы – класс Г») – передать для утилизации в специализированную организацию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 .

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в пакеты или контейнеры для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.2790. Футляр, вышедший из строя разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1045-001И

Сшито 3 листа Лист(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»



Андросов В.В.



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений
гражданской обороны, на 400-600 человек
по ТУ 9398-030-85535470-2015», производства ЗАО «Виталфарм»

ИМЮЕ.939.1045-002И

Назначение медицинского изделия: для оснащения каждого защитного сооружения федеральной муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики РФ вне зависимости от формы собственности. .

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки:

1. Аммиак, раствор 10% 40мл – для стимуляции дыхания;
2. Анальгин, таблетки – болеутоляющее средство;
3. Бриллиантового зеленого спиртовой раствор – дезинфицирующее средство;
4. Бромкамфора – внутрь при тревожных ситуациях;
5. Валидол, таблетки – седативное, сосудорасширяющее средство;
6. Йод - дезинфицирующее средство;
7. Калия перманганат – обеззараживающее и антисептическое средство;
8. Уголь активированный – адсорбирующее средство;
9. Ацетилсалициловая кислота, таблетки – обезболивающее и жаропонижающее средство;
10. Кислота борная – наружно, как дезинфицирующее и антисептическое средство;
11. Настойка валерианы – успокаивающее средство;
12. Корвалол, капли – сосудорасширяющее средство;
12. Натрия гидрокарбонат - для нейтрализации ожогов кожи и внутрь при повышенной кислотности при воспалениях глаз;
13. Нитроглицерин (таблетки, капсулы) – для купирования острых приступов стенокардии;
14. Сульфацил натрия, капли – при воспалении глаз;
15. Сульфадиметоксин – против различных бактериальных инфекций;
16. Цитрамон П, таблетки – обезболивающее и жаропонижающее средство;
17. Таблетки от кашля – при кашле, отхаркивающее средство;
18. Фталазол, таблетки – внутрь при острой дизентерии;
- Анальгин, таблетки – болеутоляющее средство;
19. Клей БФ-6 – ранозаживляющее и антисептическое средство;
20. Лоперамид – противодиарейное средство;
21. Бинт марлевый медицинский – перевязочное средство;
22. Вата – применяется при перевязке;
23. Лейкопластырь рулонный – применяется при перевязке;
24. Салфетка марлевая медицинская 14 см x 16 см – перевязочное средство;
25. Жгут кровоостанавливающий – для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавливания конечности;
26. Грелка резиновая – для местного согревания тела;

ИМЮЕ.939.1045-002И

27. Ножницы хирургические прямые – при перевязке;
28. Пипетка глазная в футляре – для закапывания капель в глаза;
29. Ванночка глазная – для промывания и вакуумного массажа глаз;
30. Стаканчик для приема лекарств – для приема лекарств;
31. Термометр медицинский - для измерения температуры тела.
32. Комплект шин транспортных
(для верхней и нижней конечности) – для фиксации конечностей при переломах и вывихах.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Противопоказания:

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до 25°C.
Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Лекарственные средства, непригодные к использованию, складировать в пакеты и маркировать («отходы – класс Г») – передать для утилизации в специализированную организацию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 .

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в пакеты или контейнеры для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляр, вышедший из строя разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1045-002И

Сшито 3 (три) Лист(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»



Андросов В.В.

Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны, на 100-150 человек

На основании приказа МЧС РФ №583 от 15 декабря 2002 г. "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"

Назначение: для оснащения каждого защитного сооружения федеральной муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики РФ вне зависимости от формы собственности.

Область применения: для оказания первой само- и взаимопомощи.

ЭТИКЕТКА Перечень вложений

Медикаменты		Перевязочные средства	
1. Аммиак, раствор 10% 40 мл	1 фл.	19. Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх10см	5 шт.
2. Бикарбон таблетки №6	1 уп.	20. Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50 г.	3 пачки.
3. Бромкамфора 250 мг. таблетки №30	1 уп.	21. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 смх16см, №10	1 шт.
4. Бриллиантового зеленого 1% спиртовой раствор по 10 мл во флаконе	2 фл.	22. Лейкопластырь рулонный 5смх500 см	1 шт.
5. Валидол 60 мг. таблетки не менее №6	3 уп.	Медицинские предметы	
6. Йода 5% спиртовой раствор по 10 мл во флаконе	2 фл.	23. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
7. Калия перманганат, не менее 3г.	1 уп.	24. Ванночка глазная	1 шт.
8. Кислота ацетилсалициловая 500 мг таблетки №10	1 уп.	25. Пипетка глазная в футляре	5 шт.
9. Кислота борная 3% спиртовой раствор 25 мл	2 фл.	26. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл.	1 шт.
10. Настойка валерианы 25 мл.	1 фл.	27. Ножницы хирургические прямые	1 шт.
11. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл.	1 фл.	28. Термометр медицинский	5 шт.
12. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг №20(2) или таблетки 0,5 мг №40	1 уп.	Принадлежности	
13. Натрия гидрокарбонат 40 мг.	1 уп.	29. Инструкция по применению	1 шт.
14. Сульфацил натрия 20% раствор 5 мл. во флаконе или 1,5 мл(2)	4 фл. или 7 фл.	30. Футляр	1 шт.
15. Таблетки от кашля, таблетки №10	5 уп.		
16. Фталазол 500 мг таблетки №10	2 уп.		
17. Анальгин 500 мг таблетки №10	4 уп.		
18. Цитрамон П таблетки не менее №6	3 уп.		

ТУ 9398-030-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте! Лекарственные средства, непригодные к использованию, складировать в пакеты и маркировать («отходы - класс Г») - передать для утилизации в специализированную организацию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б

и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, выпавшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Не подлежит обязательной сертификация.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Срок годности: 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер партии — 01.

Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны, на 100-150 человек

Инструкция по применению

Аммиак, раствор	для стимуляции дыхания	Салфетка марлевая медицинская 14смх16см	перевязочное средство
Бикарбон, таблетки	внутри при повышенной кислотности желудочного сока	Лейкопластырь рулонный	применяется при перевязке
Бромкамфора	внутри при тревожных состояниях	Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавливания конечности
Бриллиантового зеленого спиртовой раствор	дезинфицирующее средство	Ванночка глазная	для промывания и вакуумного массажа глаз
Валидол, таблетки	седативное, сосудорасширяющее	Пипетка глазная в футляре	для закапывания капель в глаза
Йод	дезинфицирующее средство	Стаканчик для приема лекарств	для приема лекарств
Калия перманганат	обеззараживающее и антисептическое средство	Ножницы хирургические прямые	при перевязке
Ацетилсалициловая кислота таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство	Термометр медицинский	для измерения температуры тела
Кислота борная	наружно, как дезинфицирующее и антисептическое средство		
Настойка валерианы	успокаивающее средство		
Корвалол, капли	сосудорасширяющее средство		
Нитроглицерин, (таб, капс)	для купирования острых приступов стенокардии		
Натрия гидрокарбонат	для нейтрализации ожогов щелочи и внутри при повышенной кислотности при воспалениях глаз		
Сульфацил натрия, капли	при кашле, отхаркивающее средство		
Таблетки от кашля, таб	внутри при острой дизентерии		
Фталазол, таб	болеутоляющее действие		
Анальгин таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство		
Цитрамон П, таб	перевязочное средство		
Бинт марлевый медицинский	применяется при перевязке		
Вата	для местного согревания тела		
Грежки резиновые			



Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны, на 400-600 человек

На основании приказа МЧС РФ №583 от 15 декабря 2002 г. "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"

Назначение: для оснащения каждого защитного сооружения федеральной муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики РФ вне зависимости от формы собственности.

Область применения: для оказания первой само- и взаимопомощи.

ЭТИКЕТКА Перечень вложений

Медикаменты			
1. Аммиак, раствор 10% 40 мл	1 фл.	20. Клей БФ-6, раствор для наружного применения спиртовой, не менее 10 г.	1 фл.
2. Анальгин 500 мг таблетки №10	5 уп.	21. Лоперамид 2 мг таблетки №20 или 2 мг капсулы №20	2 уп.
3. Бриллиантового зеленого 1% спиртовой раствор по 10 мл во флаконе	5 фл.	Перевязочные средства	
4. Бромкамфора 250 мг таблетки №30	1 уп.	22. Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх10см	10 шт.
5. Валидол 60 мг таблетки не менее №6	5 уп.	23. Бинт марлевый медицинский стерильный 7мх14см	10 шт.
6. Йода 5% спиртовой раствор по 10 мл во флаконе	5 фл.	24. Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50 г.	5 пачек.
7. Калия перманганат, не менее 3г.	3 уп.	25. Лейкопластырь рулонный 5смх500 см	1 шт.
8. Уголь активированный 250 мг таблетки №10	3 уп.	26. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 смх16см,	2 шт.
9. Кислота ацетилсалициловая 500 мг таблетки №10	3 уп.	Медицинские предметы	
10. Кислота борная 3% спиртовой раствор 25 мл	6 фл.	27. Жгут кровоостанавливающий	2 шт.
11. Настойка валерианы 25 мл.	4 фл.	28. Грелка резиновая	1 шт.
12. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл.	1 фл.	29. Ножницы хирургические прямые	1 шт.
13. Натрия гидрокарбонат 40 мг.	5 уп.	30. Пипетка глазная в футляре	4 шт.
14. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг №20(2) или таблетки 0,5 мг №40	2 уп.	31. Ванночка глазная	20 шт.
15. Сульфацил натрия 20% раствор 5 мл. во флаконе или 1,5 мл(2)	10 фл.	32. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл.	4 шт.
	или 17 фл.	33. Термометр медицинский	10 шт.
16. Сульфадиметоксин 500 мг таблетки №10	3 уп.	34. Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	4 к-та.
17. Цитрамон П таблетки не менее №6	3 уп.	Принадлежности	
18. Таблетки от кашля, таблетки №10	3 уп.	35. Инструкция по применению	1 шт.
19. Фталазол 500 мг таблетки №10	3 уп.	36. Футляр	1 шт.

ТУ 9398-030-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте! Лекарственные средства, непригодные к использованию, складировать в пакеты и маркировать («отходы – класс Г») – передать для утилизации в специализированную организацию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры-сумки, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Не подлежит обязательной сертификации.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Срок годности: 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра-сумки:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер партии — 01.

Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны, на 400-600 человек Инструкция по применению

Аммиак, раствор	для стимуляции дыхания	Клей БФ-6, раствор для наружного применения спиртовой, не менее 10г.	ранозаживляющее и антисептическое действие
Анальгин таб.	болеутоляющее действие	Лоперамид	противодиарейное средство
Бриллиантового зеленого спиртовой раствор	дезинфицирующее средство	Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Бромкамфора	внутрь при тревожных состояниях	Вата	применяется при перевязке
Валидол, таблетки	седативное, сосудорасширяющее	Лейкопластырь рулонный	перевязочное средство
Йод	дезинфицирующее средство	Салфетка марлевая медицинская 14смх16см	применяется при перевязке
Калия перманганат	обеззараживающее и антисептическое средство	Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавливания конечности
Уголь активированный 250 мг таблетки №10	адсорбирующее средство	Грелка резиновая	для местного согревания тела
Ацетилсалициловая кислота таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство	Ножницы хирургические прямые	при перевязке
Кислота борная	наружно, как дезинфицирующее и антисептическое средство	Пипетка глазная в футляре	для закапывания капель в глаза
Настойка валерианы	успокаивающее средство	Ванночка глазная	для промывания и вакуумного массажа глаз
Корвалол, капли	сосудорасширяющее средство	Стаканчик для приема лекарств	для приема лекарств
Натрия гидрокарбонат	для нейтрализации ожогов кожи и внутрь при повышенной кислотности	Термометр медицинский	для измерения температуры тела
Нитроглицерин, (таб, капс)	для купирования острых приступов стенокардии	Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечностей)	для фиксации конечностей при переломах и вывихах
Сульфацил натрия, капли	при воспалениях глаз		
Сульфадиметоксин	против различных бактериальных инфекций		
Цитрамон П, таб	обезболивающее и жаропонижающее средство		
Таблетки от кашля, таб	при кашле, отхаркивающее средство		
Фталазол, таб	внутрь при острой дизентерии		

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,

г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Сшито 2 (два) Лист(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»



Андросов В.В.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

