
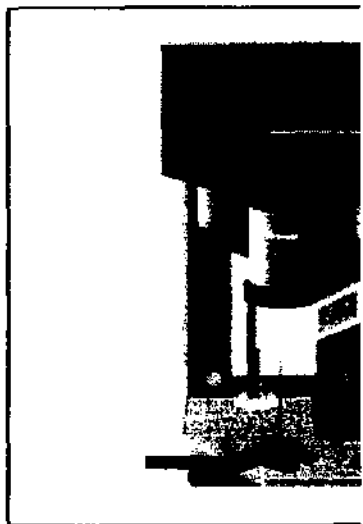


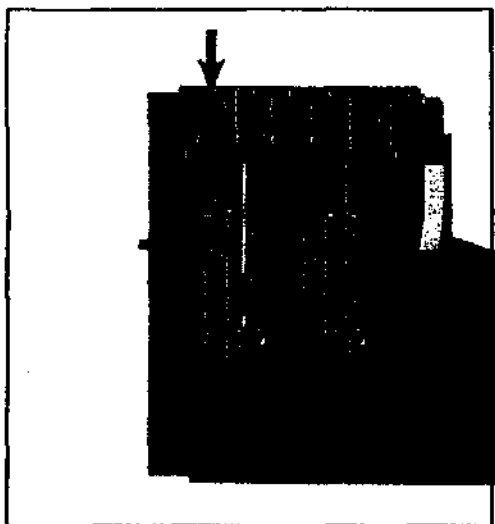


Нормальная промывка

1. Нажимайте кнопку **SYSTEM** до отображения на мониторе надписи **SY-Diag**.
2. Для выбора **Device Check** (проверка устройства) нажмите ↑.
3. Для выбора **Prime** (Промывка) нажмите ←.
4. Для запуска промывки нажмите кнопку **START**.*
5. По окончании промывки нажмите **ESCAPE**. Анализатор начнет работать автоматически

**Во время проверки осмотрите шприцы, пробирки и клапанный блок в отношении наличия пузырьков воздуха, утечки или изменения цвета. Проверьте, хорошо ли набирается промывочной буфер в наконечники переноса и ресуспендирования.*

Версия 3.0 4/98

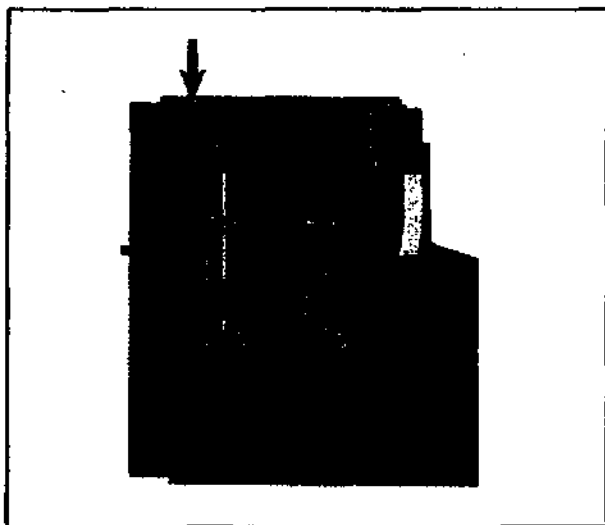

Расширенная промывка

1. Питание анализатора отключить.
2. Откройте крышку TCB.
3. Включите питание анализатора.
4. Нажимайте кнопку **SYSTEM** до отображения на мониторе надписи *SY-Diag*.
5. Для выбора **Device Check** (проверка устройства) нажмите **↑**.
6. Для выбора **Prime** (Промывка) нажмите **←**.
7. Для выбора расширенной промывки (**Extended**) используйте кнопку **STEP**.
8. Для начала промывки нажмите кнопку **ESCAPE** и закройте крышку TCB*.
9. Промывка завершится автоматически.

3

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕАГЕНТНЫХ КАССЕТ НА ШТАТИВЕ

1. Нажимайте **LOAD** до появления надписи **L-RCass**
2. Нажмите **EDIT**
3. При помощи клавиатуры или сканера штрихового кода введите ID номер штатива.
Нажмите **ENTER**
4. Если это новый штатив, на экране появится сообщение **New File**. Нажмите **ENTER**.
5. Для выбора типа реагента (специфический или общий) нажмите **STEP**. Нажмите **ENTER**.

При помощи клавиатуры или сканера штрихового кода задайте положение кассеты на штативе. При использовании клавиатуры нажмите **ENTER**.

7. Введите ID номер реагентной кассеты при помощи клавиатуры или сканера штрихового кода.

При использовании клавиатуры два первых буквенных обозначения вводятся путем нажатия **ALPHA**, затем набирается соответствующий цифровой код (См. Таблицу ручного ввода буквенных обозначений).

Повторите для второго обозначения.

Продолжайте ввод обозначений, используя буквенные и/или цифровые клавиши. По окончании нажмите **ENTER**.

8. Для каждой кассеты повторите последовательность действий, описанную в пунктах 6-7.

9. Для получения распечатки нажмите **PRINT**.

10. Для сохранения параметров нажмите **ESCAPE**.



В приведенном примере:


SB = Субстрат

3 = 75 тестов (3×25)

J = Октябрь

9 = 1999


8312 = Идентификационный номер кассеты

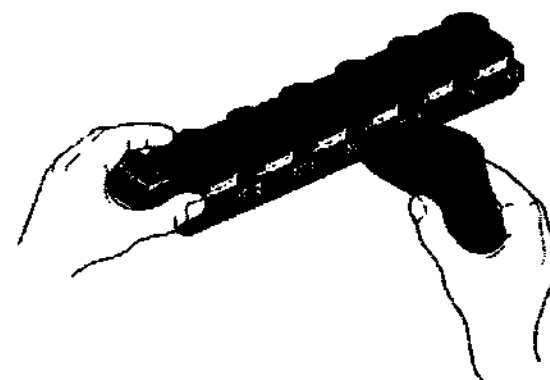

Версия 3.0 4/98

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕАГЕНТНЫХ ШТАТИВОВ НА ПЛАТФОРМЕ

1. Нажимайте **LOAD** до появления на дисплее надписи *L-RRack*.
2. Нажмите **EDIT**.
3. Для перемещения курсора в требуемое положение, соответствующее позиции штатива на платформе (Loc1, Loc2, generics), нажмите **ENTER**.
4. Введите номер штатива, используя клавиатуру или сканер штрихового кода. При использовании клавиатуры нажмите **ENTER**.
5. Для каждого штатива повторите последовательность действий, описанную в пп. 3-4.
1. Для сохранения параметров нажмите **ESCAPE**.

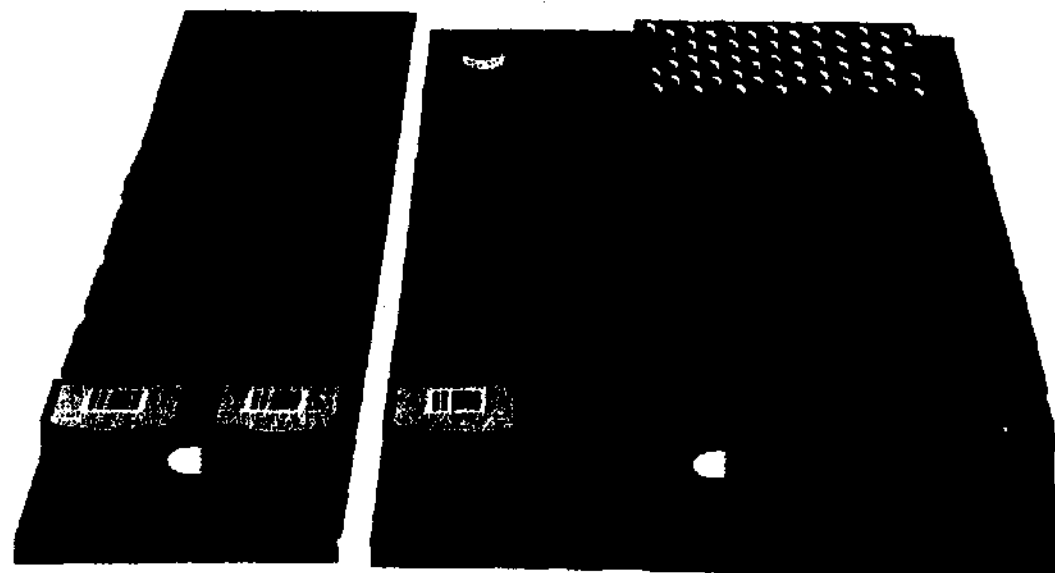

Версия 3.0 4/98