

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
От _____ 20 ____ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.

«06»

2010г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Стол массажный для медицинских учреждений с принадлежностями
(наименование изделия медицинского назначения)

Стол массажный для медицинских учреждений в следующих исполнениях:

СМ- «Техстрой 1» односекционный;

СМ- «Техстрой 2» двухсекционный;

СМ- «Техстрой 3» трехсекционный;

СМ- «Техстрой 4» трехсекционный;

СМ- «Техстрой 5» двухсекционный;

СМ- «Техстрой 6» трехсекционный.

К столам массажным любой модели могут дополнительно прилагаться: подлокотники, набор валиков и полуваликов: (валик большой -1шт.; валик малый -1шт.; полувалик большой - 1шт.; полувалик малый - 1шт.; подушка -1шт.; бублик - 1шт.).

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования столов массажных убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на Вашей территории.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Столы массажные предназначены для использования в медицинских учреждениях.

Столы массажные предназначены для использования в нормальном, сухом помещении при температуре от +10 до +40С°. Питание 220 В, 50 Гц (СМ- «Техстрой 1»; СМ- «Техстрой 2»; СМ- «Техстрой 3»; СМ- «Техстрой 4»; СМ- «Техстрой 6»). Разрешенная температура хранения -5 - +60 С°, влажность 30-75 %.

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Стол массажный СМ- «Техстрой 1»

Стол массажный СМ- «Техстрой 1» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала.

Стол массажный состоит из основания (силовая рама), ложе, двух подлокотников, привода. Основание изготовлено из круглых труб диаметром 20 и 25 мм, и профильной трубы 40 * 25, 25*25 мм. К основанию крепятся четыре штыревых самоориентирующихся колеса диаметром 100/125 мм, и имеют центральную тормозную систему. Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей следов. В спиной части основания крепятся регулируемые подлокотники. Подлокотники выполнены из ППУ, высотой 50 мм, и имеют съемные чехлы из кожзама. Ложе изготовлено из профильной трубы 40*25 мм, ДСП и ППУ, толщиной 50 мм, обтянуто кожзамом.

Изменение высоты 600-835 мм происходит при помощи электропривода LINAK (производства Дания) с дистанционным пультом управления. Электропривод работает от сети однофазового переменного тока с частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В и рассчитан на кратковременные отклонения напряжения питания $\pm 10\%$ от номинального значения.

Все металлические части кровати окрашены белой полимерно - порошковой краской.

Габаритные размеры: 2120 х 900 х 600-835;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Масса стола не более - 80 кг;

Срок службы - 7 лет;

Гарантия – 12.

Стол массажный СМ- «Техстрой 2»

Стол массажный СМ- «Техстрой 2» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала.

Стол массажный с подвижной (регулируемой) секцией груди.

Стол массажный состоит из основания (силовая рама), ложе, двух подлокотников, привода. Основание изготовлено из круглых труб диаметром 20 и 25 мм, и профильной трубы 40 * 25, 25*25 мм. К основанию крепятся четыре штыревых самоориентирующихся колеса диаметром 100/125 мм, и имеют центральную тормозную систему. Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей следов. В спиной части основания крепятся регулируемые подлокотники. Подлокотники выполнены из ППУ, высотой 50 мм, и имеют съемные чехлы из кожзама. Ложе изготовлено из профильной трубы 40*25 мм, ДСП и ППУ, толщиной 50 мм, обтянуто кожзамом.

Регулировка секций стола:

1. Угол наклона грудной секции относительно рамы каркаса, вверх

50 град, не менее (RASTOMAT)

Грудная секция регулируются при помощи механизма - растомата, в количестве двух штук. Изменение высоты 600-835 мм происходит при помощи электропривода LINAK (производства Дания) с дистанционным пультом управления. Электропривод работает от сети однофазового переменного тока с частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В и рассчитан на кратковременные отклонения напряжения питания $\pm 10\%$ от номинального значения.

Все металлические части кровати окрашены белой полимерно - порошковой краской.

Габаритные размеры: 2120 x 900 x 600-835;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Масса стола не более - 80 кг;

Срок службы - 7 лет;

Гарантия - 12 месяцев.

Стол массажный СМ- «Техстрой 3»

Стол массажный СМ- «Техстрой 3» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала.

Стол массажный с подвижной (регулируемой) секцией груди и ножной секцией.

Стол массажный состоит из основания (силовая рама), ложе, двух подлокотников, привода. Основание изготовлено из круглых труб диаметром 20 и 25 мм, и профильной трубы 40 * 25, 25*25 мм. К основанию крепятся четыре штыревых самоориентирующихся колеса диаметром 100/125 мм, и имеют центральную тормозную систему. Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей следов. В спиной части основания крепятся регулируемые подлокотники. Подлокотники выполнены из ППУ, высотой 50 мм, и имеют съемные чехлы из кожзама. Ложе изготовлено из профильной трубы 40*25 мм, ДСП и ППУ, толщиной 50 мм, обтянуто кожзамом.

Регулировка секций стола:

1. Угол наклона грудной секции относительно рамы каркаса, вверх

50 град, не менее (RASTOMAT)

2. Угол наклона ножной секции относительно рамы каркаса, вверх

45 град, не менее (RASTOMAT)

Грудная и ножная секции регулируются при помощи механизма - растомата, в количестве двух штук. Изменение высоты 600-835 мм происходит при помощи электропривода LINAK (производства Дания) с дистанционным пультом управления. Электропривод работает от сети однофазового переменного тока с частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В и рассчитан на кратковременные отклонения напряжения питания $\pm$

10% от номинального значения.

Все металлические части кровати окрашены белой полимерно - порошковой краской.

Габаритные размеры: 2120 x 900 x 600-835;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Масса стола не более - 80 кг;

Срок службы - 7 лет;

Гарантия - 12 месяцев.

Стол массажный СМ- «Техстрой 4»

Стол массажный СМ- «Техстрой 4» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала и при уходе за пациентом.

Стол массажный с тремя подвижными секциями.

Стол массажный состоит из основания (силовая рама), ложе, четырех подлокотников, привода. Основание изготовлено из круглых труб диаметром 20 и 25 мм, и профильной трубы 40 * 25, 25*25 мм. К основанию крепятся четыре штыревых самоориентирующихся колеса диаметром 100/125 мм, и имеют центральную тормозную систему. Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей следов. В головной и спиной частях основания крепятся регулируемые подлокотники. Подлокотники выполнены из ППУ, высотой 50 мм, и имеют съемные чехлы из кожзама. Ложе изготовлено из профильной трубы 40*25 мм, ДСП и ППУ, толщиной 50 мм, обтянуто кожзамом.

Регулировка секций стола:

1. Угол наклона грудной секции относительно рамы каркаса, вверх

55 град, не менее (электропривод LINAK)

2. Угол наклона ножной секции относительно рамы каркаса, вверх

30 град, не менее (электропривод LINAK)

3. Угол наклона головной секции относительно каркаса рамы

90 град, не менее вверх (RASTOMAT)

15 град, не менее вниз(RASTOMAT)

Головная секция регулируется при помощи механизма - растомата, в количестве четырех штук. Спинная и тазобедренная: в крайнем верхнем положении автоматически срабатывает упор и при опускании стола вниз спинная и тазобедренная секции изменяют угол от 0 до 30 ° и 0 до - 30 °. Изменение высоты 600-835 мм происходит при помощи электропривода LINAK (производства Дания) с дистанционным пультом управления. Электропривод работает от сети однофазового переменного тока с частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В и рассчитан на кратковременные отклонения напряжения питания $\pm 10\%$ от номинального значения. Все металлические части кровати окрашены белой полимерно - порошковой краской.

Габаритные размеры: 2120 x 900 x 600-835;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Масса стола не более - 80 кг;

Срок службы - 7 лет;

Гарантия - 12 месяцев.

Стол массажный СМ- «Техстрой 5»

Стол массажный СМ- «Техстрой 5» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала.

Стол состоит из несущей рамы с четырьмя колесными опорами импортного производства «TENTE», из немаркой резины, две из которых с тормозом, диаметром 125мм. Спаренных ножек изготовленных из профильной трубы 25*25мм. Ложе стола неподвижно крепиться к стловой раме. Подголовник стола изменяет свое положение при помощи механизма «Rastomat». По бокам массажного стола располагаются подлокотники, они регулируются по высоте и повороту при помощи цангового зажима. Все мягкие части массажного стола

выполнены из ДСП толщиной 16 мм, покрыт ППУ высотой 50 мм, и обтянут винилизкожей импортного производства.

Стол массажный комплектуется одним гидравлическим приводом, импортного производства, для поднятия и опускания ложе.

Габаритные размеры:

Длина - 2120 мм;

Ширина - 650 мм;

Высота - 600-800 мм;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Вес изделия - 60 кг.

Стол массажный СМ- «Техстрой 6»

Стол массажный СМ- «Техстрой 6» позволяет создать необходимые условия для лечебных и профилактических мероприятий, а так же для удобства обслуживающего персонала и при уходе за пациентом.

Стол массажный с тремя подвижными секциями.

Стол массажный состоит из основания (силовая рама), ложе, четырех подлокотников, привода. Основание изготовлено из круглых труб диаметром 20 и 25 мм, и профильной трубы 40 * 25, 25*25 мм. К основанию крепятся четыре штыревых самоориентирующихся колеса диаметром 100/125 мм, и имеют центральную тормозную систему. Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей следов. В головной и спиной частях основания крепятся регулируемые подлокотники. Подлокотники выполнены из ППУ, высотой 50 мм, и имеют съемные чехлы из кожзама. Ложе изготовлено из профильной трубы 40*25 мм, ДСП и ППУ, толщиной 50 мм, обтянуто кожзамом.

Регулировка секций стола:

1. Угол наклона грудной секции относительно рамы каркаса, вверх

55 град, не менее (электропривод LINAK)

2. Угол наклона ножной секции относительно рамы каркаса, вверх

30 град, не менее (электропривод LINAK)

3. Угол наклона головной секции относительно каркаса рамы

90 град, не менее вверх (электропривод LINAK)

15 град, не менее вниз (электропривод LINAK)

Головная секция регулируется при помощи механизма - электропривод LINAK. Спинная и тазобедренная: в крайнем верхнем положении автоматически срабатывает упор и при опускании стола вниз спинная и тазобедренная секции изменяют угол от 0 до 30 ° и 0 до - 30 °. Изменение высоты 600-835 мм происходит при помощи электропривода LINAK (производства Дания) с дистанционным пультом управления. Электропривод работает от сети однофазового переменного тока с частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В и рассчитан на кратковременные отклонения напряжения питания $\pm 10\%$ от номинального значения. Все металлические части кровати окрашены белой полимерно - порошковой краской.

Габаритные размеры: 2120 x 900 x 600-835;

Максимальная нагрузка - 180 кг;

Масса стола не более - 80 кг;

Срок службы - 7 лет;

Гарантия - 12 месяцев.

4. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Дезинфекцию столов массажных проводят способами протирания 1% раствором хлорамина. Допускается использование растворов средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства (типа «Лотос») разрешенного для обработки изделий медицинского

назначения, в количестве 0,5% 150 г моющего средства на 10 л раствора хлорамина).
Рекомендуемая температура раствора 50С. Периодичность обработки изделия 2 раза в сутки.



***ВНИМАНИЕ! Всегда перед чисткой стола массажного
отключайте его от сети электропитания.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается мыть столы
массажные при помощи душа.***

5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи, при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации, хранения и санитарной обработки изделия.
При соблюдении правил эксплуатации средний срок службы изделия составляет 7 лет.