

Фотографическое изображение медицинского изделия

Кровать медицинская многофункциональная Progressa, модель Р 7500



1. Каркас кровати (Bed tray).
2. Кабель сетевой (Mains connection cable).
3. Инструкция (Instruction).


Принадлежности:

1. Головная спинка (Headboard).
2. Ножная спинка (Footboard).
3. Складывающиеся боковые поручни с встроенными панелями управления «Point-of-Care» – пара (Folding Siderails with integrated Point-of-Care Controls-pair).
4. Ручки для транспортировки- 2 шт.(Transport Handles-2).
5. Педали подъема и опускания кровати- 2 шт. (Bed Up/Down—Foot Controls- 2).
6. Система амортизаторов WallGuard (Wallguard Roller Bumper System).
7. Гнезда для оборудования- 4 шт.(Equipment Socket- 4).
8. Педаль управления для перехода кровати в положение для проведения сердечно-легочной реанимации без помощи рук (CPR control pedal Hands Free).
9. Педаль управления и торможения Point-of-Care (Point-of-Care Brake and Steer Pedal).
10. Блок автоматической транспортировки «IntelliDrive» (IntelliDrive Powered Transport Mechanism).
11. Ночная подсветка (Night light).
12. Пульт управления для медперсонала (Caregiver Pendant).
13. Профилактическая поверхность Progressa (Progressa Prevention surface).
14. Терапевтическая поверхность Progressa (Progressa Therapy Surface).
15. Поверхность Progressa для профилактики легочных осложнений (Progressa Pulmonary Surface).
16. Высокомобильная система на роликах с центральным тормозом (Urethane Central Locking Caster System).
17. Пятое рулевое колесо (Fifth Wheel Steering).
18. Раздвижная инфузионная стойка, стандартная (Standard, Telescopic IV Pole).
19. Инфузионная стойка постоянной длины (Permanent IV Pole).
20. Съемная инфузионная стойка (Removable IV Pole).
21. Система обеспечения ифузионной терапии (включает 2 разборные регулируемые инфузионные стойки)(Infusion Support System (includes 2 movable and adjustable IV poles).
22. Вертикальный держатель кислородного баллона (Vertical Oxygen Tank Holder).
23. Стойка для подвода сервисных трубопроводов (Line Manager).
24. Держатель дренажных мешков (Drainage Bag Holder).
25. Держатель для сетевого шнура (Power cord manager).
26. Вытяжная надкроватьная рама (Traction Frame).
27. Актуатор удлинения и укорачивания ножной секции FlexAfoot(FlexAfoot Feature (Foot Extend/Retract Actuator).

Организации-изготовители


- 1.Hill-Rom, Inc., 1069 State Route 46, East, Batesville, Indiana, 47006, USA
2. Hill-Rom, Inc., 4349 Corporate Road Charleston, SC 29405, USA

Возвратный прибор

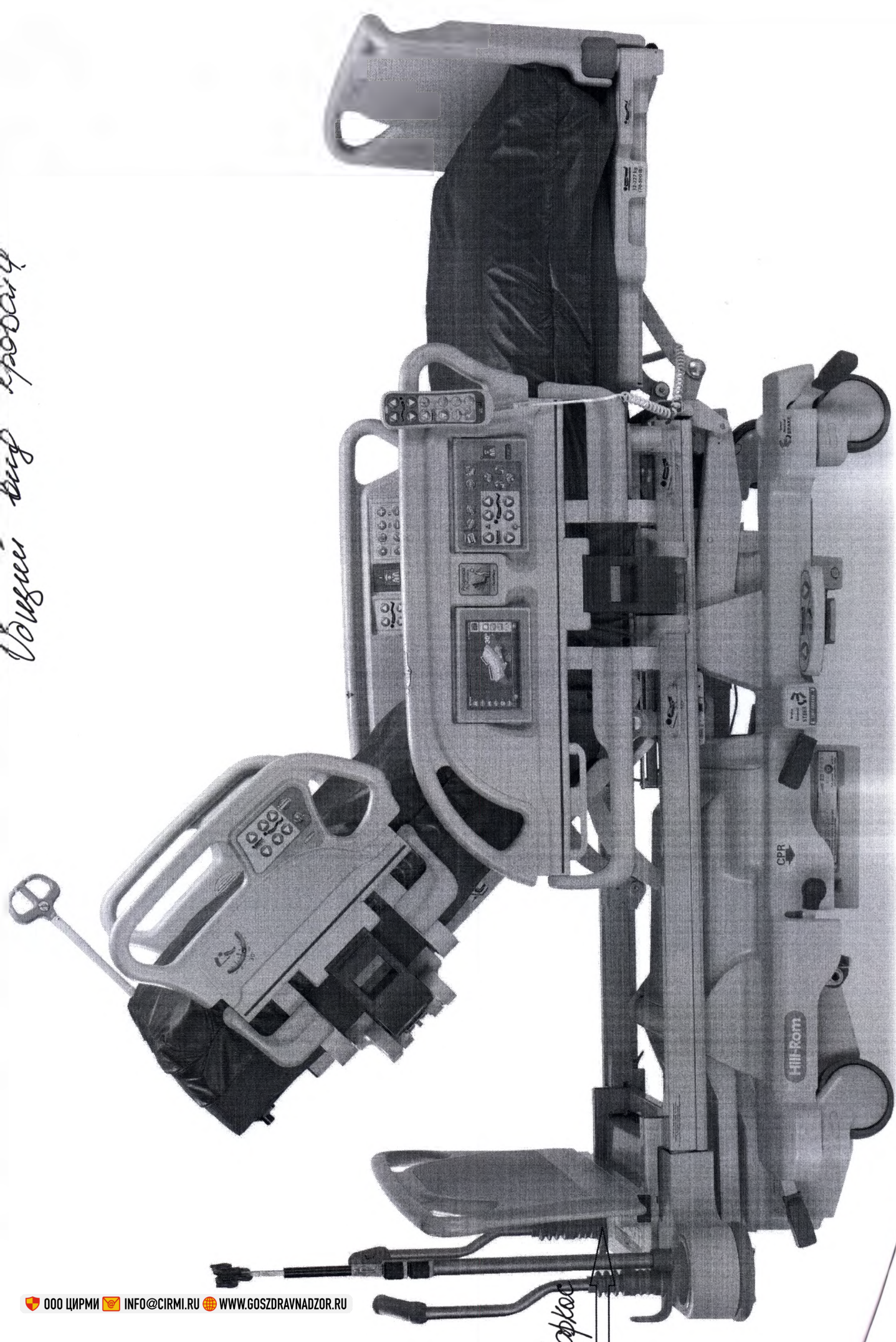

звон

Кабель сетевой

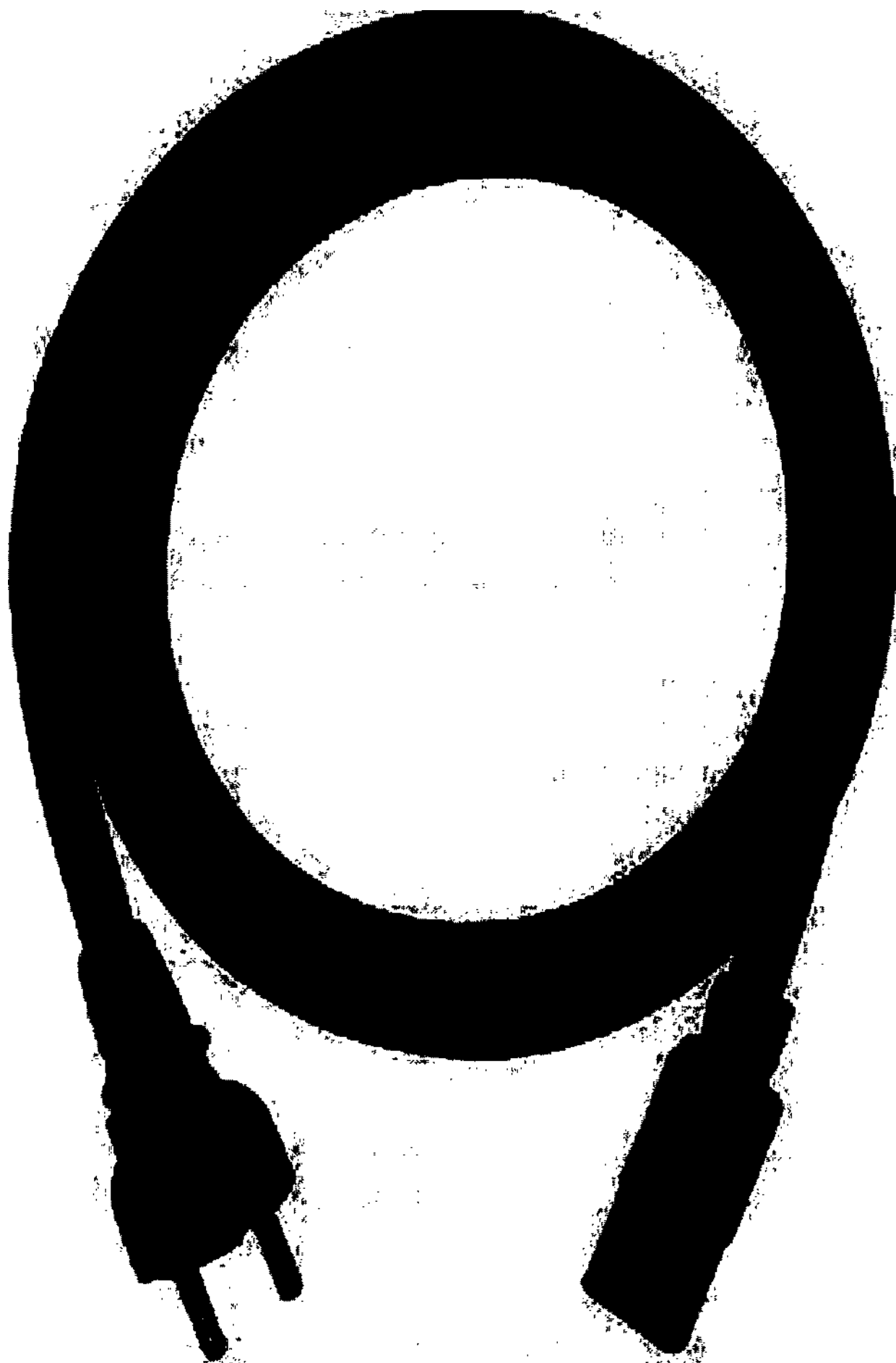

Книжка № 17/100




Производство компании Progress
Книжка Progress
ЭКОЛОГИЯ И
РЫБОЛОВСТВО ПО

Васильев



Горюхаев С.И.

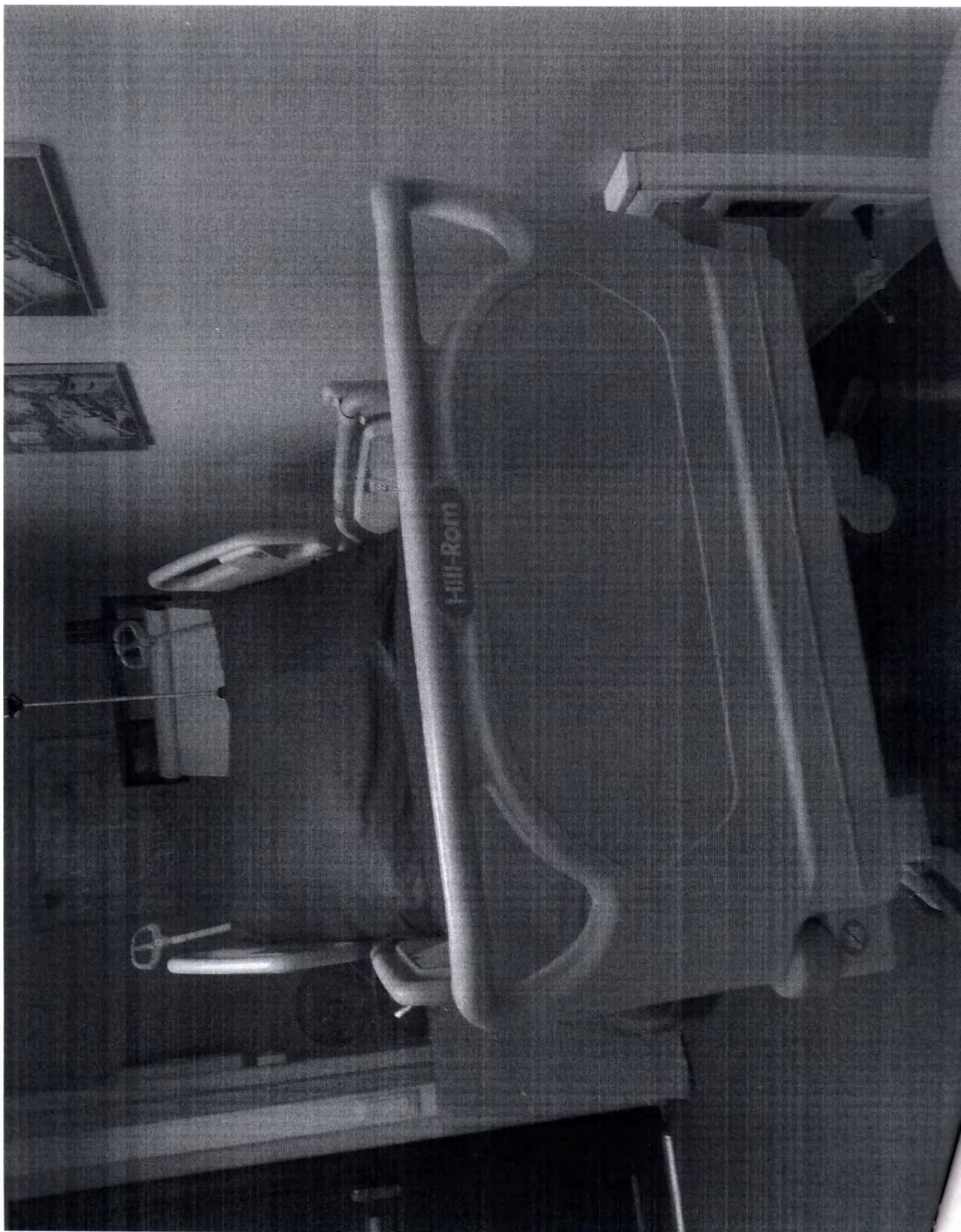

Национальнй центр



Муниципальное учреждение
охраны здоровья населения
г. Ижевск

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


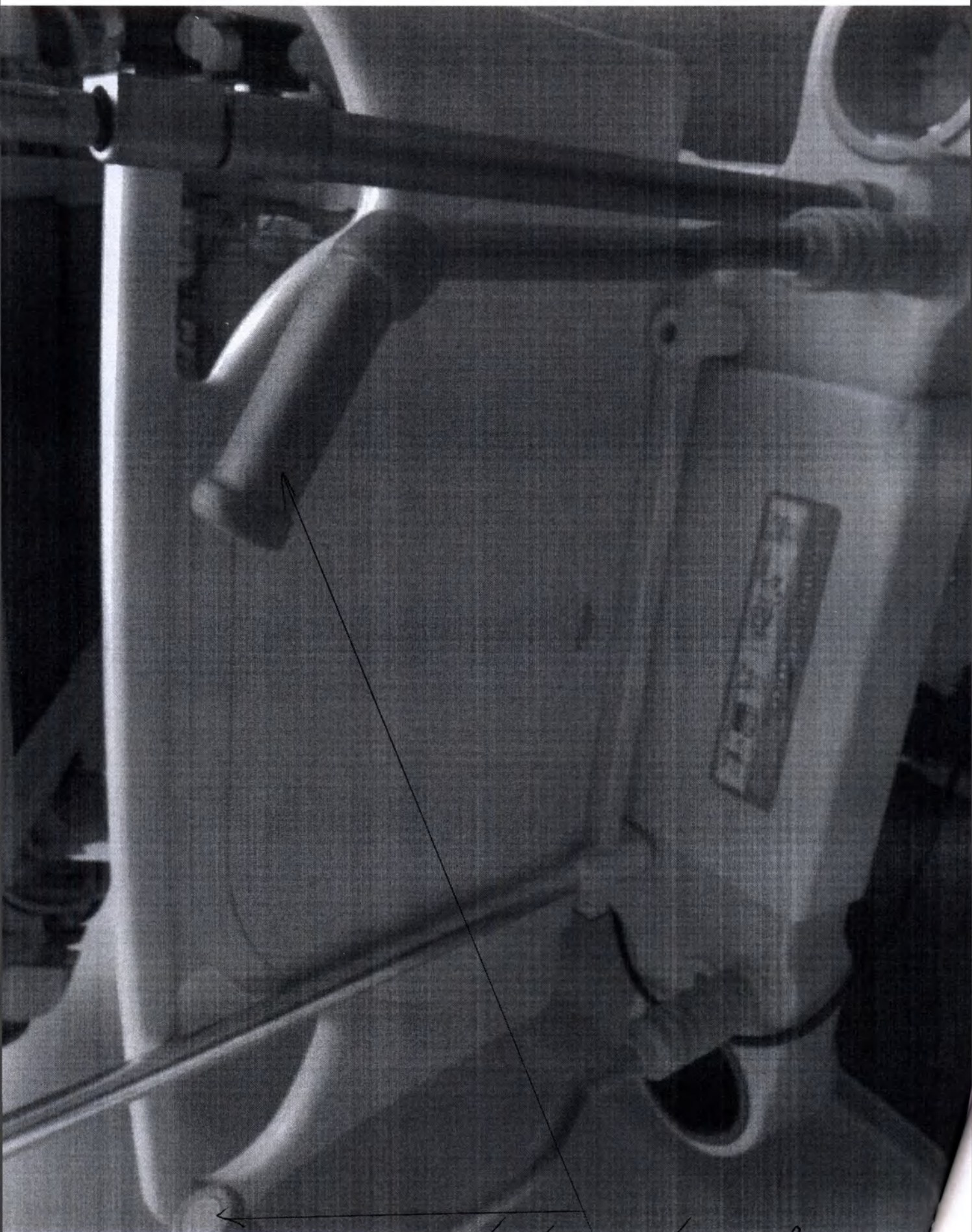


Рис. 8. Трансформатор




Исправить повреждение и обеспечить работу

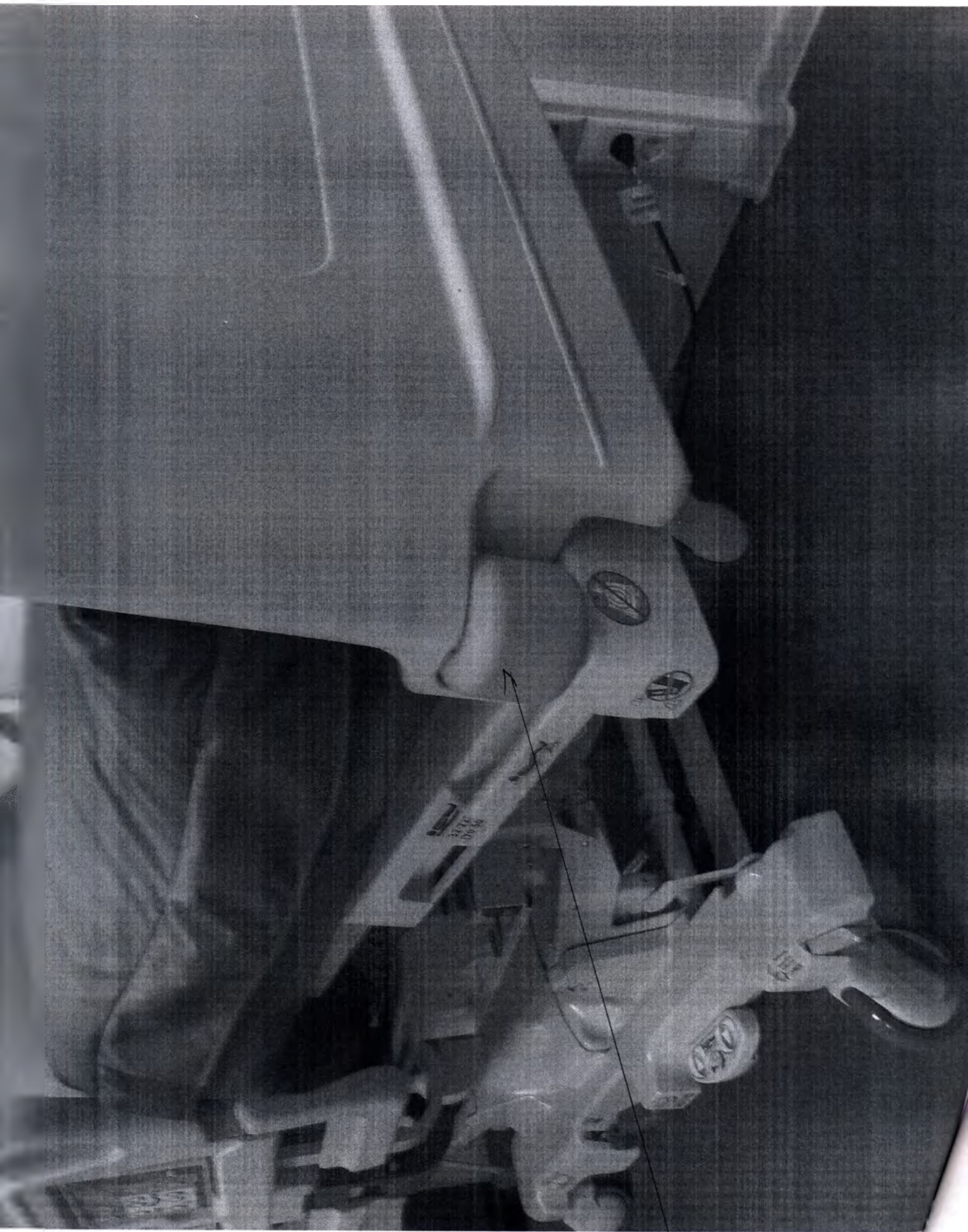

CPR



Ваша информация не является
конфиденциальной и может
быть использована для
ознакомления с новостями

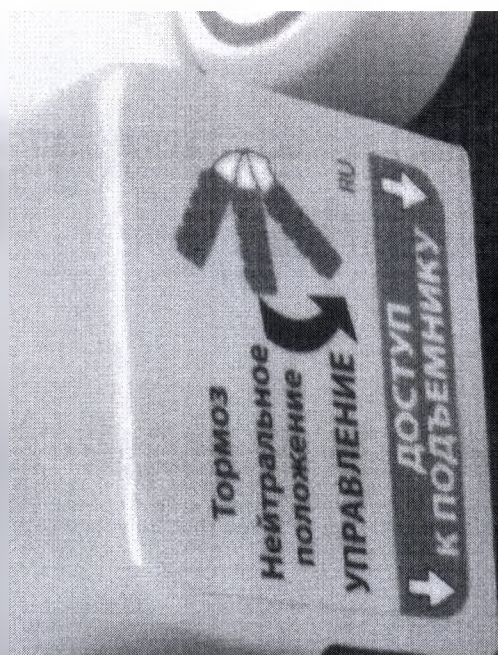


Repair information in Russian Point-of-Care

PATENTED: www.hill-rom.com
May be covered by one or more patents.
See patent file.

PRODUCT COMPLIES TO ALL
APPLICABLE STANDARDS
21 CFR 1022
MANUFACTURED
Made in U.S.A.




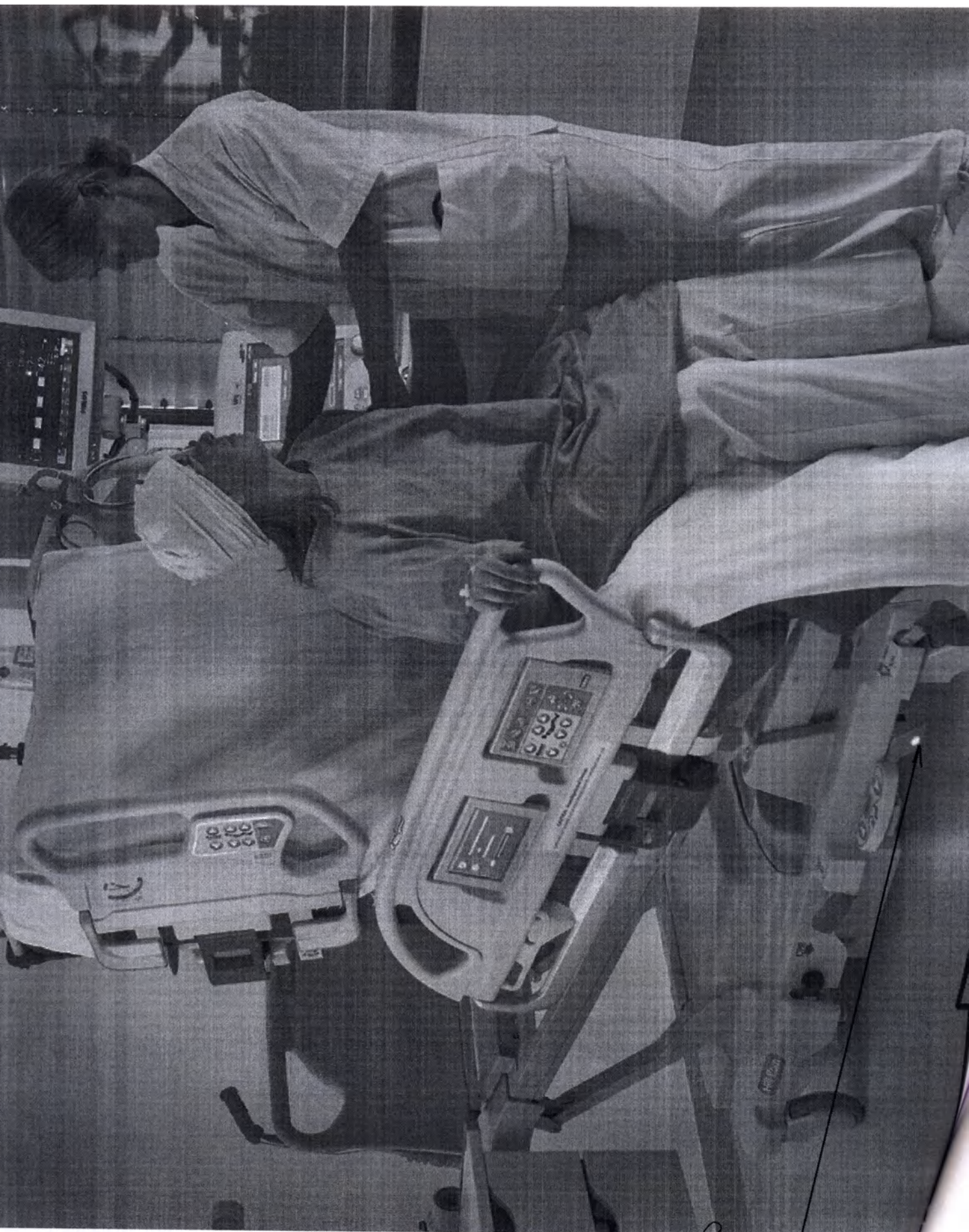


Нормалe нoгe бeткe




Искать информацию по номерам.

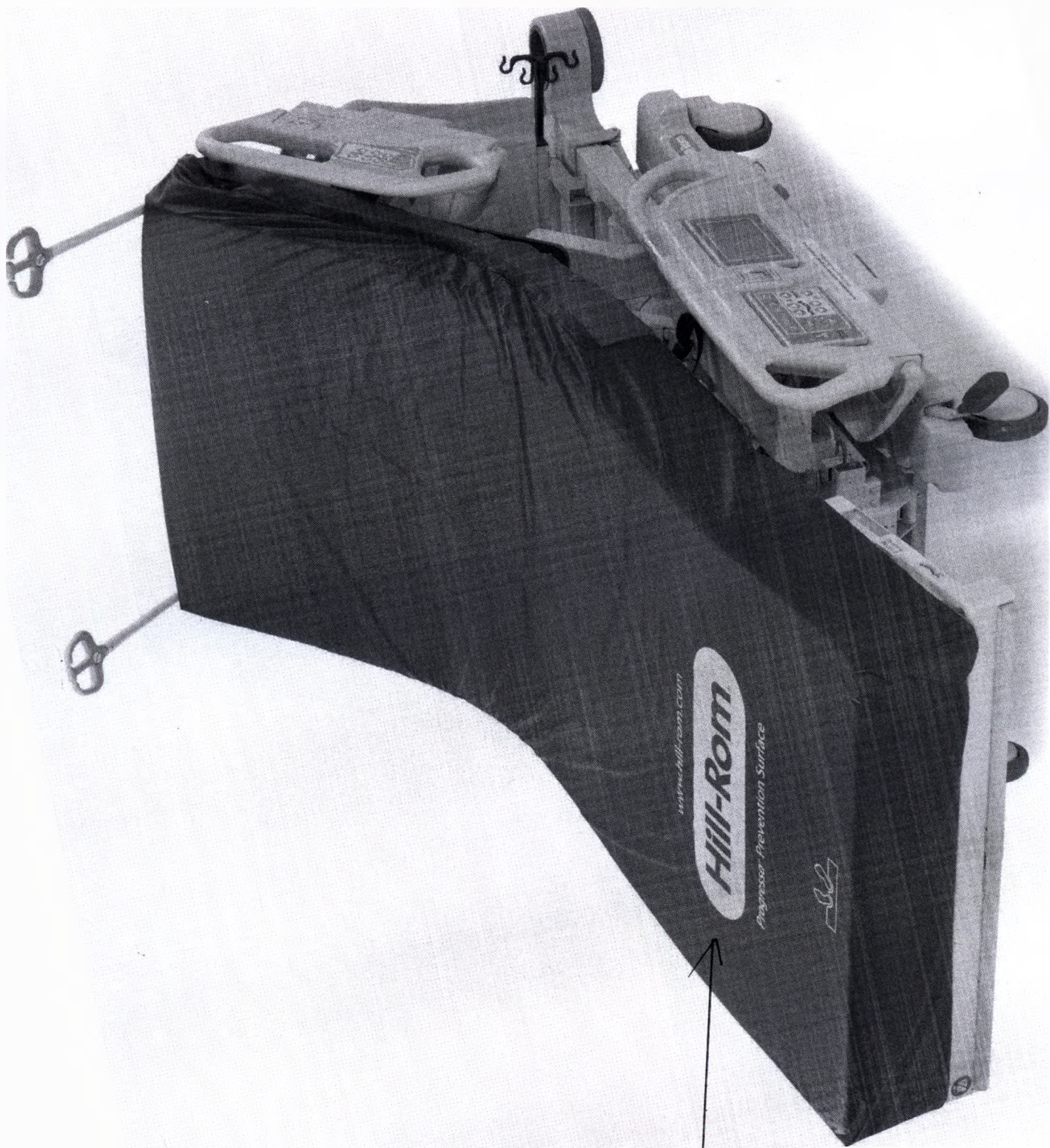


популярная модель прогрессивная

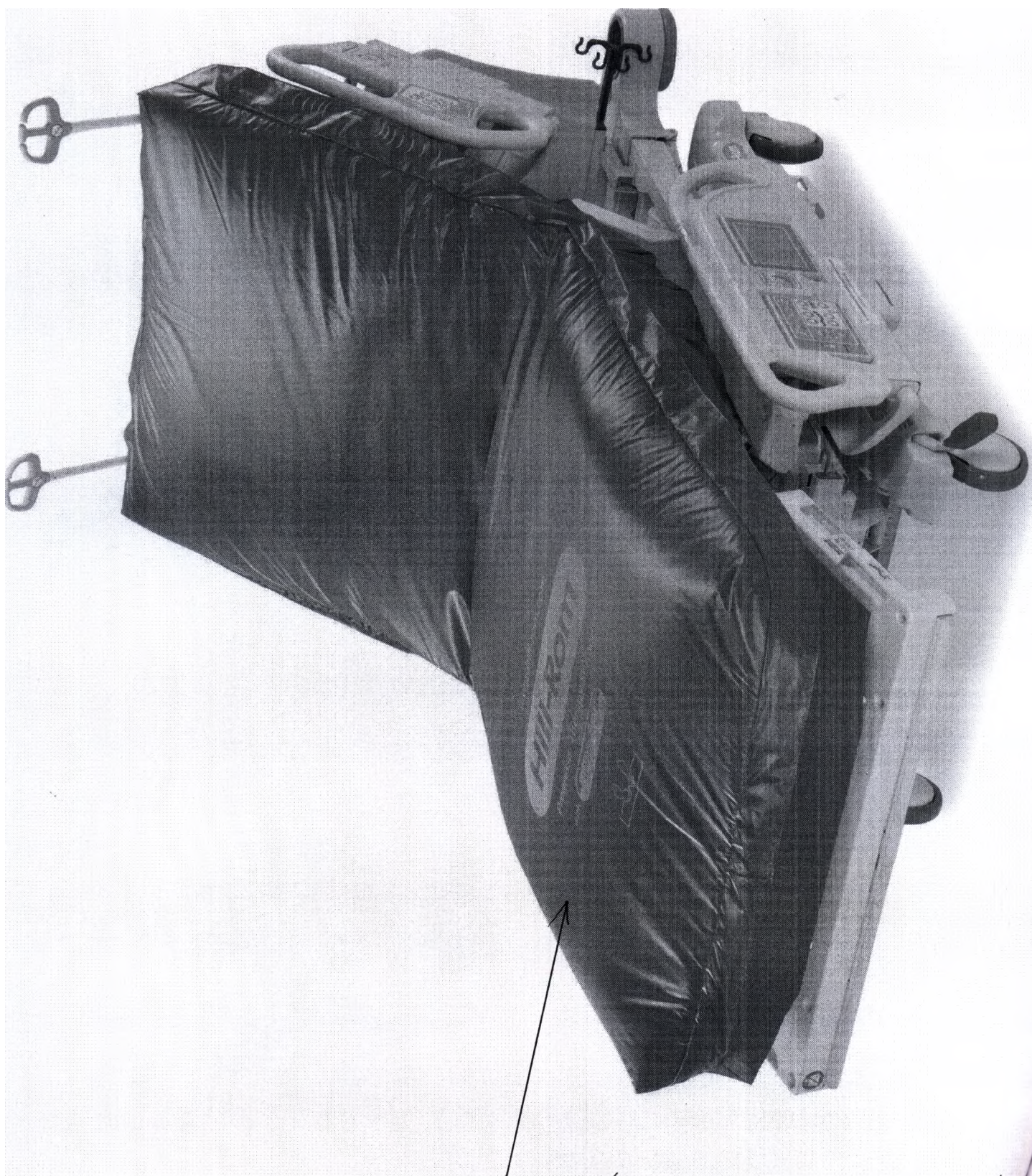

Исправительная деятельность

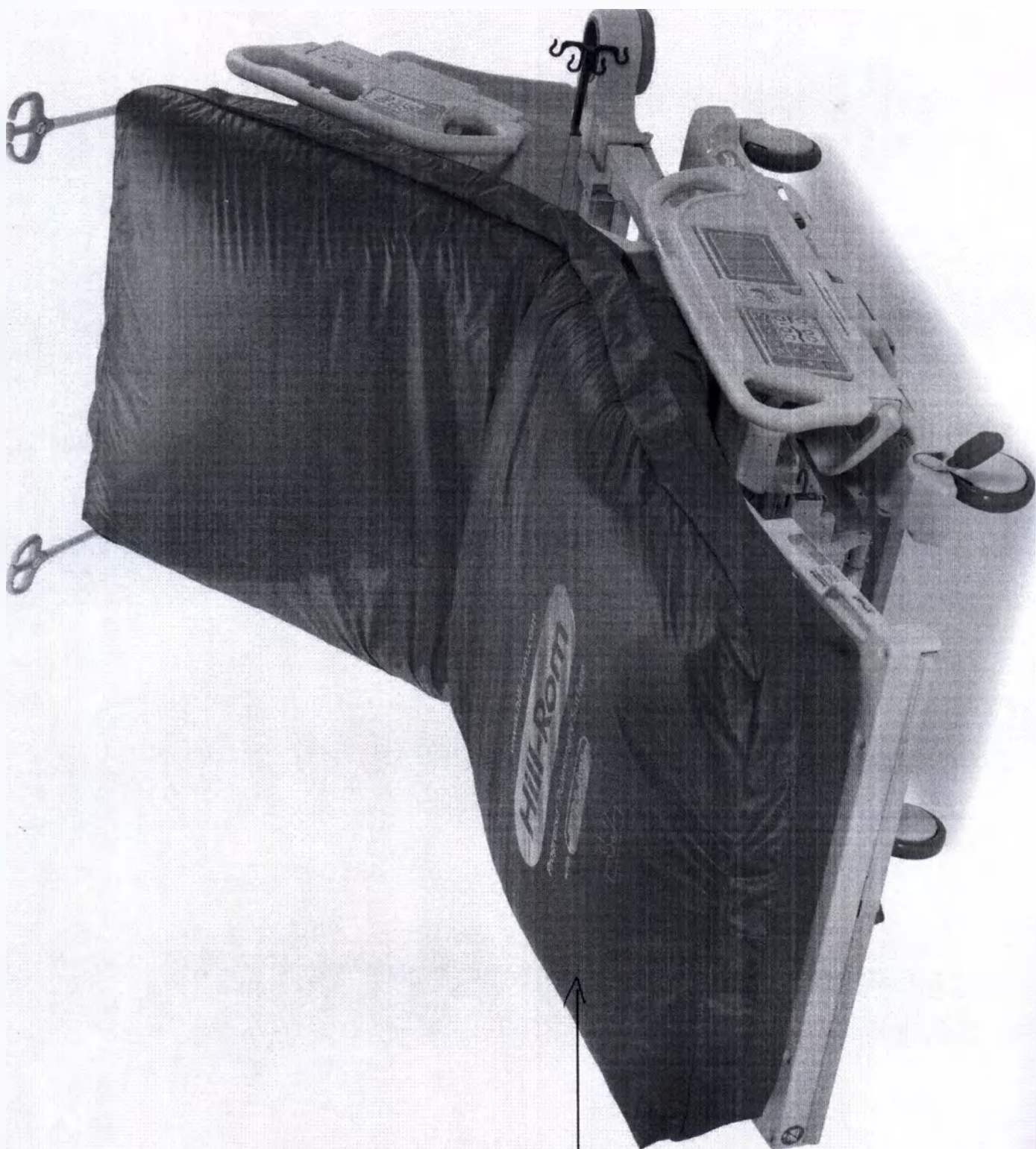


Нобельская Прогресса для профилактики
вертебральных заболеваний.

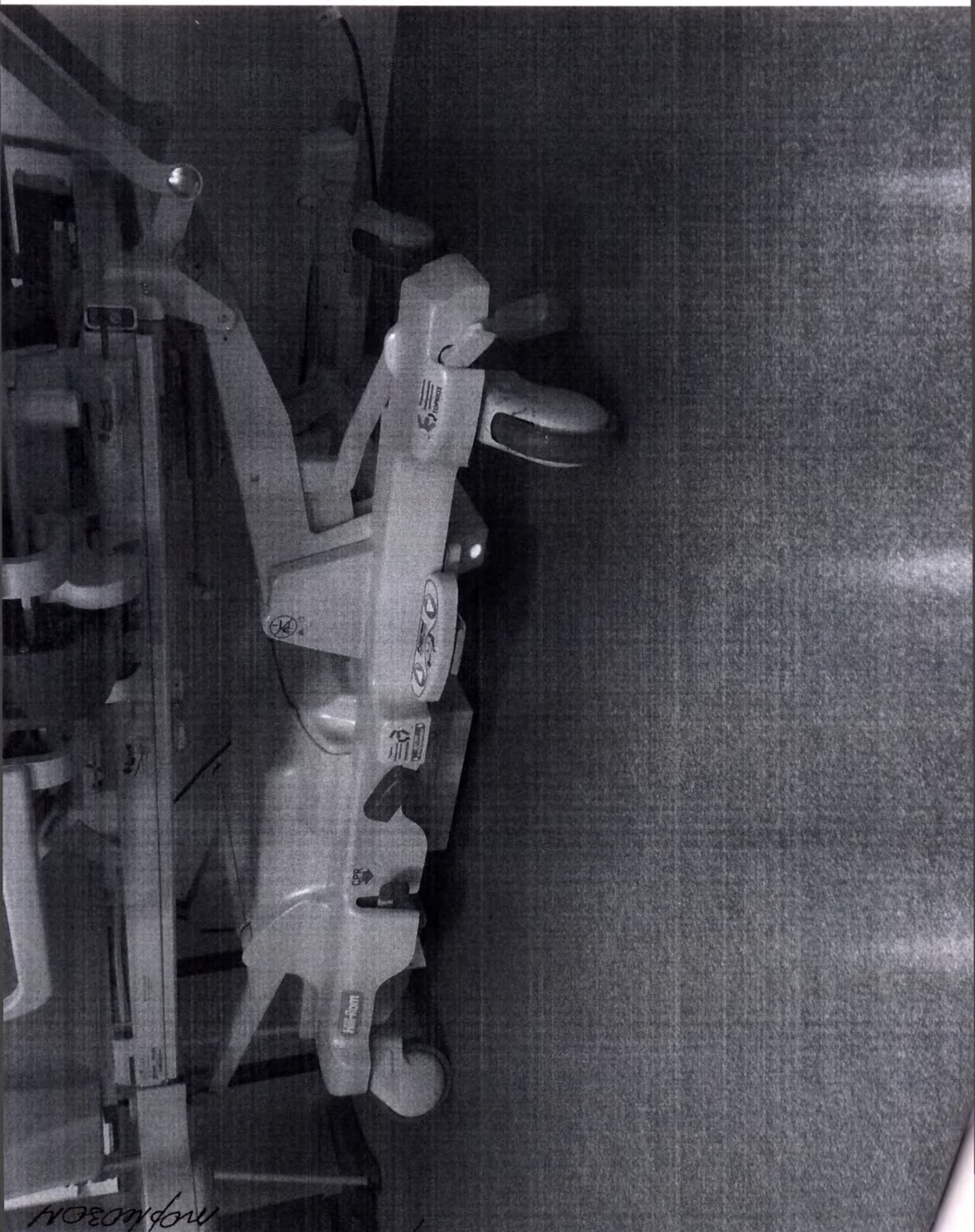


Внеочередная система на полках с ценностью
модель

7. Исходные данные

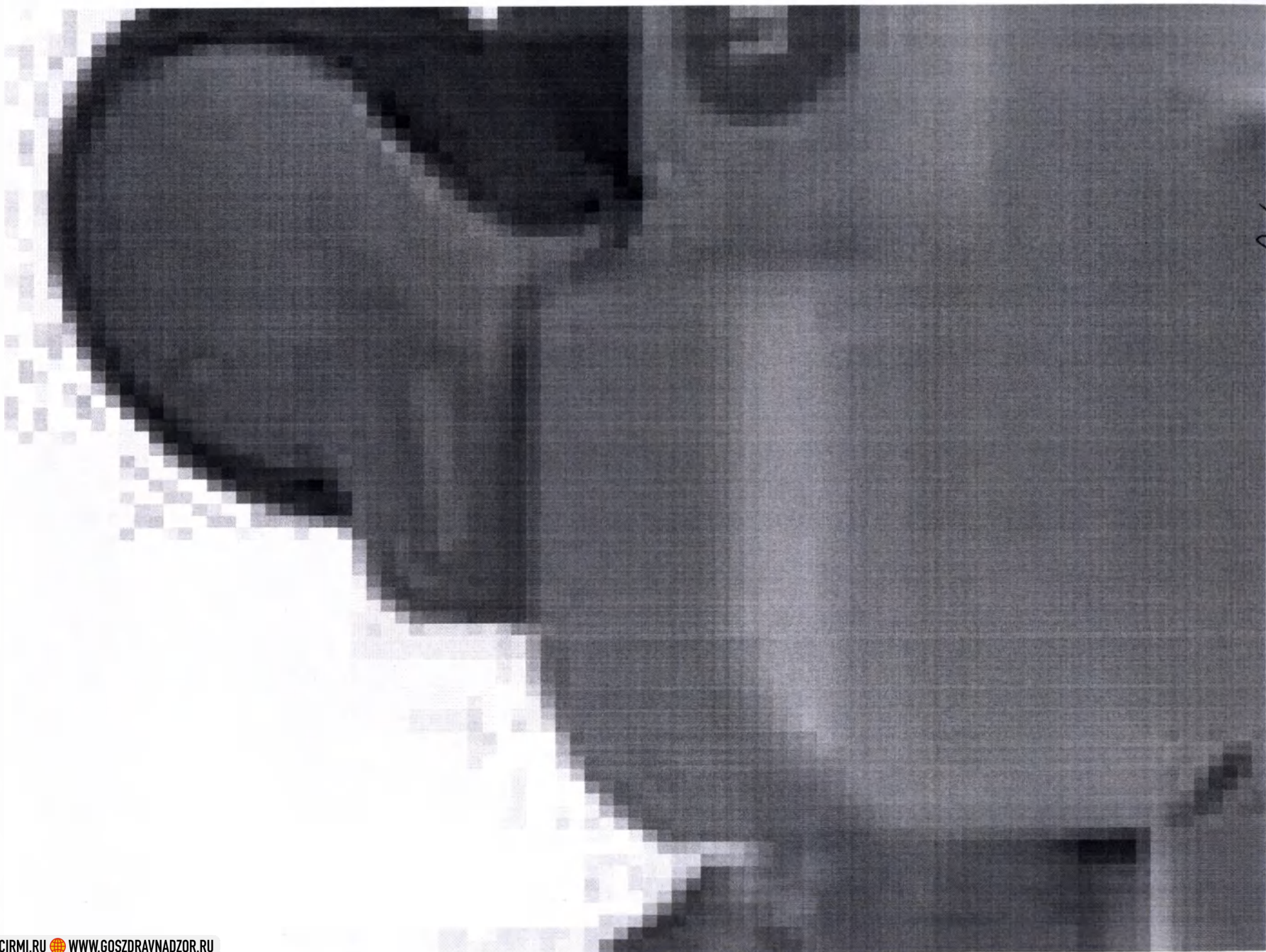

Пятое рулевое колесо (схема)

Порядок включения:

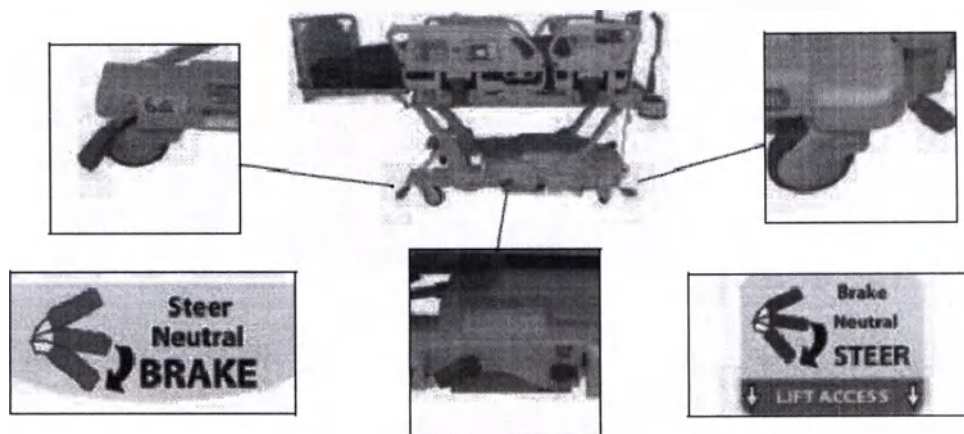

Тормоза — нажмите оранжевую педаль тормоза.

Попробуйте толкнуть кровать вперед и назад, чтобы убедиться, что тормоз полностью задействован.

Нейтральное положение — переместите педаль тормоза и управления в горизонтальное положение.


Теперь кровать можно перемещать в любом направлении.

Управление — нажмите зеленую педаль управления.


Левый ролик в ножной секции блокируется в одном направлении.

Управление угловым движением. Левый ролик в ножной секции блокируется в одном направлении. Кровать готова к перемещению.

Пятое колесо. Когда педаль тормоза и управления находится в положении управления, передние ролики не блокируются. Все четыре ролика на кровати занимают нейтральное положение. При этом кровать можно поворачивать на пятом колесе. Использование пятого колеса позволяет выполнять более крутые повороты и облегчает управление


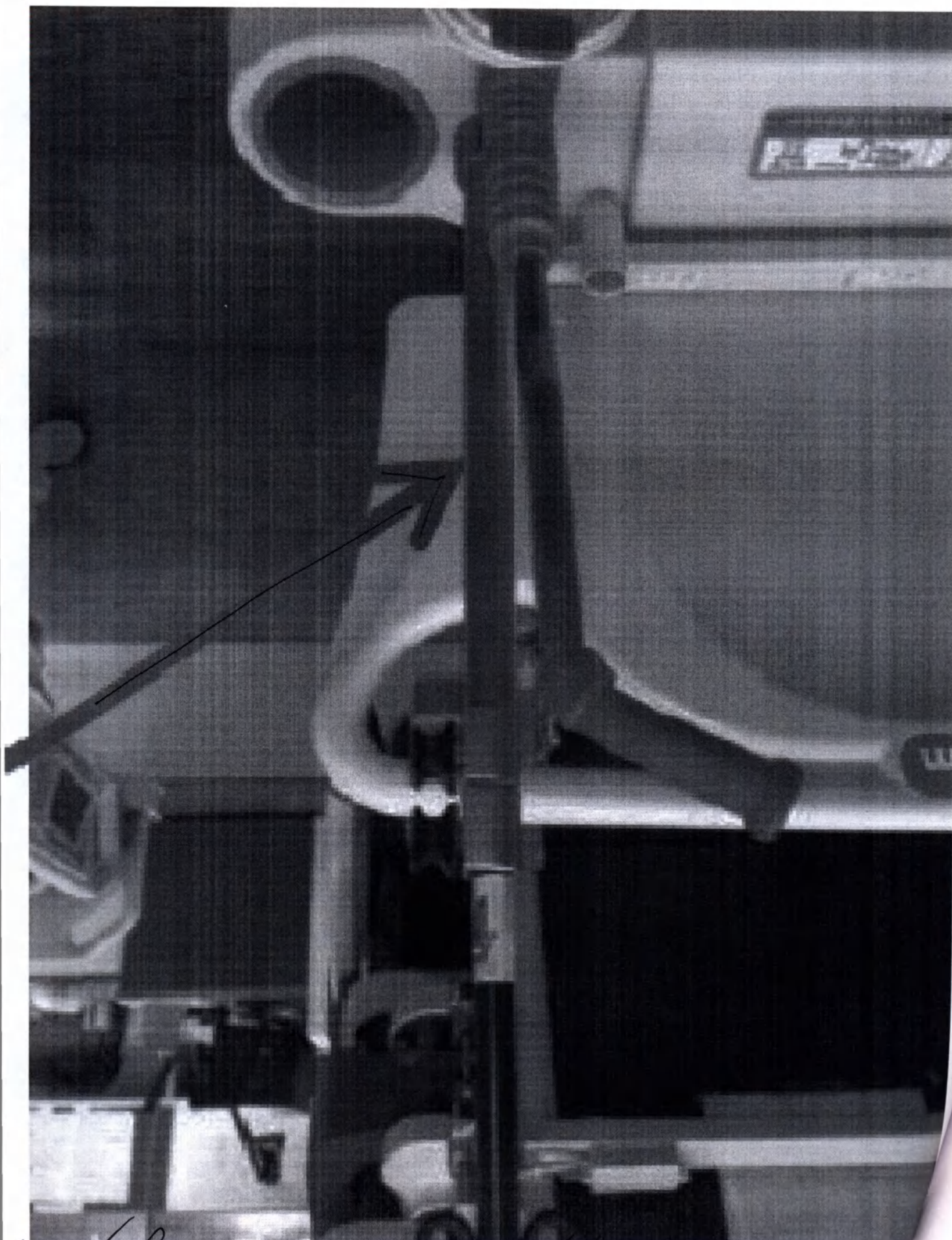


Надлежащее техническое обслуживание

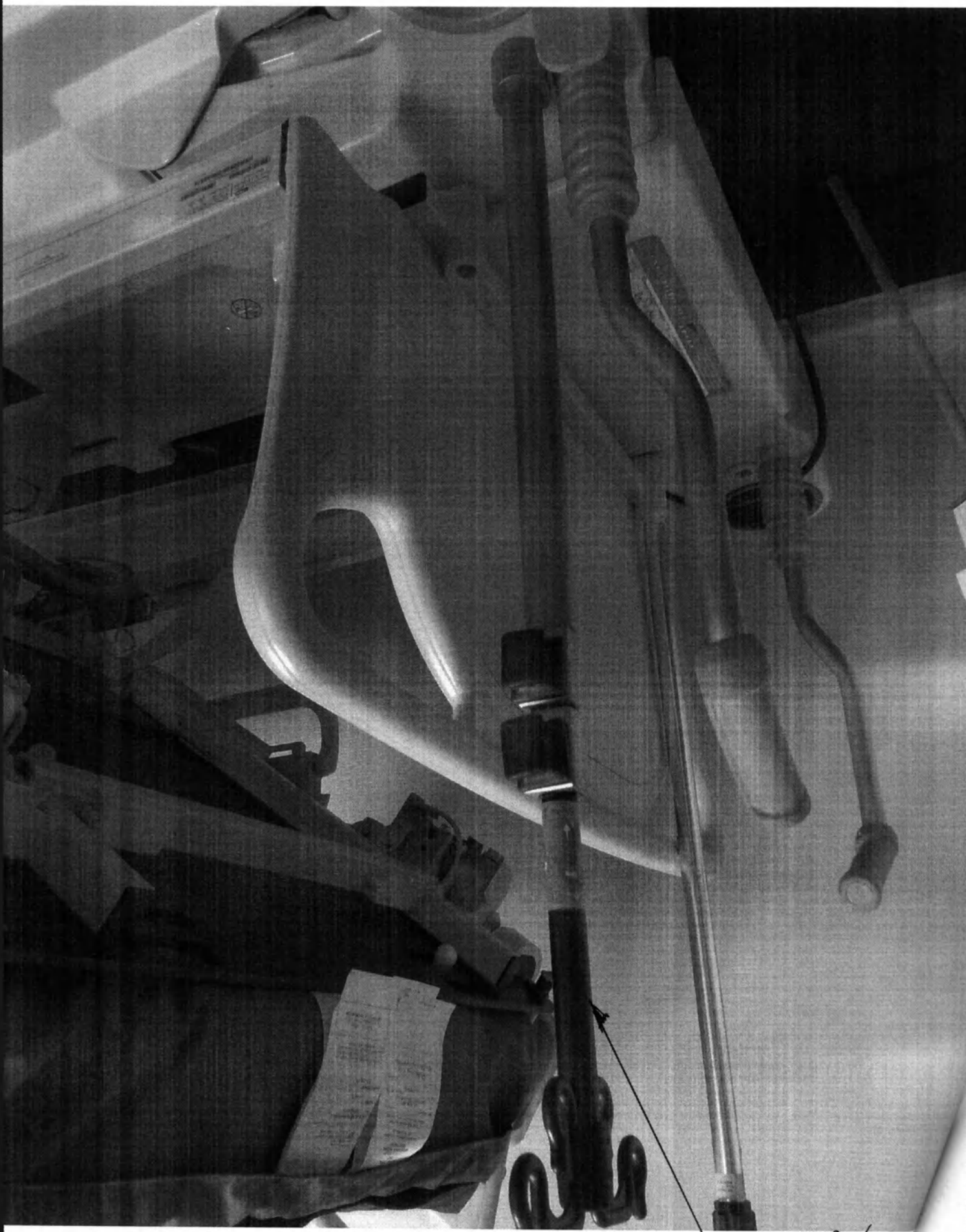

Исследования смонтированы в виде

Сенна 9 црзуннаа сматра

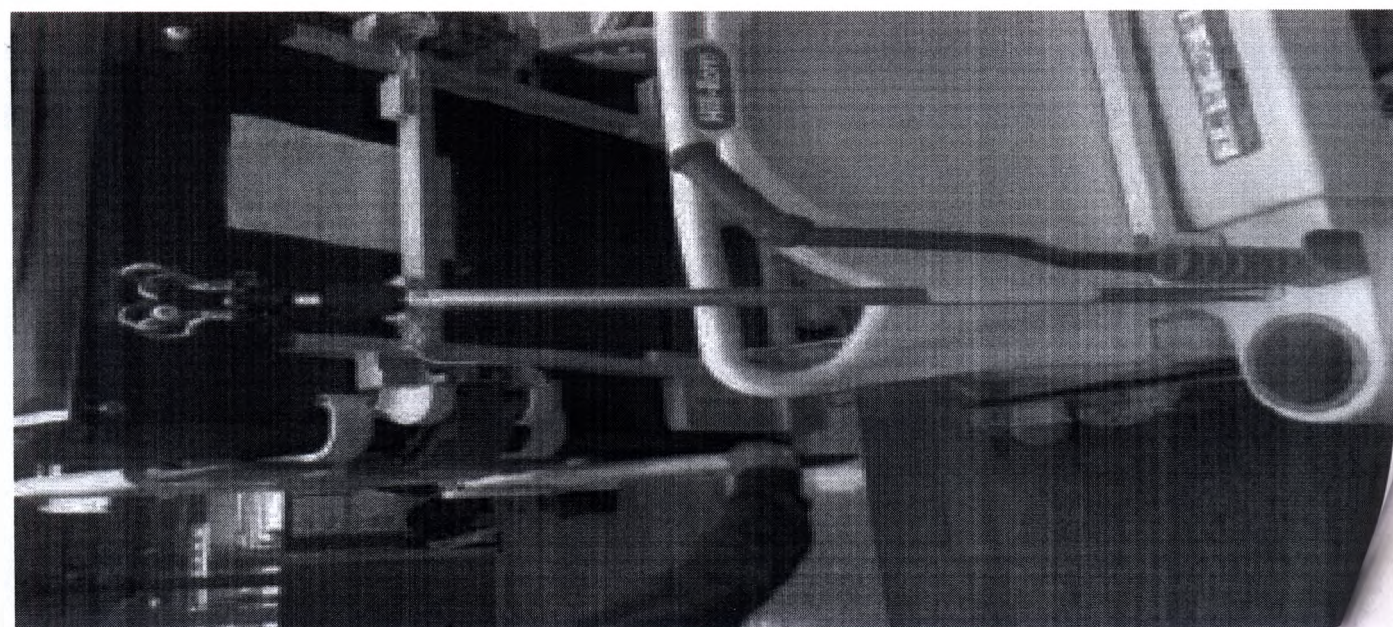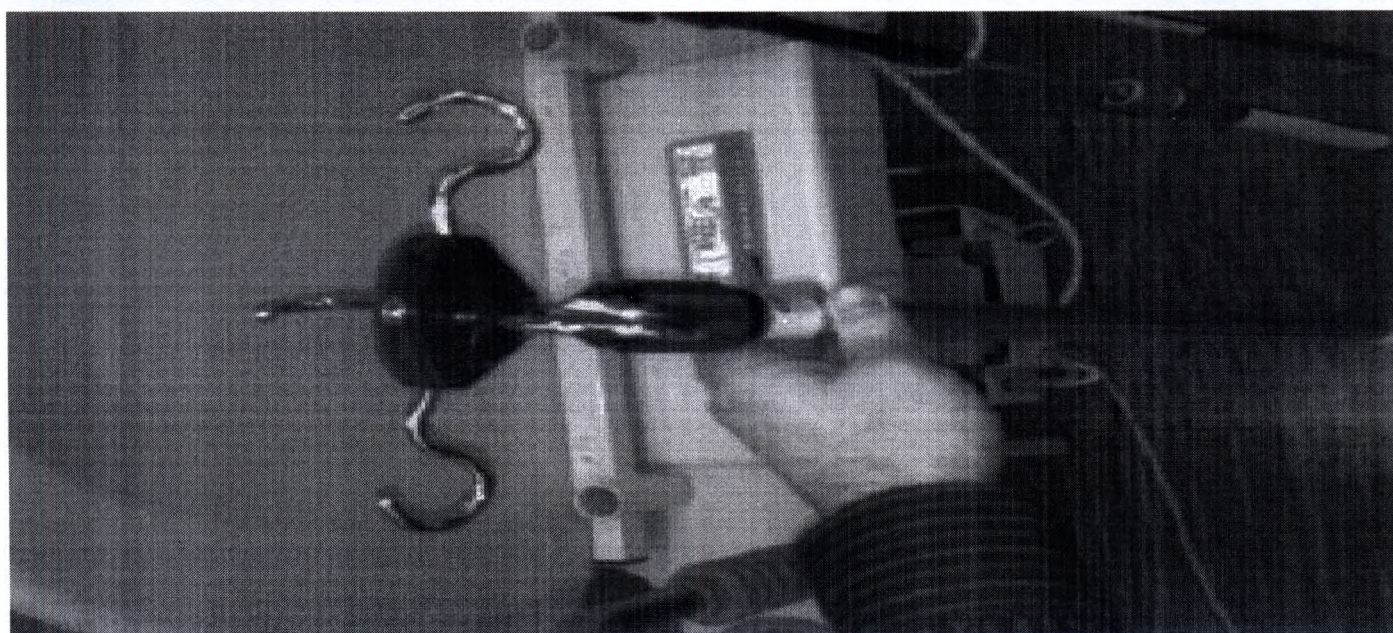


Вспомогательный дежурный миссиферный датчик





информация для населения о состоянии здоровья


ООО ЦРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

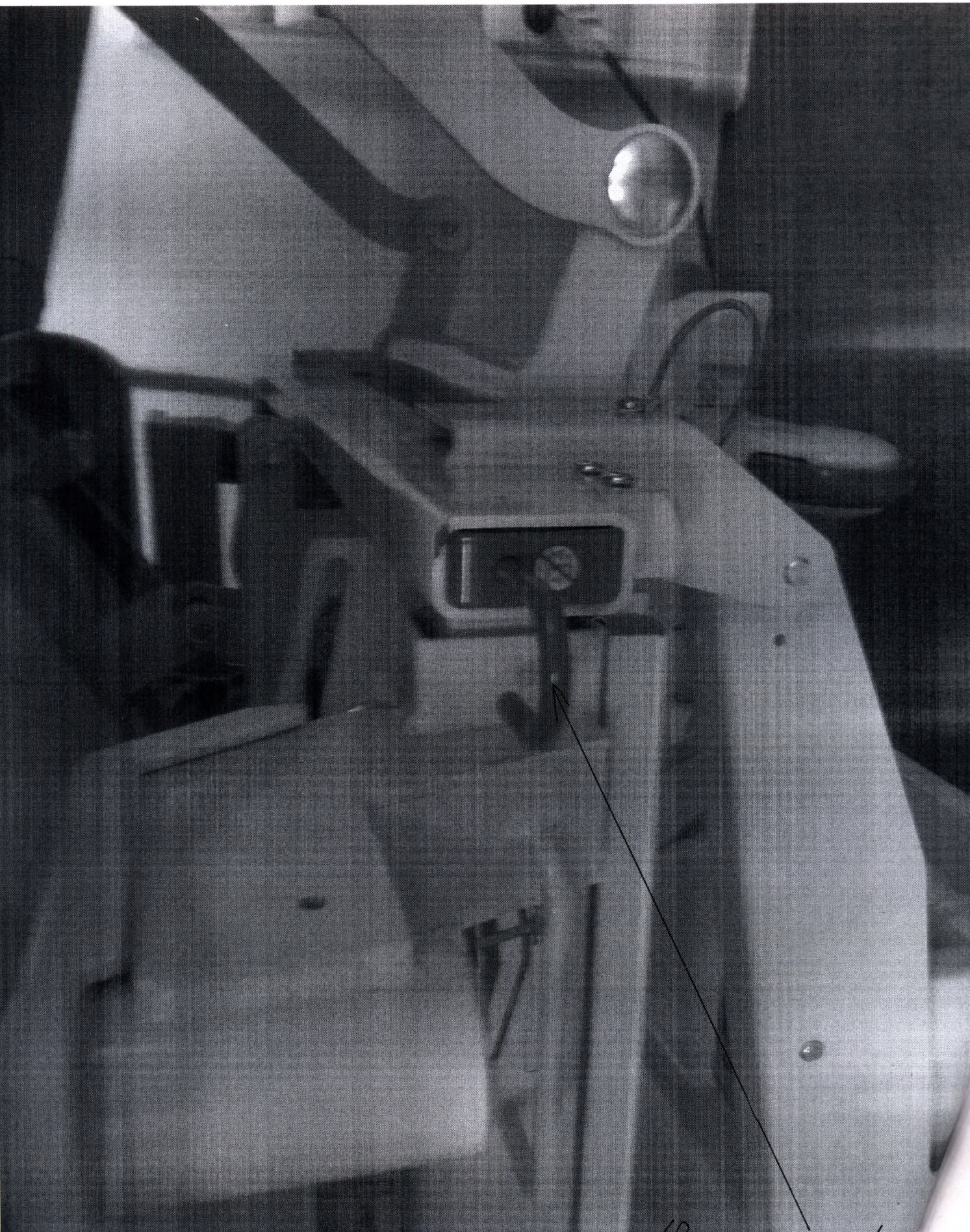

Репаратурные работы



департамент государственного управления

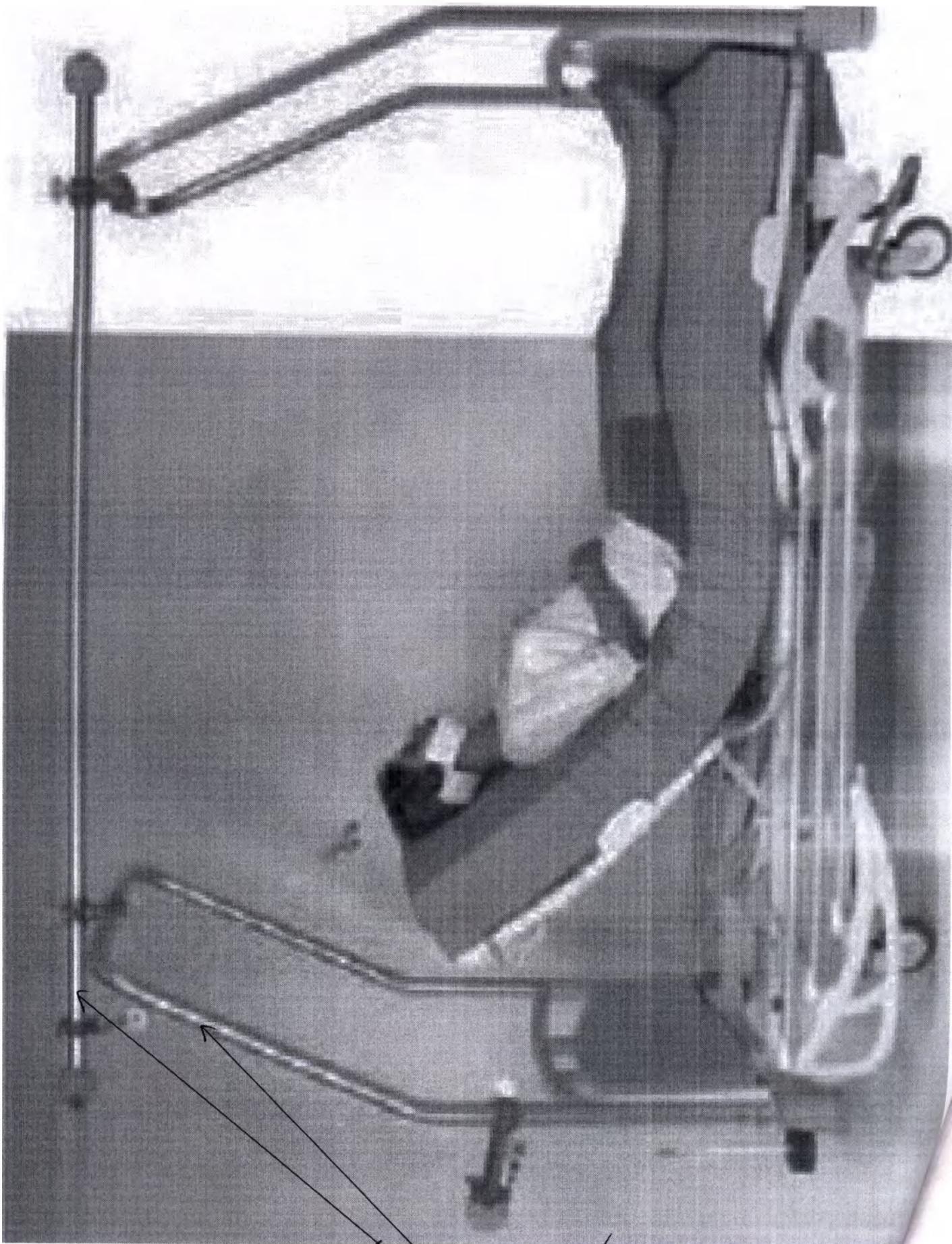



состояние.

Офисное оборудование и услуги

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и скреплено - 2
печатью ООО «Хилл-Ром

Генеральный директор
ООО «Хилл-Ром Рус»

Е. И.

