


Паспорт
Кресло гинекологическое – урологическое
«Клер» КГФВ
Руководство по эксплуатации
ТУ 9452-004-43656656-2008

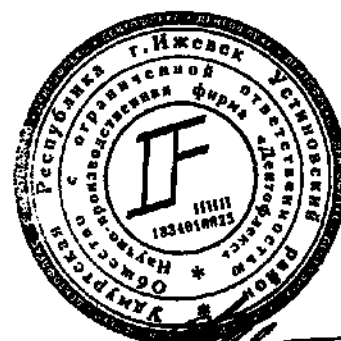

ПАСПОРТ.

1. Назначение.

Кресло гинекологическое – урологическое с фиксированной высотой «Клер» КГФВ предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и лечения в стационарных условиях. На кресле можно проводить процедуры в положении сидя и лежа.

2. Технические характеристики.


Высота от поверхности пола до верхней поверхности сиденья	900±5мм.
Ширина лежа	580 ± 5 мм.
Ширина кресла общая	800 ± 10 мм.
Длина кресла общая	1600 ± 10мм.
Угол наклона спинки относительно вертикали	От 45° до 90°
Угол подъема сиденья относительно горизонта	0° до 14°
Максимальная допустимая нагрузка	150 кг.
Масса кресла	50 кг.

3. Стандартный комплект поставки.

Кресло гинекологическое – урологическое «Клер» КГФВ	1 шт.
Подколенники – держатели ног (тип Гейсель)	2 шт.
Подлокотники – опоры рук	2 шт.
Выдвижной поддон	1 шт.
Подставка –ступенька для пациента	1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации	1 шт.

4. Полный комплект поставки.

Кресло гинекологическое – урологическое «Клер» КГФВ	1 шт.
Подколенники – держатели ног (тип Гейсель)	2 шт.
Подлокотники – опоры рук	2 шт.
Выдвижной поддон	1 шт.
Подставка –ступенька для пациента	1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации	1 шт.
Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении	1 шт.
Подставка- ступенька пациента	1 шт.
Крепление кольпоскопа	1 шт.
Держатель бумажных полотенец	1 шт.
Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями	
Инфузионная стойка	
Подставка под ноги доктора	
Емкость для сбора смывных жидкостей и отходов	
Стул врача	
Светильник гинекологический	

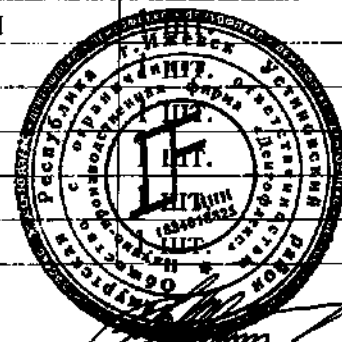

Столик манипуляционный	1 шт.
Столик инструментальный	1 шт.

5. Монтаж кресла.

Кресло предназначено для работы в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от +10° С до + 40 °С.

а) установить кресло на ровную поверхность и при необходимости отрегулировать ножки.

б) распаковать подколеники-держатели ног и установить их в кронштейны – зафиксировать винтовыми зажимами.

в) Распаковать спинку кресла и соединить её с основанием осью шарнира, установив предварительно канролоновые втулки. Ось зафиксировать винтами. Опора спинки вставляется в паз кронштейна, закрепленного на раме, и верхним кронштейном присоединяется к спинке с помощью колпачковых гаек.

6. Эксплуатация и обслуживание.


Чистку и дезинфекцию производить салфеткой из бязи или марли смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. По окончании дезинфекции кресло протереть сухой, мягкой тканью. При дезинфекции не применять едкие средства и отбеливатели.

7. Свидетельство о приемке.

Кресло гинекологическое-урологическое «КЛЕР» КГФВ соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-43656656-2008 и признано годным для эксплуатации.

Номер и дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

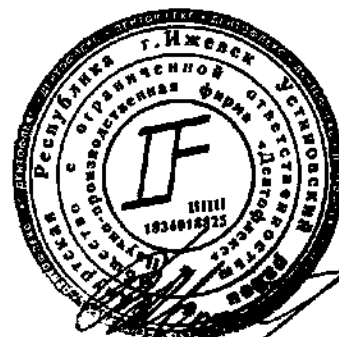

8. Гарантии изготовителя (поставщика).

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу кресла гинекологического-урологического «КЛЕР» КГФВ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации кресла – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует кресло по предъявлении гарантийного талона.

По вопросам поставки и гарантийного ремонта обращаться по адресу:
426006, г. Ижевск, ул. Повоажимова, 13
Тел./факс (3412)60-06-39; 64-71-88

9. Сведения о рекламациях.


В случае отказа кресла или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец кресла должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание,
- номер телефона,

10. Сведения о консервации и упаковке

Кресло гинекологическое-урологическое «КЛЕР» КГФВ упаковано в соответствии с разделом 1.6 ТУ 9452-003-436656656.-2008

Дата упаковки _____

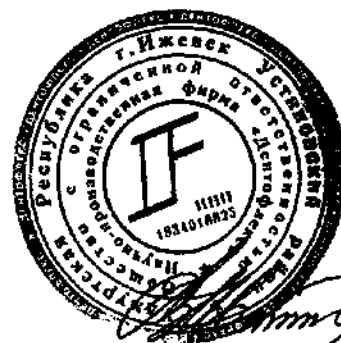

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Кресло гинекологическое-

Урологическое «КЛЕР» КГФВ

Номер и дата выпуска _____

(заполняется предприятием -изготовителем)

М.П.

Приобретено _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

М.П.

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия _____

