

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс»

Иглы инъекционные однократного применения Техническое описание и инструкция по применению НДАК.942243.003ТО

1. Техническое описание

1.1. Иглы инъекционные однократного применения предназначены для внутримышечного, подкожного и внутривенного введения в организм человека различных лекарственных препаратов. Иглы должны присоединяться к шприцу однократного применения, имеющему конус типа «Луер».

1.2. Стерильность иглы гарантируется заводом-изготовителем при сохранении герметичность потребительской упаковки.

2. Меры безопасности

2.1. Визуальным осмотром определить целостность потребительской тары. Иглу из поврежденной потребительской тары использовать запрещается.

2.2. Не допускается проводить инъекции одним и тем же шприцем нескольким больным, меняя только иглы.

3. Инструкция по применению

3.1. Оторвать одну потребительскую упаковку с иглой.

3.2. Продавить бумагу упаковки и, не касаясь пальцами иглы, раздвинуть упаковку так, как показано на рисунке коробки.

3.3. Плотнo, с усилием, надеть иглу на конус шприца и снять защитный колпачок и упаковку.

3.4. Подготовка шприца и пациента к инъекции осуществляется обычным методом.

4. Хранение

4.1. Хранить иглы в отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой воздуха от 5⁰ до 40⁰ С и относительной влажностью не более 80 % при 25⁰С.

4.2. Срок хранения не выше срока годности, указанного на упаковке.

копия
зам ген



В.М. Резубов
12.03.10