

ЭТИКЕТКА

**Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный
одноразового использования «Виталфарм»
по ТУ 9398-032-85535470-2015
Производства ЗАО «Виталфарм»**

**Жгут кровоостанавливающий,
матерчато-эластичный
одноразового использования «Виталфарм»**



Зарегистрировано под названием: Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм».

Не подлежит обязательной сертификации.

ТУ 9398-032-85535470-2015; РУ № РЗН 2016/3733 от 19.02.2016 г.

Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» предназначен для временной остановки кровотечения.

Характеристики:

- ✓ Длина, мм - $550 \pm 5,0$
- ✓ Ширина, мм - $20 \pm 3,0$
- ✓ Толщина, мм - $2,0 \pm 0,5$
- Масса в упаковке, не более, кг - $0,11 \pm 0,03$

Комплектность:

- Жгут кровоостанавливающий
- Этикетка
- Инструкция по применению
- Потребительская упаковка

Показания:

Использовать в стационарных, домашних и полевых условиях для временной остановки кровотечения.

Применение:

1. Прижать сосуд пальцами. 2. Наложить жгут кровоостанавливающий выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута. 3. Наложить на рану давящую повязку.

Противопоказания и возможные побочные действия:

Время наложения жгута не должно превышать 1-2 часа, в холодное время года не более получаса, во избежание некроза кожи. Не накладывать в области лучезапястного сустава и над лодыжками. Противопоказано применение жгута при острой хирургической инфекции конечности, особенно при подозрении на ее анаэробный характер. Не рекомендуется накладывать жгут при заболеваниях сосудов, например при тромбозах, выраженном атеросклерозе.

Хранение:

Хранение и транспортирование при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна и латекс.

Утилизация:

Жгут, использованный при процедурах, загрязненный биологическими жидкостями, складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Потребительскую упаковку утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления: июль 2018 г.

Номер партии: 01.