



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный
одноразового использования «Виталфарм»
по ТУ 9398-032-85535470-2015»
производства ЗАО «Виталфарм»

ИМЮЕ.939.1095 И

Назначение медицинского изделия: Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» предназначен для временной остановки кровотечения.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: использовать в стационарных, домашних и полевых условиях для временной остановки кровотечения.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Применение:

1. Прижать сосуд пальцами.
2. Наложить кровоостанавливающий жгут выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута.
3. Наложить на рану давящую повязку.

Противопоказания и возможные побочные действия:

Время наложения жгута не должно превышать 1-2 часа, в холодное время года не более получаса, во избежание некроза кожи. Не накладывать в области лучезапястного сустава и над лодыжками. Противопоказано применение жгута при острой хирургической инфекции конечности, особенно при подозрении на ее анаэробный характер. Не рекомендуется накладывать жгут при заболеваниях сосудов, например, при тромбофлебите, выраженном атеросклерозе.

Комплектность:

- Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.;
- Этикетка – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.

Характеристики:

- Длина, мм – $550 \pm 5,0$
- Ширина, мм – $20 \pm 3,0$
- Толщина, мм – $2,0 \pm 0,5$
- Масса в индивидуальной упаковке, не более, кг. ($0,11 \pm 0,03$)

ИМЮЕ.939.1095 И

Размеры фиксирующей пряжки должны соответствовать:

- Длина, мм – $30 \pm 2,0$
- Ширина, мм – $30 \pm 2,0$
- Толщина, мм – $3,0 \pm 1,0$
- Высота фиксирующего шипа, мм не более 10

Жгут должен быть изготовлен из следующих материалов:

Наименование материала	Марка материала	Нормативно-техническая документация	Назначение
Лента из синтетических полиэфирных волокон с включением латексных нитей Лента эластичная продёржечная)	- Полиэфирное волокно (нить) 37,2 текс ПСН марки А неокрашенная - 71 % в составе ленты; - Латекс марки 36/40 – 29% в составе ленты	ГОСТ 24662-94 По ТУ производителя латексной нити	Матерчатая эластичная тесьма (лента)
Полипропилен	01250	ГОСТ 26996-86	Фиксирующая пряжка
Полиэтиленовая пленка (ПЭ)	Н	ГОСТ 10354	Потребительская упаковка
Полипропиленовая пленка (ПП)	01250	ГОСТ 26996	Потребительская упаковка

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Хранение и транспортирование при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и других веществ, разрушающих полиэфирные волокна и латекс.

Утилизация:

Жгут, использованный при процедурах, загрязненный биологическими жидкостями, складируют в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Потребительскую упаковку утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

ИМЮЕ.939.1095 И

Сведения о сертификации:

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок годности: 5 лет.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии: указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»,
Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское
поселение Синявино, ул. Садовая д.2.; т/ф: +7 (812) 335-05-85,
www.vitalfarm.ru

ИМЮЕ.939.1095 И

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

4 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

