

Инструкция по эксплуатации вакуум-аспиратора F 60 (Fazzini)

<u>ПРИМЕНЕНИЕ.</u>	2
<u>БЕЗОПАСНОСТЬ.</u>	2
<u>ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.</u>	2
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ.</u>	2
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР.	3
ПРОВЕРКА БАКТЕРИАЛЬНОГО ФИЛЬТРА.	3
РЕЖИМ ОТСАСЫВАНИЯ.	3
ЗАМЕНА БАНКИ.	3
<u>ОЧИСТКА.</u>	3
ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ШЛАНГОВ И БАНКИ.	3
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ.	4

Применение.

Прибор предназначен для аспирации, сбора секрета и промывочных жидкостей.

Прибор не следует применять для :

1. Дренажа с малым уровнем вакуума (торакальный дренаж).
2. Для не медицинских целей.
3. Для отсасывания отравляющих и взрывчатых веществ.

Функциональное описание.

F 60 - аспирационный прибор с питанием от сети, соответствующий нормам защиты от поражения током и безопасности пациента. Вакуумная помпа диафрагмального типа, расположенная внутри прибора создает вакуум внутри банки для сбора секрета. Глубина вакуума регулируется поворотным регулятором.

Секрет собирается в 4-х литровые емкости. Механический предохранитель предотвращает попадание секрета внутрь моторного блока прибора при переполнении банки.

Все части прибора, контактирующие с секретом (шланги, банки, крышки, бактериальные фильтры) подвергаются стерилизации путем автоклавирования при температуре 136° С.

Безопасность.

- Прибор должен устанавливаться в пределах прямой видимости оператора, на твердой ровной поверхности.
- Эксплуатация прибора должна проводиться в медицинских помещениях, вне зон с наличием взрывоопасных газов (зона М).
- Нельзя допускать попадания жидкостей внутрь прибора. При попадании следует обращаться в сертифицированный сервисный центр.
- Пересылка прибора только в коробке.

Первое включение.

1. Вставьте емкость для секрета в корпус вакуум-аспиратора. Крышка емкости должна быть плотно прикручена на горло емкости для создания вакуума.
2. Наденьте соединительный шланг на вертикальный разъем в корпусе вакуум-аспиратора. Фильтр соединяется с прибором коротким шлангом. Второй конец шланга соединяется с емкостью для секрета.
3. Наденьте отсасывающий шланг на вертикальный разъем крышки емкости для секрета.
4. Включите сетевой шнур в розетку.
5. Включите зеленую кнопку на корпусе прибора.

Эксплуатация.

Перед использованием прибора с новым пациентом убедитесь, что следующие части прибора простерилизованы:

- отсасывающий шланг
- банка для сбора секрета
- крышка банки
- бактериальный фильтр.

Перед каждым использованием проверяйте бактериальный фильтр и при необходимости заменяйте его.

Бактериальный фильтр.

Фильтр не должен контактировать с пациентом – он лишь предохраняет прибор от попадания микрочастиц, влаги и бактерий в моторный блок.

Фильтр обладает гидрофобными свойствами, т.е. при намокании перестает пропускать воздух. Размер пор – 0,45 мкм. Многократное использование зависит от состояния фильтра – при малом загрязнении и просушивании он восстанавливает свои свойства.

Проверка бактериального фильтра.

1. Включите прибор.
2. Установите регулятор вакуума на максимум.
3. Если при открытом отсасывающем шланге вакуумметр показывает –0,3 бар, замените фильтр.

Режим отсасывания.

1. Перекройте отсасывающий шланг и установите уровень вакуума.
2. Подсоедините катетер или насадку для отсасывания.

Во время работы внимательно следите за уровнем секрета в банке – для предотвращения попадания жидкости в моторный блок не следует допускать наполнения банки более чем на 2/3.

Замена банки.

1. Прекратите аспирацию и выключите прибор.
2. Снимите отсасывающий шланг с крышки.
3. Снимите крышку с банки.
4. Установите пустую банку в держатель прибора.
5. Наденьте крышку и шланг обратно.

Очистка.

Очистка и стерилизация шлангов и банки.

При использовании прибора с новым пациентом необходимо провести стерилизацию следующих частей прибора:

- отсасывающий шланг
- банка для сбора секрета
- крышка банки
- бактериальный фильтр.


Порядок операций.

1. Отсоедините все шланги.
2. Отсоедините клапан от банки и промойте его в проточной воде.
3. Все остальные части, за исключением бактериального фильтра, должны быть промыты в проточной воде.
4. Соедините клапан с банкой.
5. Проведите стерилизацию всех перечисленных частей прибора (автоклавирование при 136°C)
6. После стерилизации соберите прибор.
7. Для продления срока службы резиновых частей прибора рекомендуется время от времени смазывать их вазелином или силиконом.


Очистка поверхности.


- Всегда отключайте прибор от сети перед протиркой поверхности.
- Протирайте поверхность прибора мягкой тряпкой, смоченной в растворе дезинфектанта. Не допускайте попадания жидкости в прибор.
- Включайте прибор только после высыхания дезинфектанта.

Схема строения прибора.

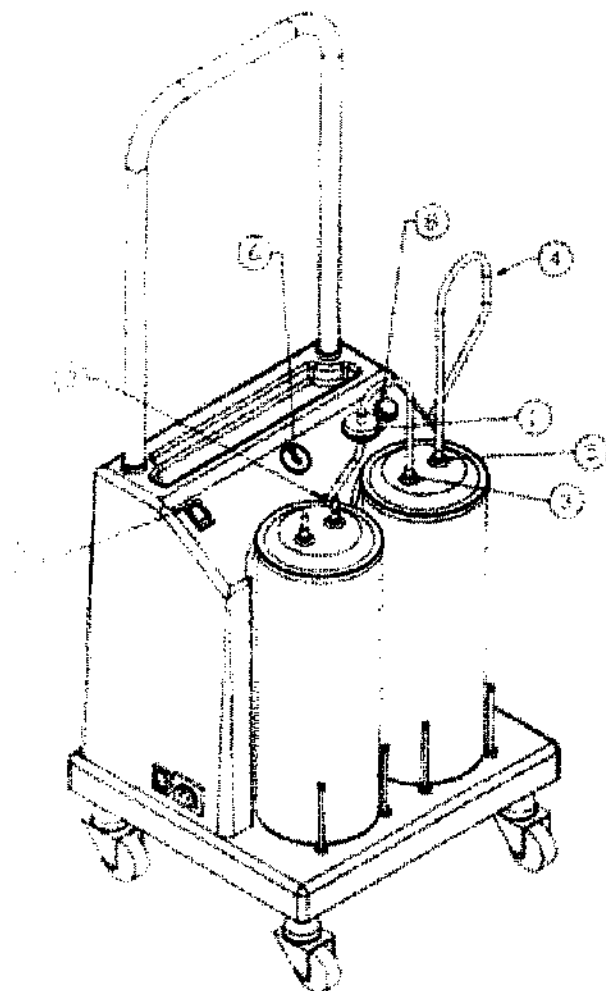

1. бактериальный фильтр.
2. вертикальный разъем в корпусе вакуум-аспиратора.
3. вертикальный разъем в емкости для секрета.
4. отсасывающий шланг.
5. вертикальный разъем для крепления отсасывающего шланга.
6. манометр.
7. сетевой выключатель.
8. ручка регулятора вакуума.

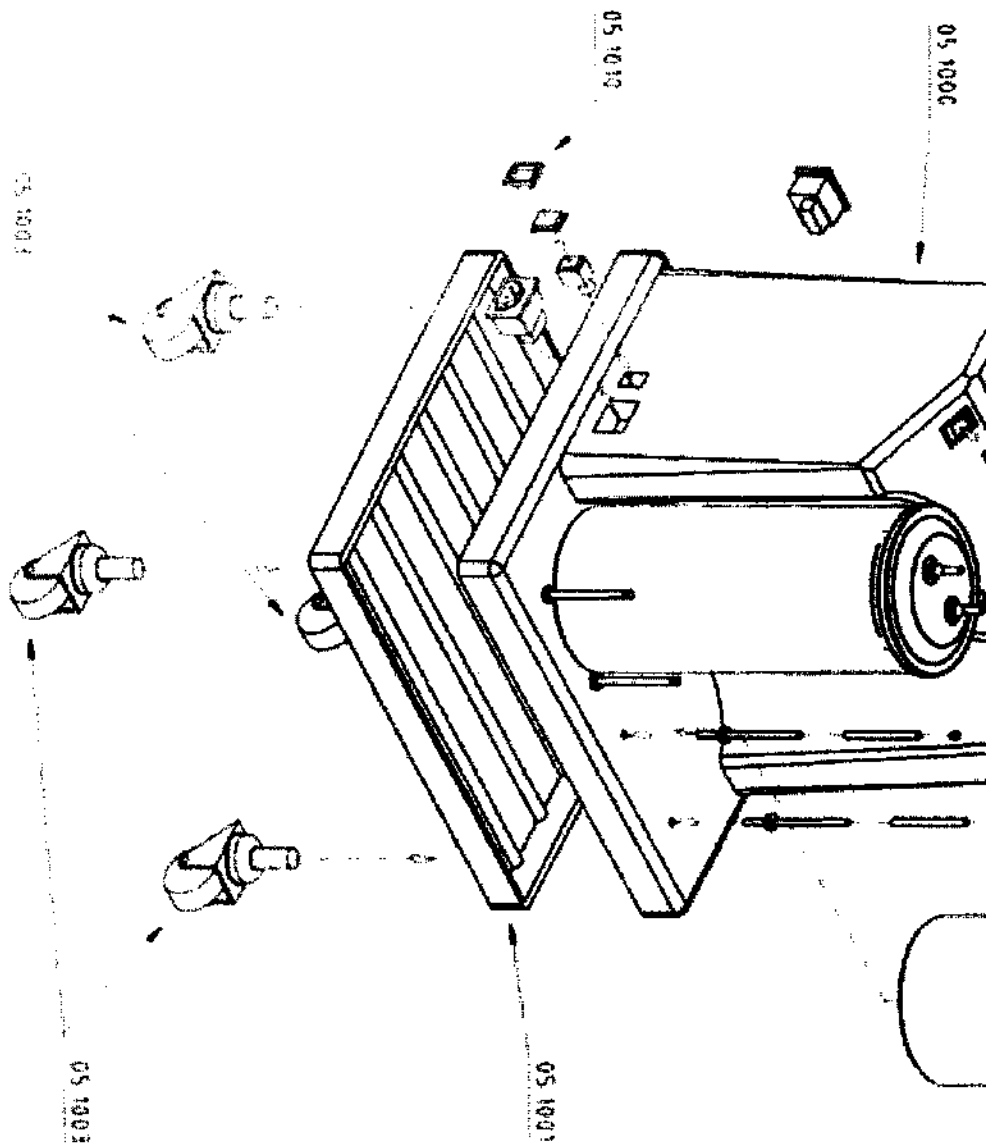

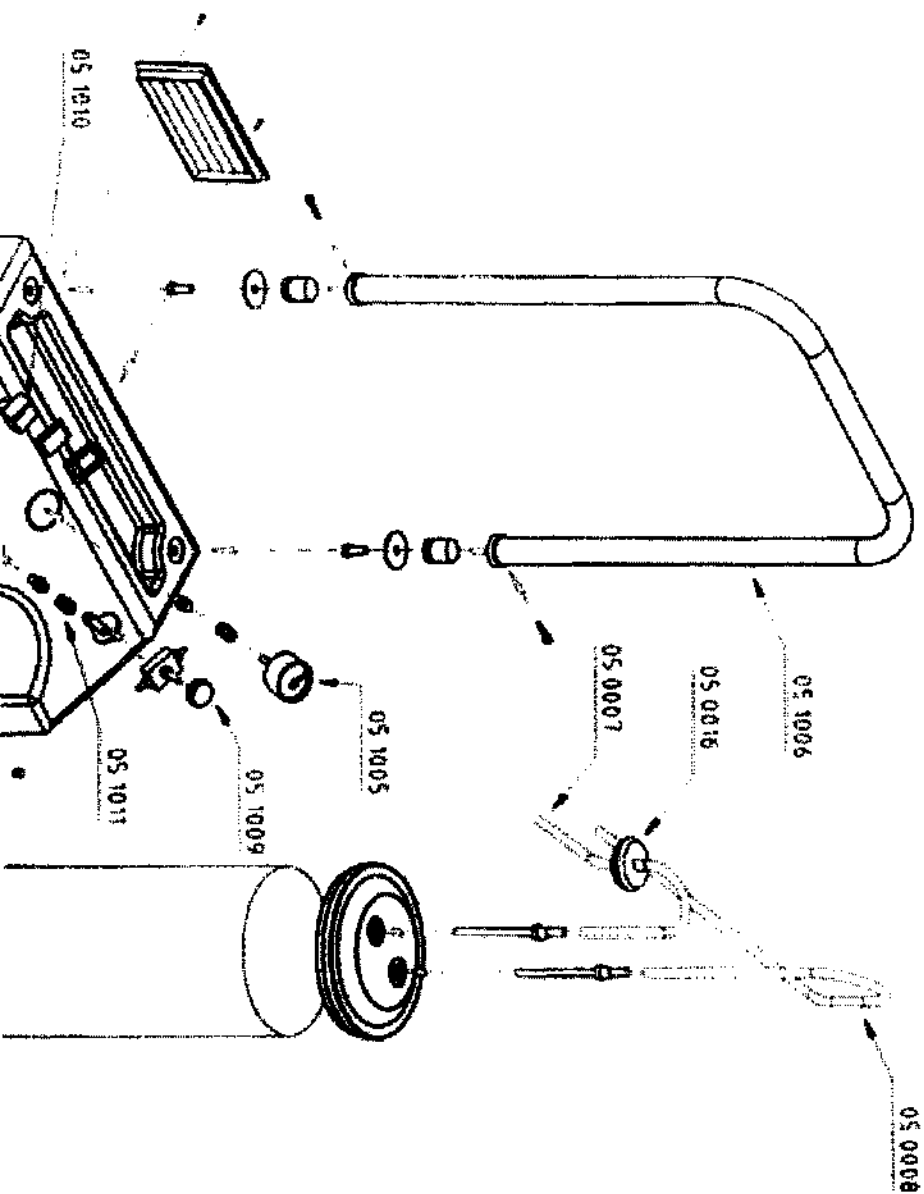

Инструкция по эксплуатации вакуум-аспиратора F 40 (Fazzini)

<u>ПРИМЕНЕНИЕ.</u>	2
<u>БЕЗОПАСНОСТЬ.</u>	2
<u>ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.</u>	2
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ.</u>	2
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР.	3
ПРОВЕРКА БАКТЕРИАЛЬНОГО ФИЛЬТРА.	3
РЕЖИМ ОТСАСЫВАНИЯ.	3
ЗАМЕНА БАНКИ.	3
<u>ОЧИСТКА.</u>	3
ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ШЛАНГОВ И БАНКИ.	3
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ.	4

Применение.

Прибор предназначен для аспирации, сбора секрета и промывочных жидкостей.

Прибор не следует применять для :

1. Дренажа с малым уровнем вакуума (торакальный дренаж).
2. Для не медицинских целей.
3. Для отсасывания отравляющих и взрывчатых веществ.

Функциональное описание.

F 40 - аспирационный прибор с питанием от сети, соответствующий нормам защиты от поражения током и безопасности пациента. Вакуумная помпа диафрагмального типа, расположенная внутри прибора создает вакуум внутри банки для сбора секрета. Глубина вакуума регулируется поворотным регулятором.

Секрет собирается в 2-х литровую емкость. Механический предохранитель предотвращает попадание секрета внутрь моторного блока прибора при переполнении банки.

Все части прибора, контактирующие с секретом (шланги, банки, крышки, бактериальные фильтры) подвергаются стерилизации путем автоклавирования при температуре 136° С.

Безопасность.

- Прибор должен устанавливаться в пределах прямой видимости оператора, на твердой ровной поверхности.
- Эксплуатация прибора должна проводиться в медицинских помещениях, вне зон с наличием взрывоопасных газов (зона М).
- Нельзя допускать попадания жидкостей внутрь прибора. При попадании следует обращаться в сертифицированный сервисный центр.
- Пересылка прибора только в коробке.

Первое включение.

1. Вставьте емкость для секрета в корпус вакуум-аспиратора. Крышка емкости должна быть плотно прикручена на горло емкости для создания вакуума.
2. Наденьте соединительный шланг на вертикальный разъем в корпусе вакуум-аспиратора. Фильтр соединяется с прибором коротким шлангом. Второй конец шланга соединяется с емкостью для секрета.
3. Наденьте отсасывающий шланг на вертикальный разъем крышки емкости для секрета.
4. Включите сетевой шнур в розетку.
5. Включите зеленую кнопку на корпусе прибора.

Эксплуатация.

Перед использованием прибора с новым пациентом убедитесь, что следующие части прибора простерилизованы:

- отсасывающий шланг
- банка для сбора секрета
- крышка банки
- бактериальный фильтр.

Перед каждым использованием проверяйте бактериальный фильтр и при необходимости заменяйте его.

Бактериальный фильтр.

Фильтр не должен контактировать с пациентом – он лишь предохраняет прибор от попадания микрочастиц, влаги и бактерий в моторный блок.

Фильтр обладает гидрофобными свойствами, т.е. при намокании перестает пропускать воздух. Размер пор – 0,45 мкм. Многократное использование зависит от состояния фильтра – при малом загрязнении и просушивании он восстанавливает свои свойства.

Проверка бактериального фильтра.

1. Включите прибор.
2. Установите регулятор вакуума на максимум.
3. Если при открытом отсасывающем шланге вакуумметр показывает –0,3 бар, замените фильтр.

Режим отсасывания.

1. Перекройте отсасывающий шланг и установите уровень вакуума.
2. Подсоедините катетер или насадку для отсасывания.

Во время работы внимательно следите за уровнем секрета в банке – для предотвращения попадания жидкости в моторный блок не следует допускать наполнения банки более чем на 2/3.

Замена банки.

1. Прекратите аспирацию и выключите прибор.
2. Снимите отсасывающий шланг с крышки.
3. Снимите крышку с банки.
4. Установите пустую банку в держатель прибора.
5. Наденьте крышку и шланг обратно.

Очистка.

Очистка и стерилизация шлангов и банки.

При использовании прибора с новым пациентом необходимо провести стерилизацию следующих частей прибора:

- отсасывающий шланг
- банка для сбора секрета
- крышка банки
- бактериальный фильтр.


Порядок операций.

1. Отсоедините все шланги.
2. Отсоедините клапан от банки и промойте его в проточной воде.
3. Все остальные части, за исключением бактериального фильтра, должны быть промыты в проточной воде.
4. Соедините клапан с банкой.
5. Проведите стерилизацию всех перечисленных частей прибора (автоклавирование при 136°C)
6. После стерилизации соберите прибор.
7. Для продления срока службы резиновых частей прибора рекомендуется время от времени смазывать их вазелином или силиконом.

Очистка поверхности.

- Всегда отключайте прибор от сети перед протиркой поверхности.
- Протирайте поверхность прибора мягкой тряпкой, смоченной в растворе дезинфектанта. Не допускайте попадания жидкости в прибор.
- Включайте прибор только после высыхания дезинфектанта.

Схема строения прибора.

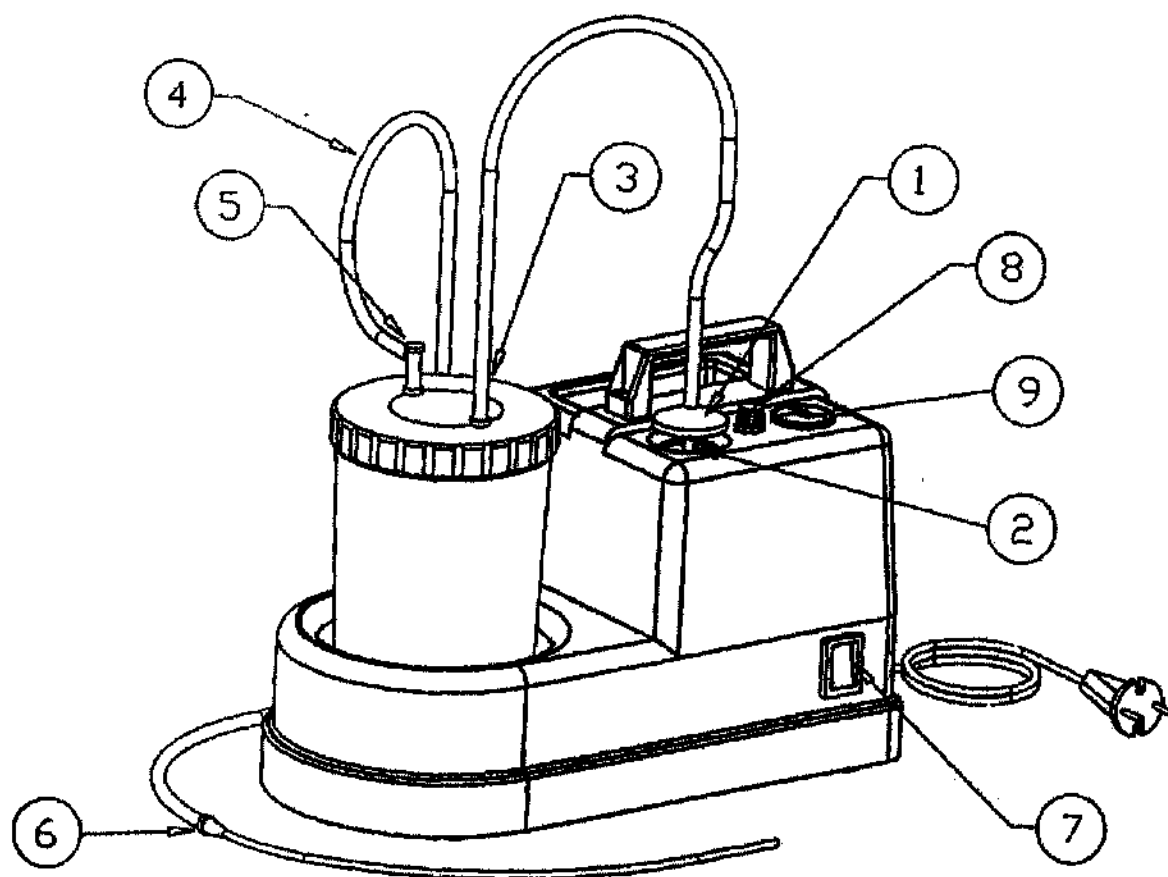

1. бактериальный фильтр.
2. вертикальный разъем в корпусе вакуум-аспиратора.
3. вертикальный разъем в емкости для секрета.
4. отсасывающий шланг.
5. вертикальный разъем для крепления отсасывающего шланга.
6. коннектор.
7. сетевой выключатель.
8. ручка регулятора вакуума.
9. манометр.

