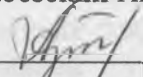


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Хабезский гипсовый завод»

 О.А. Аргунов

«20»  2015 г.



Инструкция по применению

ХАБЕЗ.33494550.003 ЭТ

Гипс медицинский

по ТУ 5744 - 003- 33494550 – 2015

2015г.

Настоящая инструкция содержит рекомендации работы с гипсом медицинским по ТУ 5744 - 003- 33494550 – 2015 (далее по тексту – гипс), который накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. Гипс предназначен для однократного применения с последующей утилизацией в установленном порядке.

Гарантированные производителем значения основных параметров, характеристик (свойств)

Основные технические характеристики гипса представлены в таблицах №№ 1-4.

Таблица №1

Марка вяжущего	Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч., не менее, в МПа (кг*с/см ²)	
	При сжатии	При изгибе
Г-4	4 (40)	2,0 (20)

Таблица №2

Вид вяжущего	Индекс сроков твердения	Срок схватывания, мин	
		Начало, не ранее	Конец, не позднее
Быстротвердеющий	A	4	15

Таблица №3

Вид вяжущего	Индекс степени помола	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %, не более
Тонкого помола	III	2

Таблица №4

Наименование показателя	Значение показателя
Объемное расширение, %, не более	0,2
Примеси не растворимые в соляной кислоте, %, не более	1,0
Содержание металлопримесей в 1 кг гипса, мг, не более	8

Поставка в бумажных мешках, масса брутто 25 кг.
При изготовления гипса используют: гипсовый камень 1-го сорта по ГОСТ 4013 производства ОАО «Хабезский гипсовый завод».

Регламентирующие условия и правила эксплуатации

Стандартная консистенция (нормальное водогипсовое соотношение) гипса 65-71%, это значит что для получения однородной массы имеющей консистенцию густой сметаны необходимо засыпать гипс в емкость с чистой холодной водой в соотношение 1 кг. гипса к примерно 650-710 мл воды и затем перемешивать инструментом.
Гипс быстросхватывающий материал, поэтому необходимо растворять такое количество, которое может быть выработано в течение 10 минут.
При затворении гипса водой: рН=7 и белый цвет консистенции, отсутствие запаха сероводорода.

Техническое обслуживание и ремонт готовой повязки согласно рекомендациям медицинского работника, готовившего повязку.

Транспортирование.

Гипс транспортируется крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортирования гипса должны обеспечивать целостность упаковки и защиту от загрязнения посторонними веществами и примесями.

Укладка мешков с гипсом в транспортные средства производится правильными рядами. Погрузка навалом и выгрузка мешков сбрасыванием запрещается.

Хранение.

Мешки с гипсом должны храниться в сухом помещении с влажностью не более 60%, отдельно по типам и маркам. Мешки с предыдущей партии используются в первую очередь.

Гипс при транспортировании и хранении должен быть защищен от увлажнения и атмосферных осадков.

Гарантия.

Изготовитель гарантирует соответствие гипса при соблюдении условий их транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения гипса медицинского - 12 месяцев с даты изготовления.

Утилизация.

Утилизация гипса должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.1.7.2790 для отходов кл.А

Контактные данные производителя.

ОАО «Хабезский гипсовый завод»

РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Али-Бердуковский


8 (87873) 2 22 24

www.habezgips.ru

habez-gips@bk.ru

Генеральный директор
ОАО «Хабезский гипсовый завод»

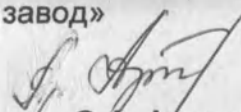


О.А. Аргунов