

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Дентегрис-Р»

Гайнутдинова Б.Г.

2010г.



РУКОВОДСТВО

ПО АССИСТИРОВАНИЮ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЯХ.

СИСТЕМА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ
«ДЕНТЕГИС»

2010г.



Система томатологической имплантации Dentegris



Руководство по ассистированию при хирургических операциях

ВВЕДЕНИЕ

Имплантаты Dentegris являются медицинскими изделиями, которые всегда отвечают самым высоким требованиям к безопасности и комфорту. Каждый отдельный имплантат и компонент после изготовления подвергается тщательному анализу. Изделия Dentegris производятся исключительно в Германии. Фирма Dentegris Deutschland GmbH прошла сертификацию MED_CERT на соответствие требованиям европейского стандарта ISO 13485:

Для стоматологической имплантации Dentegris предлагает Вам две различные конфигурации имплантатов, имеющих одинаковое соединение для протезирования по диаметру: прямой имплантат Dentegris "Straight" (с параллельными стенками) и винтовой имплантат Dentegris "Tapered" (корневидной формы). Кроме того, Dentegris предлагает цельный мини-имплантат со сферической головкой.

Также есть имплантаты Dentegris 4 диаметров: 3,3 мм; Ø 3,75 мм, Ø4,5 (Tapered) / 4,75 (Straight) мм и Ø 5,5 мм.


Для удобства цветовая кодировка упрощает идентификацию:

желтый	Диаметр имплантата 3,3
зеленый	Диаметр имплантата 3,75
голубой	Диаметр имплантата 4,5 (Tapered); 4,75 (Straight)
розовый	Диаметр имплантата 5,5

Dentegris STRAIGHT Ø 3,3 Длина: 10/11,5/13 мм Ø 3,75 Длина: 8/10/11,5/13/16 мм Ø 4,75 Длина: 8/10/11,5/13/16 мм Ø 5,5 Длина: 8/10/11,5/13 мм	Имплантат Dentegris Straight имеет зарекомендовавший себя, пользующийся успехом во всем мире дизайн с параллельными стенками и является универсально используемым имплантатом.	Поверхность WBS (Wrinkled Blast Surface)
Dentegris TAPERED Ø 3,3 Длина: 10/11,5/13 мм Ø 3,75 Длина: 10/11,5/13/14,5 мм Ø 4,5 Длина: 10/11,5/13 мм Ø 5,5 Длина: 10/11,5/13 мм	Имплантат Dentegris Tapered за счет своей конусовидной формы походит на естественный корень зуба. В этой связи он особенно показан для введения непосредственно после удаления зуба или в более мягкой области верхней челюсти.	Поверхность WBS (Wrinkled Blast Surface)
МИНИ-ИМПЛАНТАТЫ Ø 2,7 мм Длина: 10/11,5/13 мм (к вершине слегка конические) Диаметр сферической головки: 2,25 мм	Неразъемный сферический миниимплантат Dentegris был разработан для области между подбородочными отверстиями.	Поверхность WBS (Wrinkled Blast Surface)

Straight

Tapered

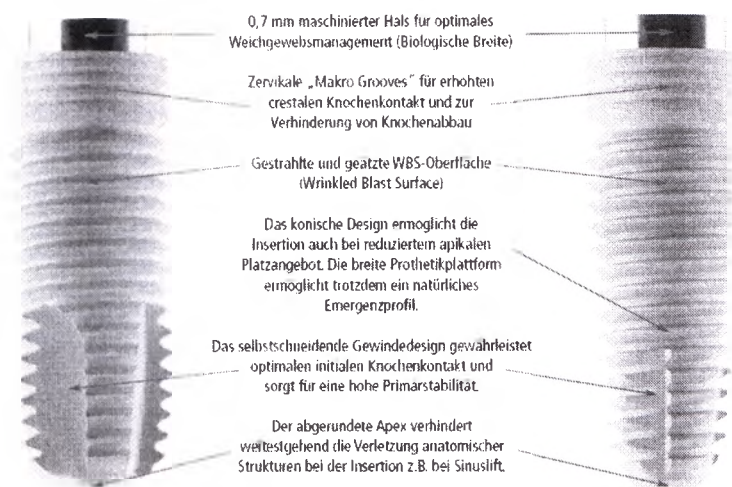

0,7 мм полированная шейка для оптимального менеджмента мягких тканей (биологическая ширина)

„Makro Grooves“ (макрорельефы) для повышенного контакта с костью на уровне альвеолярного гребня и предотвращения разрушения кости

Травленная поверхность с пескоструйной обработкой WBS (Wrinkled Blast Surface)


Конический дизайн позволяет осуществлять введение и при нехватке места в апикальной зоне. Несмотря на это, широкая платформа протезирования дает возможность получить естественный выступающий профиль.

Самосрезающий дизайн резьбы обеспечивает оптимальный начальный контакт с костью и высокую первичную стабильность.

Скругленная верхушка максимально препятствует повреждению анатомических структур при введении, например, при синуслифте.

Соединение с внутренним шестигранником зарекомендовало себя за 24 лет клинического опыта!

Высокая протетическая стабильность и точность посадки облегчают размещение различных частей и слепочных трансферов. Суживающаяся область шейки гарантирует равномерное распределение окклюзионных сил. Глубокое внутреннее соединение обеспечивает превосходный контроль верной посадки и является непроницаемым для бактерий.

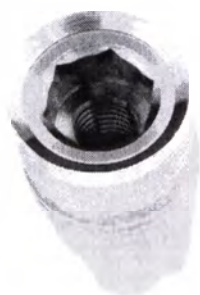

ПРОТИВООКАЗАНИЯ

Необходимо учитывать противопоказания к проведению оперативного вмешательства.

Dentegris Straight Box

Optional

Art.Nr. 186RFG18204



2 mm
PROBORER
Art.Nr. 580001



3.75 mm
STUPENSTÄTTER
Art.Nr. 500001



4.75 mm
STUPENSTÄTTER
Art.Nr. 500002



5.50 mm
STUPENSTÄTTER
Art.Nr. 500003



3.75



4.75



5.50



Optional



Hinweis:
Position für
Adapter (Lang
& kurz beschriftet).



Tiefenbohrer

3.75 mm Art.Nr. 580002
4.75 mm Art.Nr. 580003
5.50 mm Art.Nr. 580004

Gewindeschneider

3.75 mm Art.Nr. 500001
4.75 mm Art.Nr. 500002
5.50 mm Art.Nr. 500003



Метчик Dentegris Straight

Варианты опции				
Метчик	3.75 мм ступенчатая фреза Арт. №	4.75 мм ступенчатая фреза Арт. №	5.50 мм ступенчатая фреза Арт. №	Глубинная фреза
Глубинная фреза				Примечание: Соблюдайте позиции «длинный/короткий» для адаптеров
Метчик				

Внимание: Соблюдайте указания по уходу и техобслуживанию!

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА DENTEGIRS STRAIGHT

ПРАВИЛА ПО СВЕРЛЕНИЮ И НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ

Скорость сверления не должна превышать 800 об/мин.

Для нарезания резьбы необходимо установить скорость 20-30 об/мин.

При сверлении и нарезании резьбы необходимо постоянно следить за достаточным внешним охлаждением.

Избегать латерально направленных сил при сверлении и нарезании резьбы.

При сверлении ложа под имплантат работать с легким давлением прижима, а также движениями вперед и назад в продольной оси имплантата.

Последовательность сверления для имплантата Dentegris Straight (пример 3,75 мм, длина 13 мм)



г 1.

В первом сверлении (фреза для первого прохождения по кости) определяется позиция имплантата.

г 2.

С помощью спиральной фрезы 2,0 мм подходящей длины подготавливается глубина ложа под имплантат. Вытравленная лазером маркировка фрез соответствует длине вводимого имплантата.

После использования фрезы 2,0 мм, а также после фрезы 3,25 мм в виде опции могут использоваться индикаторы направления для рентгеновского контроля или для ориентации имплантата.

г 3.

Сверловка 3,3 мм, углубляемый до упора ограничения глубины, расширяет плечо сверленного отверстия, для того чтобы создать оптимальное прохождение для следующей фрезы 2,8 мм.

4.

ощью фрезы 2,8 мм ложе под имплантат подготавливается дальше до соответствующей ровки глубины.

5:

енковка 3,75 мм, углубляемый до упора ограничения глубины, расширяет плечо еного отверстия для того, чтобы создать оптимальное прохождение для следующей и 3,25 мм и одновременно приготовить точный воротникообразный вырез в корковом слое печа имплантата 3,75 мм.

6:

и продолжается подготовка для расширения ложа под имплантат с помощью спиральной и 3,25 мм до соответствующей маркировки глубины.

7:

(ДЕ ОПЦИИ)

ьзовать метчик 3,75 мм необходимо в плотной кости типа I и II. При работе с костью типа ение остается на усмотрение хирурга. При рыхлой кости типа IV нарезка резьбы не ендуется.

енение:

и метчик в подготовленное ложе под имплантат и работать низкооборотным ечником с высоким вращающим моментом сначала с легким нажимом (максимум 20 н). Как только режущие кромки войдут в контакт с костью, нужно дать инструменту без инительного нажима войти в ложе под имплантат. Нарезать резьбу следует до етствующей маркировки глубины.

ожете выполнить этот шаг и вручную с помощью хирургического ключа-трещотки и точного адаптера для метчика.

же скоростью снова вывернуть метчик из кости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ 3,3; 4,75 И 5,5 СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ.

Хирургический набор Dentegris Straight




ДЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ

ОТОВКА:

АТЬ ИМПЛАНТАТ (ДВОЙНОЙ БЛИСТЕР) ИЗ УПАКОВКИ (НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ИСТЕНТ).



(НЕСТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ)

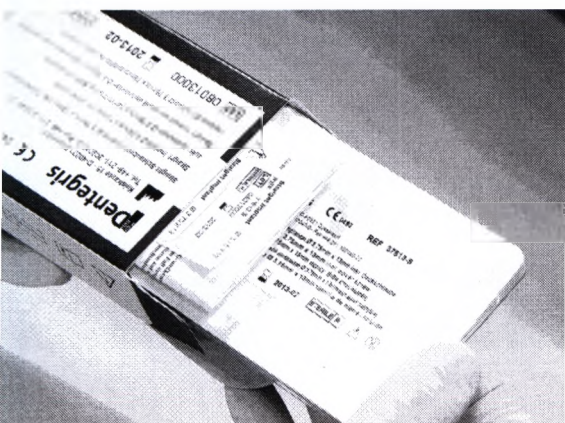

(НЕСТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ)


РЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК ДВОЙНОЙ БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ И ПЕРЕДАТЬ ТРЕННИЙ БЛОК, СОДЕРЖАЩИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ, СТЕРИЛЬНОМУ ИСТЕНТУ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ.

ЭТОМ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ВНУТРЕННЕЙ КОВКИ. (НЕСТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ / СТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ)




(НЕСТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ)

**ОТКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ УПАКОВКИ СТЕРИЛЬНЫМ АССИСТЕНТОМ И/ИЛИ ХИРУРГОМ
ОПЕРАЦИОННЫЙ АССИСТЕНТ / ХИРУРГ).**

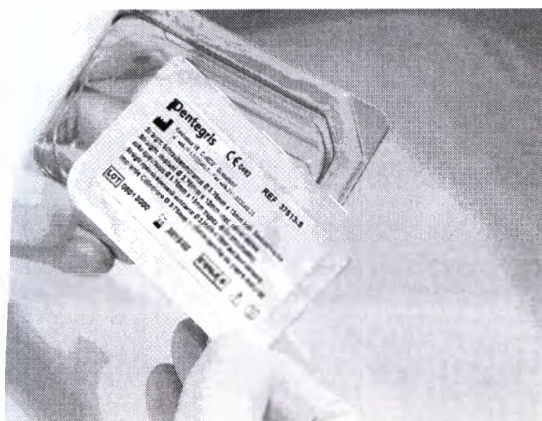


(СТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ / ХИРУРГ)

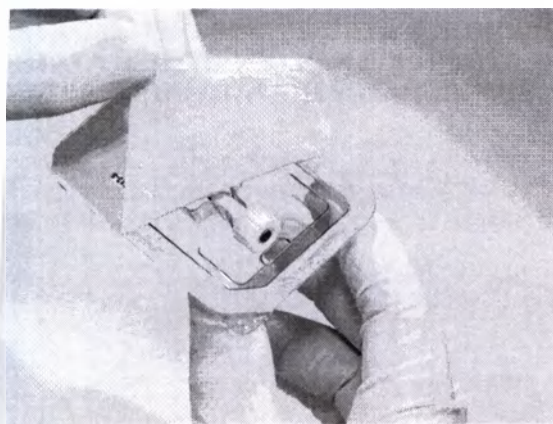


(СТЕРИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ / ХИРУРГ)

**ВЗЯТЬ ИМПЛАНТАТ И С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТМАССОВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ВВЕСТИ В
ОТВЕРСТИЕ ПОД ИМПЛАНТАТ И ВВИНТИТЬ ПЕРВЫЕ $\approx$ 3-4 ХОДА РЕЗЬБЫ, ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.**

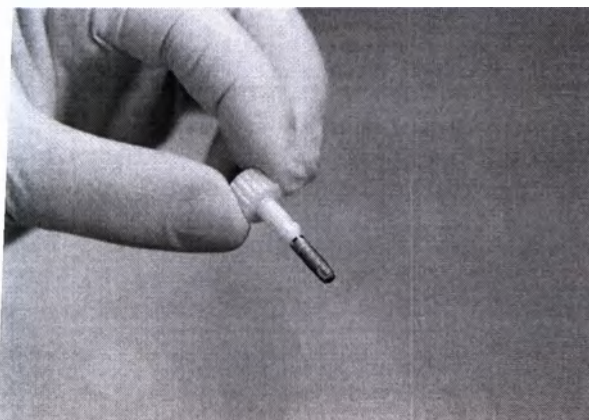

(ХИРУРГ)

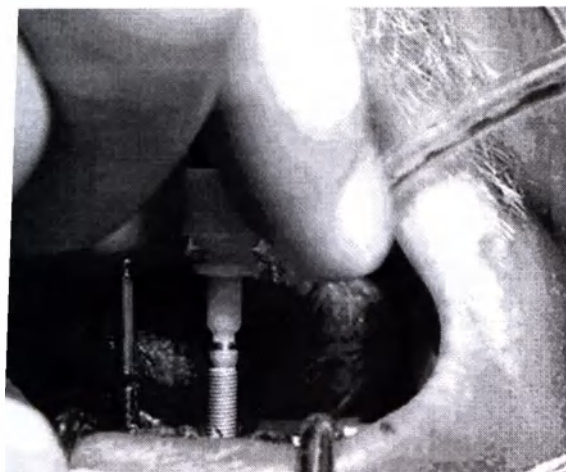

(ХИРУРГ)

ЕНИЕ ИМПЛАНТАТА:

ИАНТАТ МОЖНО ВВИНЧИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВВИНЧИВАНИЯ ИАНТАТА (КОРОТКОГО ИЛИ ДЛИННОГО), ВЫБРАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ИЕТРОМ ИМПЛАНТАТА, И УСТАНОВЛЕННОГО РУЧНОГО КЛЮЧА - МАХОВИКА.



- Достать имплантат из двойной блистерной упаковки, ввинтить с помощью пластиковой насадки первые 3 оборота.
- Состыковать маховик с инструментом для ввинчивания имплантата и погрузить имплантат до полированной шейки, либо в эстетической зоне на уровень кости.

пользовать вращающий момент не более 35-40 Н/см.

ИМПЛАНТАТ ВВИНЧИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВВИНЧИВАНИЯ ИМПЛАНТАТА (КОРОТКОГО ИЛИ ДЛИННОГО), ВЫБРАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ ИМПЛАНТАТА, И УСТАНОВЛЕННОГО В КЛЮЧ-ТРЕЩОТКУ. АДАПТЕРА




Достать имплантат из двойной блистерной упаковки, ввинтить с помощью пластиковой насадки первые 3 оборота.

Соединить трехточечный адаптер с ключом-трещоткой, использовать инструмент для ввинчивания имплантата и погрузить имплантат до полированной шейки, либо в эстетической зоне на уровень кости.

Использовать вращающий момент не более 35-40 Н/см.

ВВИНЧИВАНИЕ ИМПЛАНТАТА С ПОМОЩЬЮ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА

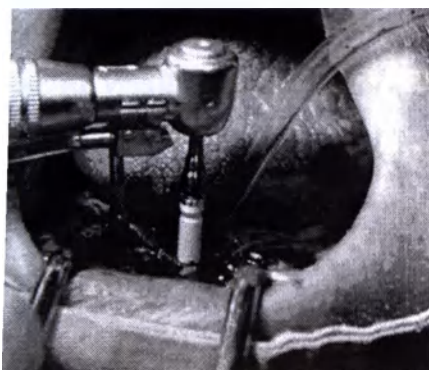

- Достать имплантат из двойной блистерной упаковки, ввинтить с помощью пластиковой насадки первые 3-4 оборота.
- Инструмент для ввинчивания имплантата (короткий – в дистальной области; длинный в области фронтальных зубов) закрепить в угловом наконечнике и установить в имплантат
- Имплантат ввинтить с частотой вращения около 20 об/мин. в подготовленное ложе под имплантат, погрузить имплантат до полированной шейки, либо в эстетической зоне на уровень кости.

Использовать вращающий момент не более 35-40 Н/см.

ВКА ВИНТА-ЗАГЛУШКИ

тушка с помощью .049" шестигранной отвертки (в зависимости от региона имплантата или короткой), вращая влево, высвободить из головки пластикового ввинчивающего нта и вручную ввинтить в имплантат.



ЗАЖИВЛЕНИЯ

ельно рекомендуется обеспечить отсутствие нагрузки на период заживления в течение м 3 месяцев в нижней челюсти и/или 6 месяцев в верхней челюсти. Продолжительность от индивидуального процесса заживления и должна определяться в каждом отдельном соответственно. Отсутствие нагрузки в период заживления дает поверхности тата возможность интегрироваться в окружающую опорную кость.

ТИЕ ИМПЛАНТАТА (ПОВТОРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО)

крытии имплантата после вскрытия слизистой оболочки винт-заглушка удаляется и ется соответствующим формирователем десны.

ормирователи десны (конические или расширяющиеся) соответствующих диаметров татов и различной высоты (2, 4, 6 мм).

ендуются конические (расширяющиеся) формирователи десны (см. ажение)!



ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА DENTEGIRS TAPERED

ПРАВИЛА РАБОТЫ ПО СВЕРЛЕНИЮ И НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ

Скорость сверления не должна превышать 800 об/мин.

Для нарезания резьбы необходимо установить скорость 20-30 об/мин.

При сверлении и нарезании резьбы необходимо постоянно следить за достаточным внешним охлаждением.

Избегать латерально направленных сил при сверлении и нарезании резьбы.

При сверлении ложа под имплантат работать с легким давлением, а также движениями вперед и назад в продольной оси имплантата.

Последовательность сверления для имплантата Dentegris Tapered (ширина 3,75 мм, длина 13 мм)



1.

В первом сверлении (фреза для первого прохождения по кости) определяется позиция имплантата.

2.

С помощью спиральной фрезы 2,0 мм подходящей длины подготавливается глубина ложа под имплантат. Вытравленная лазером маркировка фрез соответствует длине вводимого имплантата.

При использовании фрезы 2,0 мм, а также после фрезы 3,25 мм в виде опции могут использоваться индикаторы направления для рентгеновского контроля или для ориентации имплантата.

3.

Вбить предварительную фрезу 3,75 мм до упора ограничения глубины.

4.

Вбить фрезу для окончательной обработки 3,75 мм до упора ограничения глубины.

Шаг 5:

использовать метчик 3,75 мм необходимо в кости типа I, II и III. При рыхлой кости типа IV в резке резьбы нет необходимости.

Применение:

Вставить метчик в подготовленное ложе под имплантат и работать низкооборотным концевиком с высоким вращающим моментом сперва с легким нажимом (максимум 20 Н/мин). Как только режущие кромки войдут в контакт с костью, нужно дать инструменту без дополнительного нажима войти в ложе под имплантат. Нарезать резьбу следует до соответствующей маркировки глубины на метчике.

Вы можете выполнить этот шаг и вручную с помощью хирургического ключа-трещотки и точного адаптера для метчика.

С той же скоростью снова вывернуть метчик из кости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ 3,3; 4,75 И 5,5 СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ РУКОВОДСТВА.

ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ**1. введение имплантатов Straight.**

Хирургический набор Dentegris Tapered





Имплантационная система Dentegris Str

Последовательность сверления для имплантационной системы Dentegris Straight:

3 мм:

- 1) Пилотная фреза
- 2) 2 мм спиральная фреза до желаемой маркировки глубины
- 3) Зенковка для 3,3 мм:
 - **Рыхлая кость (D4):** погрузить только наполовину!!
 - **Плотная кость (D1-D3):** погрузить полностью!!
- 4) 2,8 мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины
- 5) Метчик для 3,3 мм, в виде опции
 (например, при качестве кости D1)



5 мм:

- 6) Пилотная фреза
- 7) 2 мм спиральная фреза до желаемой маркировки глубины
- 8) Зенковка для 3,3 мм (погрузить полностью)
- 9) 2,8 мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины
- 10) Зенковка для 3,75 мм:
 - **Рыхлая кость (D4):** погрузить только наполовину!!
 - **Плотная кость (D1-D3):** погрузить полностью!!
- 11) 3,25 мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины
- 12) Метчик для 3,75 мм, в виде опции
 (например, при качестве кости D1)



ние 1

отная фреза

и спиральная фреза до желаемой маркировки глубины

ковка для 3,3 мм (**погрузить полностью**)

мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины

ковка (**погрузить полностью**)

мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины

ковка для 4,75 мм:

костяк (D4): погрузить только наполовину!!

отная кость (D1-D3): погрузить полностью!!

мм пушечное сверло до желаемой маркировки глубины

чик для 4,75 мм, в виде опции

пример, при качестве кости D1)



положение 1

Безопасные фрезы:

Безопасные фрезы сверлят **точно** на глубину кости в соответствии с калибровкой по длине фрез! (см. раздел "Калибровка фрез" внизу)

Знание для кости D1!

При точном сверлении глубины в очень плотной кости D1 в конечной позиции полированное плечо имплантата находится прим. **0,7 мм выше уровня альвеолярного гребня!**

Погружение на уровень кости при работе с костью D1:

Сверлите **немного глубже, чем указывает калибровка по длине (прим. 0,7 мм)**, если хотите погрузить имплантат при работе с костью D1 на уровень кости!

Калибровка фрез

Dentegris
DEUTSCHLAND GMBH
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Die Safety Bohrer



Безопасные фрезы

пина



Имплантационная система Dentegris Tapered

Последовательность сверления для имплантационной системы Dentegris Tapered:

мм (пример: длина имплантата 13 мм):

5) **Пилотная фреза**



6) **2 мм спиральная фреза** до желаемой маркировки глубины



7) **Ступенчатая фреза** (Exp. Drill) 3,75 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

8) **Фреза для окончательной обработки** (Final Drill) 3,75 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

9) **Метчик** для 3,75 x 13 мм погружать до маркировки кольца (качество кости D1 / D2 / D3)



ение 2

л (пример: длина имплантата 13 мм):

Тилотная фреза



2 мм спиральная фреза до желаемой маркировки глубины



Ступенчатая фреза (Exp. Drill) 3,75 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

Ступенчатая фреза (Exp. Drill) 4,5 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

Фреза для окончательной обработки (Final Drill) 4,5 x 13 мм до упора ограничения



бины

При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

) Метчик для 4,5 x 13 мм погружать до маркировки кольца
(качество кости D1 / D2 / D3)



Внимание!

ИК:

Всегда погружать метчик до маркировки глубины (см. изображение внизу)!!


цающий момент для введения имплантатов:

Вращающий момент для введения имплантатов Dentegris Tapered не должен превышать 35 Н/см - 40 Н/см максимум!!

Dentegris
TAPERED
AL IMPLANT SYSTEM

iefenmarkierung Dentegris Tapered Bohrer

Beispiel: Implantatlänge 13mm

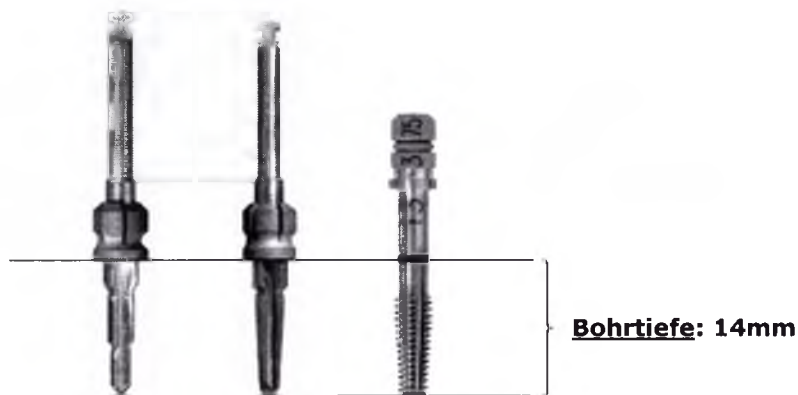

маркировка глубины фрез Dentegris Tapered

мер: длина имплантата 13 мм

на сверления: 14 мм

жение 2

м (пример: длина имплантата 13 мм):

Пилотная фреза



2 мм спиральная фреза до желаемой маркировки глубины



Ступенчатая фреза (Exp. Drill) 3,75 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

Ступенчатая фреза (Exp. Drill) 4,5 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

Ступенчатая фреза (Exp. Drill) 5,5 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!

Фреза для окончательной обработки (Final Drill) 5,5 x 13 мм до упора ограничения глубины



При неровном уровне кости:

Удалите ограничитель глубины и сверлите в области плеча до желаемой глубины погружения!



Метчик для 5,5 x 13 мм погружать до маркировки кольца (качество кости D1 / D2 / D3)

ание 4

рольный перечень для подготовки операции по имплантации;

тыни:

- поворотный стол / операционный стол
- пациент
- место для хранения
- 1 чехол для отсоса, стерильный отсасывающий шланг

кда:

- стерильные перчатки для операционной бригады (1 х хирург и 1 х для стерильного ассистента, нестерильные перчатки для нестерильного ассистента)
- маска для рта, операционные колпаки (и для пациента)
- можно стерильный халат

готовить машину: (всегда использовать машину, где можно регулировать цающий момент, например, фирм NSK ,W&H или KAVO)

- стерильный моторный кабель (стерилизовать с помощью защитного колпачка)
- стерильный угловой наконечник и стерильный 1 наконечник, а также стерильное место для хранения углового наконечника
- стерильная круглая фреза для выравнивания кости
- положить наготове охлаждающий шланг
- NaCl бутылка 250 мл - 1000 мл в зависимости от количества имплантатов.

дготовить стерильный хирургический набор и имплантаты

дготовка:

- 1х пластиковый одноразовый отсос стерильный (можно подготовить стерильную ловушку для сбора кости Aspeo и фильтр Aspeo)
- 1 х стерильный сосуд для сбора кости
- 1 стерильный шприц (карпулы, а также сверлильный кондуктор – при его наличии – поместить в спирт)
- стерильные тампоны
- шовный материал
- можно костный заменитель и мембраны
- холодная охлаждающая подушка для пациента
- подготовить стакан с раствором для полоскания рта для пациента
- стерилизовать зубную нить для защиты инструментов, например, отвертки.

нструменты: (все стерильные)

- крючки (Лангенбека, можно держатель щек)
- зеркало, стоматологический пинцет, зонд
- линейка (для проверки длины фрезы)
- скальпель
- распатор (большой и маленький)
- хирургический пинцет

ht

ptember 2008

G, Artherstrasse 3 – 6301 Zug, Schweiz CH-170.3.028.811-5, im Namen des Direktors And-
awirs, geltend aufgrund der Statuten, ermächtigt mit dieser Vollmacht Dentegris-R Volzhsky
rtal 95, Korpus 5a, 109125 Moskau, Russland, vertreten durch Generaldirektorin Frau Bro-
orgievna Gajnutdinova, geltend aufgrund des Statuts:

ressen unserer Gesellschaft vor den staatlichen Organen, die die Registrierung der medi-
en Technik und der Erzeugnisse mit medizinischer Bestimmung erteilen, sowie vor juristi-
Personen verschiedener rechtlicher Form welche eine Prüfungstätigkeit durchführen, die
Angelegenheiten der Registrierung / Umregistrierungen der medizinischen Technik und
eugnisse der medizinischen Bestimmung verbunden ist, wahrzunehmen;

andlungen zu führen;

umente (Materialien) einzureichen;

chende Verträge, Anträge, sonstige Dokumente, einschließlich finanzieller Dokumente, zu
nreiben;

dige Erklärungen abzugeben und die zusätzlichen Dokumente einzureichen,

nstleistungen zu bezahlen;

wendigen Dokumente entgegenzunehmen;


meldeschein auf Dentegris-R einzureichen.

cht ist für die Periode von drei Jahren ausgestellt.

cht ist mit dem Recht, Untervollmachten auszustellen ohne zusätzliches Einverständnis
chtgebers, ausgegeben.)

xG

drej Dawirs

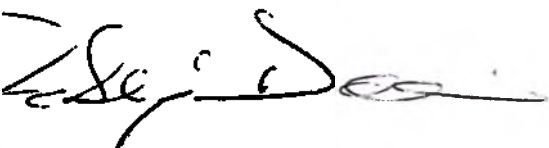



Amtliche Belaubigung



Die Echtheit der Unterschrift von Herrn Andrej Eugen Dawirs, geb. 23. November 1978, deutscher Staatsangehöriger, in DE-47199 Duisburg, Grafschafter Str. 136, wird hiermit amtlich beglaubigt.

Zug, 4. Dezember 2008

Die Urkundsperson:

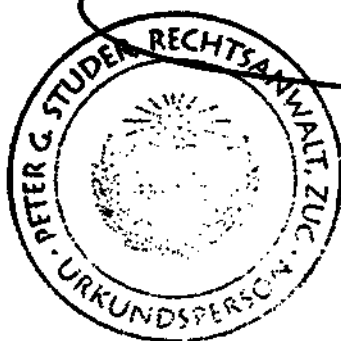

RA Peter Georg Studer

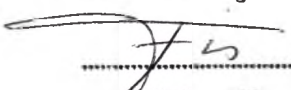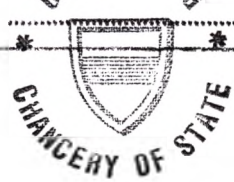APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug Country: Swiss Confederation, Canton of Zug Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by <u>Peter G. Studer</u>	
3. in der Eigenschaft als acting in the capacity of <u>Notary public</u>	
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of <u>Notary public of the</u> <u>Canton of Zug</u>	
5. in / to 6300 Zug	6. am / the <u>05. Dez 2008</u>
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug by Chancery of State of the Canton of Zug	
8. unter Nr. / under No. <u>22670/08</u>	10. Unterschrift / Signature
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal	
*  *	
Herbert Fischer	

ентегрис АГ» (Dentegris AG)

RM/ch / 08'9348/1/1

веренность

25 сентября 2008г.

пания «Дентегрис АГ» (Dentegris AG), Артхерштрассе 3, 6301 Цуг, Швейцария, СН-13.028.811-5, в лице Директора Андрея Евгена Давирса, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает ООО «Дентегрис-Р» (Dentegris-R), 1125 Москва, Волжский бульвар, д. 95, к. 5а, в лице Генерального Директора Елентуиновой Брониславы Георгиевны, действующей на основании Устава:

представлять интересы нашей организации перед государственными органами, осуществляющими регистрацию медицинской техники и изделий медицинского назначения и юридическими лицами различной организационно-правовой формы, осуществляющими предпринимательскую деятельность, связанную с вопросами регистрации/перерегистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения;

проводить переговоры;

предоставлять документы (материалы);

подписывать соответствующие договоры, заявки, любые другие документы, в том числе и финансовые;

предоставлять пояснения и предъявлять дополнительные документы;

оплачивать услуги;

получать необходимые документы;

регистрационное удостоверение оформить на ООО «Дентегрис-Р».

веренность дана сроком на три года.

Доверенность выдана с правом передоверия без согласия доверителя).

Подпись/

Генеральный директор «Дентегрис АГ» (Dentegris AG),

Директор Андрей Давирс

АЛИЗАЦИЯ

линность подписи г-на Андрея Евгена Давирса, родившегося 23 ноября 1978г.,
 данина Германии, проживающего по адресу: DE-47199, г. Дуйсбург, Графшафтер
 ассе 136, настоящим засвидетельствована.

4 декабря 2008 г.

Нотариус:

Питер Георг Штудер

/подпись/

Печать: *Петер Георг Штудер. Нотариус. Цуг.*

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

Страна Швейцария, Кантон Цуг

Настоящий официальный документ

подписан Петером Г. Штудером

действующим на правах Нотариуса

скреплен печатью/штампом Нотариуса Кантона Цуг

Заверено

в 6300 Цуг

6. 05 декабря 2008 г.

в Государственной Канцелярии Кантона Цуг

№ 12670/08

Печать/штамп:

10. Подпись
 /Подпись/

ать: Государственная Канцелярия
 тона Цуг

Герберт Фишер

евёл профессиональный переводчик Сметанин Егор Сергеевич


од Москва, двадцать пятого декабря две тысячи восьмого года.

ЮДАШКИНА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА – исполняющая обязанности
ЕИНА НИКИТЫ ВИКТОРОВИЧА - нотариуса города Москвы,
детельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Сметаниным
ром Сергеевичем в моём присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № **Т-23617**

Взыскано по тарифу 100 руб.

Нотариус

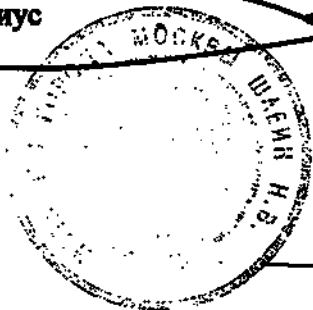



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа.

Нотариус

Город Москва,

22 ИЮН 2010

Я, Дементьева Надежда Викторовна, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 1-5594
Взыскано по тарифу 30 руб. с.р.

Нотариус



Всего прошнуров
пронумеровано и скреп
печатью 4 ли
Нотариус