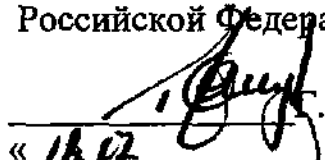


Министерство здравоохранения Российской Федерации

Утверждаю:

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

 Г. Г. Онищенко
« 18.02 » 2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по применению питательной среды для выделения микобактерий
туберкулеза готовой к употреблению (Среда Левенштейна-Йенсена)

Питательная среда предназначена для выделения микобактерий туберкулеза, атипичных микобактерий из инфицированного материала (мокрота, моча и др.).

Препарат представляет собой однородную массу светло-зеленого цвета в виде косячка с гладкой поверхностью и незначительным конденсатом на дне пробирки.

Взятие исследуемого материала, посев и культивирование производить согласно Методическим рекомендациям «Современные методы лабораторной диагностики туберкулеза», М., 1992 г.

Рост на питательной среде микобактерий туберкулеза бычьего и человеческого видов обнаруживается на 21-40 сут. При отсутствии роста посеvy следует инкубировать до 2,5 мес.

Микобактерии туберкулеза растут в виде шероховатых R-колоний, белого цвета с желтым или серым оттенком, могут встречаться сливающиеся между собой S-варианты.


Питательную среду выпускают по 6,5 мл свернутой в скошенном положении в пробирках.

Питательную среду хранят согласно СП 3.3.2.028-95 в вертикальном положении в коробках, в помещении при температуре от 2 до 8 °С.

Транспортируют согласно СП 3.3.2.028-95 при температуре от 2 до 25 °С.
Срок годности — 3 мес.

КОПИЯ ВЕРНА

Первый заместитель генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ

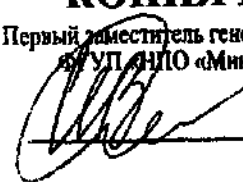 И. В. Сакаева

СОГЛАСОВАНО

Директор ГИСК
им. Л.А.Тарасевича

«5» 07 2002

Н.В.Медуницын

