

Эксплуатационная документация

Маска медицинская защитная из нетканых материалов «Бриз-1106М»
классов защиты FFP1, FFP2, FFP3 трех размеров
по ТУ 9398-049-54598330-2014

Генеральный директор
ООО «Бриз-Кама»



И.Г. Аксенова

Памятка по применению

Маски предназначены для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в качестве защитного барьера.

Маски выпускаются трехслойными трех классов защиты: FFP1 (низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) трех типоразмеров. Маска класса защиты FFP3 имеет грибковый дисковый клапан выдоха, расположенный в боковой части маски под защитным экраном. Каждая маска имеет носовой зажим и эластичное удерживающее оголовье.

Основные технические характеристики масок:

ВНИМАНИЕ! МАСКА НЕ ЗАЩИЩАЕТ! От газов, паров вредных веществ, аэрозолей органических растворителей, высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ (нафталин, йод и т.п.).

Климатические факторы, за исключением капельножидкой влаги, не снижают защитные свойства маски.

Маска рекомендуется для использования по назначению при температуре от 0 °С до +50 °С.

В зависимости от медицинских показаний и условий применения продолжительность использования изделия может измениться.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение! Соответствие назначения маски условиям её применения устанавливается потребителем.

Перед использованием необходимо обратить особое внимание на:

- наличие на маске маркировки (даты изготовления и срока возможного использования);
- отсутствие внешних дефектов (дыры, порывы и т.д.).

Подбор маски по росту производят в зависимости от морфологической высоты лица человека (расстояния от нижней части подбородка до переносицы):

Высота лица, см	10,0 и менее	11,0...11,9	12,0 и более
Размер маски	1	2	3

Маска является изделием индивидуального применения, т.е. предназначена для использования конкретным лицом, поэтому она должна быть определенного типоразмера, и подогнана по признаку герметичности.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

1 Возьмите правильно выбранную по росту маску из упаковки. Наденьте ее так, чтобы оголовье оказалось на затылке, а подбородок и нос разместились внутри маски, прижмите концы носового зажима к носу. Отрегулируйте оголовье для плотного прилегания маски к лицу. В случае негерметичности маски необходимо перевязать оголовье и снова проверить герметичность. Если герметичность при этом не достигнута, то необходимо заменить маску на другую меньшего роста.

2 В случае сильного затруднения дыхания и невозможности его облегчить – следует сменить маску.

Рекомендуемая длительность использования маски – не более 8 часов.

Срок использования маски определяется реальными условиями и интенсивностью работы в ней.

По истечении срока хранения или использования маски утилизируются в порядке, установленном СанПиН 2.1.7.2790, в домашних условиях – совместно с твердыми бытовыми отходами.

Условия хранения и транспортирования: температура внешней среды в диапазоне значений от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха от 50 до 98 % при 25 °С.

Макет этикетки

	МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТНАЯ БРИЗ-1106MFFP1 NR 1	
Рег. удост. № _____ от «___» _____ 2015 г.		
	ТУ 9398-049-54596330-2014	
 		
ООО «Бриз-Кама» 426033, РФ г. Елабуга ул. Сахарова д. 1		

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Маски _____

Партия № _____ Ящик № _____

Количество _____

Изготовитель ООО «Бриз-Кама»

Дата изготовления «___» _____ 20___ г.

Упаковщик _____

Контролер _____

ПАСПОРТ на партию МИ:

Маска медицинская защитная из нетканых материалов «Бриз-1106М» классов защиты FFP1, FFP2, FFP3 трех размеров по ТУ 9398-049-54598330-2014

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Партия № _____ масок в количестве _____ штук изготовлена ООО «Бриз-Кама» в _____ 20__ г. по ТУ 9398-049-54598330-2014.

1.2 В каждую коробку упаковано _____ масок.

Партия № _____ упакована в _____ ящиков.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Требования ТУ 9398-049-54598330-2014	Результаты испытаний
1 Внешний вид		
2 Комплектность		
3 Маркировка и упаковывание		
4 Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более: на входе (при расходе 30 дм ³ /мин) на входе (при расходе 95 дм ³ /мин)		
5 Проницаемость фильтрующего материала тест-аэрозолем, %, менее		
6 Коэффициент проникания тест- аэрозоля под маску, %, не более		
7 Масса, г, не более		

Начальник лаборатории _____

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник производства _____

личная подпись

расшифровка подписи

3 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Партия № _____ масок соответствует требованиям ТУ 9398-049-54598330-2014, и признана годной к эксплуатации.

4 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие масок требованиям ТУ 9398-049-54598330-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и памяткой по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Начальник ОТК ООО «Бриз-Кама» _____

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 4 листов

