

Инструкция по применению – Информация для пациента

Состав продукта

Изотонический раствор морской воды в виде назального спрея Викс АкваБэби (Vicks AquaBaby).

Поплавок: морская вода 31,82 % (в весовом отношении);

Искусственная вода 68,18 % (в весовом отношении).

- Не содержит ароматизаторов;
- Не содержит консервантов;
- Имеет специальный наконечник/носик для младенцев и детей дошкольного возраста

Показания к применению

Промывание носа при простудных заболеваниях, рините или аллергии;

Увлажнение слизистой оболочки носа при сухости;

Гигиена полости носа;

Противопоказания

При применении медицинского изделия Викс АкваБэби (изотонический раствор) в соответствии с инструкцией противопоказаний нет.

Меры предосторожности

В случае необходимости одновременного применения других назальных средств или назальных лекарственных препаратов обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

Инструкция по применению

Перед первым использованием ненадолго нажмите на наконечник для активации аппликатора;

Когда ребенок лежит на боку или сидит, наклонив голову вбок, осторожно введите наконечник спрея в носовой ход;

Кратковременно нажмите на наконечник (1-2 секунды);

Подождите, пока остатки раствора вытекут наружу, а затем сделайте так, чтобы ребенок высморкался;

Повторите те же действия с другим носовым ходом;

После каждого использования промывайте наконечник теплой водой;

Используйте спрей в каждый носовой ход 2-6 раз в день.

Наконечник можно использовать в любой позиции. Должен использоваться только одним человеком, во избежание передачи инфекции.

Не применять у детей старше 9 месяцев.

Информация об упаковке

10 мл раствора в алюминиевом баллоне. Викс АкваБэби поставляется в коробке, куда помещаются один баллон и одна инструкция.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре под давлением: беречь от попадания солнечных лучей и не подвергать воздействию температур более 50°C.

Не нагревать и не поджигать даже после использования.

Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать только по назначению.

Срок годности продукта

12 месяцев.

Препарат является стерильным.

Используется без рецепта.

Взаимодействие с другими медицинскими продуктами

Не выявлено взаимодействия с другими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.



Производитель
Меркле ГмбХ
Граф-Арко-Штрассе 3
89079 Ульм,
Германия

Уполномоченный представитель в Российской Федерации:

ООО «Тева»
Лаболовка, д.10, стр.1, Москва
125049
Россия

Сертификация №: 002

let_isotonic_Baby_RU_v002_TW/09-2014
2 00 0013-01

/Штамп:

/Подпись/
ТЕВА Служба качества Германия;
Меркле ГмбХ;
Граф-Арко-Штрассе 3, 89079, Ульм, Германия/