

Руководство по эксплуатации катетеров самоудерживающих крупноголовчатых латексных однократного применения

Назначение

Катетеры предназначены для дренажа надлобкового свища при урологических операциях.

Эксплуатация

Перед применением катетеры должны пройти однократную стерилизацию по МУ 287-113, включающую дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию.

Дезинфекцию проводят методом кипячения в дистиллированной воде в течение (30 ± 5) мин., после этого изделие ополаскивают под проточной водой в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин.

Затем катетеры замачивают в моющем растворе, состоящем из 17 см³ раствора перекиси водорода, 5 г синтетических моющих средств и 978 см³ питьевой воды в течение (15 ± 5) мин. при температуре $(50 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

После замачивания катетеры моют в моющем растворе при помощи ватно-марлевого тампона в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин. и ополаскивают под проточной водой в течение (10 ± 1) мин., затем под дистиллированной водой в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин.

После предстерилизационной очистки катетеры подвергают химической или паровой стерилизации.

Химическую стерилизацию проводят в 6%-ном водном растворе перекиси водорода при температуре $(50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение (180 ± 5) мин или при температуре не менее 18°C в течение (360 ± 5) мин., после чего изделия должны быть промыты в стерильной воде.

Стерилизацию паровым методом проводят, поместив завернутое в марлю изделие, в среду насыщенного пара при температуре $(120 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение (45 ± 3) мин.

Хранение

Катетеры должны храниться в помещении при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 85% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Катетеры в процессе эксплуатации и хранения не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, света бактерицидных ламп, щелочей, кислот, масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Гарантийный срок годности катетеров – 2 года с даты изготовления.

Генеральный директор



Е.Т.Харламов