

ONE TOUCH® Ultra™

Контрольный раствор

Применение

Контрольный раствор OneTouch® Ultra™ предназначен для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови марки OneTouch® Ultra™ и OneTouch® Horizon™ для проверки работы прибора вместе с тест-полоской как единой системы, и для проверки правильности проведения процедуры анализа. Для получения правильных результатов анализов очень важно проводить проверки с контрольным раствором регулярно.

Краткое описание и пояснения

Контрольный раствор OneTouch® Ultra™ содержит известную концентрацию глюкозы, которая вступает в реакцию с тест-полосками OneTouch® Ultra™ (далее «тест-полосками»). Проверка с помощью контрольного раствора проводится так же, как и анализ крови, но вместо крови следует использовать контрольный раствор глюкозы OneTouch® Ultra™. Результаты проверки с использованием контрольного раствора должны входить в диапазон, указанный на флаконе с вашими тест-полосками.

ВНИМАНИЕ! Диапазон допустимых значений, указанный на флаконе с тест-полосками, относится только к контрольному раствору глюкозы. Раствор используется для проверки работы прибора вместе с тест-полоской. Эти значения не относятся к рекомендуемым результатам анализа крови.

Перед первым использованием прибора для определения уровня глюкозы в крови проведите проверку с контрольным раствором. Если при трех последовательных проверках полученные результаты входят в диапазон допустимых значений, можете приступить к проведению анализа крови. Проверку с контрольным раствором следует проводить:

- каждый раз, когда Вы открываете новую упаковку тест-полосок;
 - как минимум один раз в неделю;
 - при возникновении сомнений в правильности работы прибора;
 - если Ваши результаты не соответствуют самочувствию или Вы думаете, что получили неправильный результат;
 - если Вы уронили прибор.
- Каждая проверка с помощью контрольного раствора, давшей правильный результат, достаточно для подтверждения того, что прибор и тест-полоски функционируют нормально, а тест проведен правильно.

Химический состав

Контрольный раствор OneTouch® Ultra™ – это жидкость красного цвета, содержащая 0,11% D-глюкозы.

В растворе также содержится:

Ингредиент	Концентрация (%)
Бензоат натрия	0.2
Динатриевая соль ЭДТА	0.1
Красный краситель FD&C	0.2
Вязущее вещество	8.0

Предостережения

Контрольный раствор OneTouch® Ultra™ используется только для «ин-витро» диагностики. Это означает, что раствор используется только для проведения анализов **вне тела человека**.

Контрольный раствор предназначен для использования с системами OneTouch® Ultra™ и OneTouch® Horizon™. Не используйте другие контрольные растворы.

Проверяйте срок годности контрольного раствора, указанный на флаконе. **Не пользуйтесь просроченным контрольным раствором.**

Перед использованием интенсивно встряхните флакон с контрольным раствором. Удалите первую каплю контрольного раствора OneTouch® Ultra™ и промокните кончик флакона чистой салфеткой для последующего получения надлежащей капли и точного результата.

Срок хранения открытого флакона с контрольным раствором – три месяца. Запишите на флаконе с контрольным раствором дату, после которой им нельзя пользоваться (дата вскрытия плюс три месяца). **Не пользуйтесь раствором через три месяца после вскрытия флакона.**

Контрольные растворы не предназначены для приема внутрь.

Хранение и использование

Храните контрольный раствор при комнатной температуре не выше 30°C. Не хранить в холодильнике.

ВАЖНО: не используйте раствор через 90 дней после вскрытия флакона. Запишите на флаконе с контрольным раствором дату, после которой им нельзя пользоваться.

Процедура проверки:

Для проведения проверки с контрольным раствором OneTouch® Ultra™ следуйте указаниям, содержащимся в Инструкции по пользованию, прилагаемой к системе. Не забывайте соответствующим образом помечать полученные результаты проверок с контрольным раствором. Непомеченные результаты проверок будут расцениваться системой как результаты анализа крови. Дополнительная информация содержится в Инструкции по пользованию системой OneTouch® Ultra™ и системой OneTouch® Horizon™.

Неукоснительное соблюдение инструкций является залогом получения точных результатов. При проведении проверки с помощью контрольного раствора OneTouch® Ultra™ всегда придерживайтесь следующих технических рекомендаций:

1. При проведении анализа прибор, контрольный раствор и тест-полоски должны быть комнатной температуры (20-25°C).
2. Перед использованием флакон с контрольным раствором хорошо встряхнуть.
3. Удалить первую выдавленную каплю контрольного раствора.
4. Нанести каплю контрольного раствора на верхнюю часть тест-полоски.
(см. инструкцию к тест-полоскам.)

В каждом флаконе содержится достаточно раствора для проведения 75 проверок.

Ожидаемые результаты

При комнатной температуре контрольный раствор OneTouch® Ultra™ должен в 95% случаев давать результаты в пределах ожидаемого диапазона, указанного на флаконе с тест-полосками. Точность результатов также зависит от правильности выставленного кода в приборе, который должен совпадать с кодом, указанным на флаконе с тест-полосками.

Если результаты проверки с помощью контрольного раствора не входят в этот диапазон, повторите проверку.

Возможны следующие причины, по которым полученные результаты не входят в указанный диапазон:

- неправильно проведенная процедура проверки;
- просроченный или загрязненный контрольный раствор;
- поврежденная или просроченная тест-полоска;
- неполадка прибора;
- слишком теплый или слишком холодный контрольный раствор;
- использовалась первая капля раствора или кончик флакона был плохо вытерт;
- флакон с контрольным раствором плохо встряхнули.

Чтобы устранить возникшие проблемы, следуйте рекомендациям, приведенным в «Инструкции по пользованию».

При необходимости, обращайтесь на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53 (Москва); 8-800-200-83-53 (Россия).

ВАЖНО: Если полученные результаты проверки с контрольным раствором не входят в диапазон допустимых значений, система требует проверки. Не использовать систему для проведения анализа крови. При необходимости, обращайтесь на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53 (Москва); 8-800-200-83-53 (Россия).

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Нашей целью является обеспечение клиентов качественной медицинской продукцией и надежным обслуживанием. Если Вас не удовлетворяет качество продукта, или у Вас возникают дополнительные вопросы, позвоните по телефону "Горячей линии ЛайфСкэн": (095) 755-83-53 (Москва); 8-800-200-83-53 (Россия).



AW 06319602A



Мин

Н
«О госуд
юридич

23
(дата)

Инспек

Государств
инспектор