

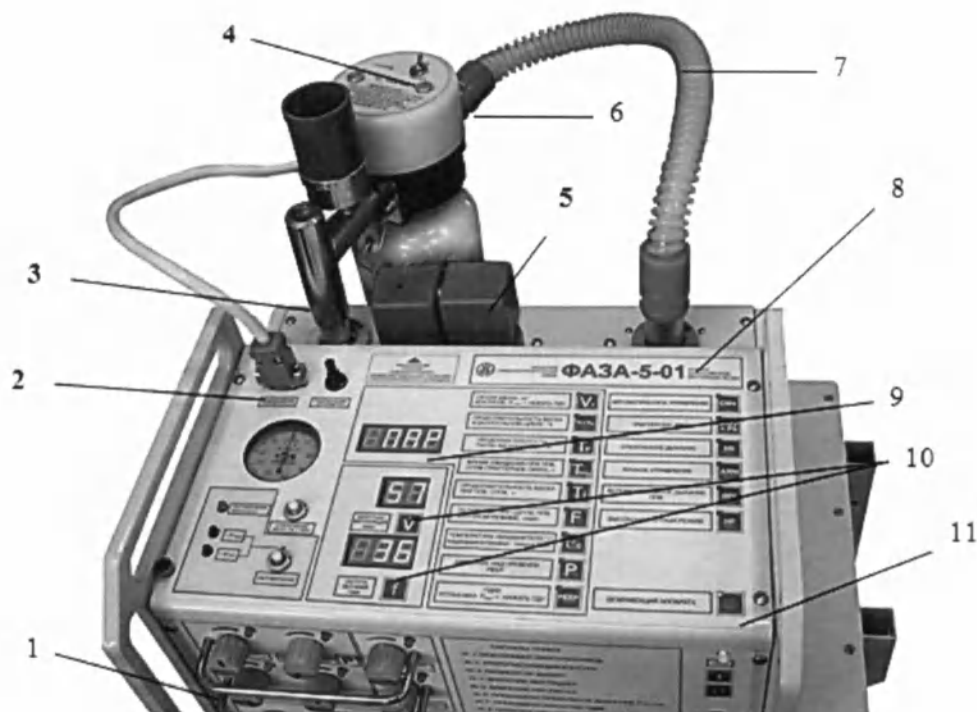


Рис. 21

Нажать кнопку включения аппарата и кнопку «ДЕЗИНФЕКЦИЯ АППАРАТА» (11) одновременно. При этом в верхнем индикаторном окне (9) загорятся символы «- -». Индикатор (1, рис 21 или 15, рис. 6), индицирующий включение нагрева увлажнителя, не должен гореть.

Нажать кнопку «ПРОТИВ СПОРООБРАЗУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ» на нижней панели аппарата (приподняв аппарат за левую ручку), при этом включится в работу воздуходувка, а в среднем и нижнем индикаторных окнах высветится время с обратным отсчётом (30-00 минут вне зависимости от нажатой кнопки).

После прекращения дезинфекции раздаётся звуковой сигнал, символы в верхнем индикаторном окне (9) «- - -» переходит в мигающий режим, индикаторы (10), показывающие отсчёт времени индицируют 00-00. При этом необходимо выключить аппарат, отсоединить увлажнитель от патрубка «ВЫПУСК», а магистраль переходную оставить на патрубках «ВДОХ» и «ВЫДОХ». После этого включить аппарат в режим «СПОНТАННОЕ ДЫХАНИЕ (SB)» на 30 минут для удаления паров хлоргексидина из магистралей аппарата.

Слить раствор хлоргексидина из увлажнителя, прополоскать банку дистиллированной водой.

## 10.2 Дезинфекция дыхательного контура паром.

Собрать дезинфекционный контур (см. рис.21).

Для этого установить увлажнитель в патрубок (3) «ВЫПУСК». Магистралью переходной (5) с отверстием для стравливания пара соединить патрубки «ВДОХ» и «ВЫДОХ». Соединить трубкой гофрированной (7) патрубок выхода увлажнителя (6) и патрубок (8) «СВЕЖИЙ ГАЗ» аппарата. Заполнить увлажнитель дистиллированной водой до верхней отметки на банке.

Подсоединить вилки на кабелях увлажнителя к розеткам аппарата (2) «Включение увлажнителя» на верхней панели и «Увлажнитель» на задней стенке.