

**ЧАШКА ПЕТРИ D 90 ММ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ,
ОДНОСЕКЦИОННАЯ, ОДНОРАЗОВАЯ, СТЕРИЛЬНАЯ**
ТУ 9464-001-30621840-2014

Назначение изделия:

Чашка Петри d 90 мм вентилируемая, односекционная, одноразовая, стерильная (далее - чашка Петри) предназначена для помещения внутрь чашки тканевой культуры на время инкубации, обработки и анализа, а также приспособлена для помещения внутрь лабораторных приборов и анализаторов.

Общие сведения:

Чашка Петри представляет собой невысокие цилиндры, закрытые крышкой такой же формы, чуть большего диаметра с вентиляционными опорами, предотвращающие плотное прилегание крышки к чашке и обеспечивающие доступ воздуха для обеспечения их вентиляции.

Чашка Петри изготавливается из материала, полистирол марки «STYRON 678E» фирмы «STYRON LLC», США.

Основные размеры чашки Петри: Вместимость - (75 – 5,0) мл

Наружный диаметр- D = (92 – 2,0) мм

Чашки Петри поставляются стерильными (стерилизуются радиационным методом) - пучком электронов дозой (15+5) кГр.

Противопоказания к применению.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

Меры безопасности:

Чашки Петри – предназначены для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять чашки Петри в случае нарушения целостности упаковки и по истечении среднего срока хранения.

Чашки Петри должны эксплуатироваться при температурах от минус 10 °С. до плюс 70°С.

Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

После применения чашки Петри утилизировать.

Вид поставки и маркировка на упаковке

Чашки Петри поставляются

- в индивидуальной упаковке, где каждое изделие упаковано в герметичный пакет.
- в групповой упаковке, где изделия упакованы в герметичный пакет по 5 шт, 10 шт, 20 шт., 35 шт.

Хранение:

Срок годности чашки Петри в потребительской упаковке предприятия-изготовителя должен быть: не менее 3 лет с момента стерилизации.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре 40 °С. - минус 50 °С. и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий).

Гарантийный срок – 3 года

Утилизация

Использованные изделия стерилизуются складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790=2010

Изготовитель:

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»

Адрес: г. Санкт-Петербург, проезд Макулатурный, д.3, литер Б

Телефон: +7(812)936-89-16, +7(812)958-05-53

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

