

Инструкция
по применению изделия медицинского назначения для потребителя

Название изделия медицинского назначения: *Обувь детская ортопедическая для профилактики и лечения функциональных нарушений стопы по ТУ 8826-001-11195202-2014.*

Состав и описание изделия **Обувь детская ортопедическая** малосложная выполнена из натуральной кожи, имеет одну специальную деталь – высокий жесткий берц из термогранитоля. Применение ортопедической обуви с высоким жестким берцем назначается врачом - ортопедом для восстановления функций деформированной стопы. Обувь производится в исполнении сапоги, ботинки, полуботинки, туфли, **сандалии**.

Область применения Обувь ортопедическая предназначена для детей с функциональным нарушением стопы: варусной, вальгусной постановкой стоп, плоскостопием.

Противопоказания Применение ортопедической обуви не показано детям с выраженными дефектами стопы, нарушениями кожных покровов стопы, при личной непереносимости контакта с материалами обуви.

Условия применения Обувь предназначена для повседневного ношения ребенком
- **сандалии, туфли** – в весенне-летний период при температуре окружающей среды от + 5°C до + 30 °C;

- **полуботинки, ботинки, сапоги** – в **осенне-зимний** период при температуре окружающей среды **от -20 °C до + 10 °C.**

Способ применения Ортопедической обувью необходимо пользоваться по прямому назначению. При подборе ортопедической обуви необходимо учитывать сезонность, размер и полноту. При надевании обуви рекомендуется использовать обувную ложку. Запрещается тянуть обувь за ремни, застежки, декоративную фурнитуру при надевании. Запрещается снимать обувь, наступая на задник.

Запрещается передавать ортопедическую обувь другим лицам, так как обувь применяется по назначению врача-ортопеда согласно анатомо-физиологическим особенностям и деформации стопы.

Необходимо ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре. Сушить обувь на обогревательных приборах строго запрещается. Необходимо регулярно чистить обувь, в зависимости от материалов, из которых изготовлена обувь, используя различные средства по уходу. Обувь из натуральной кожи, чистится волосяными щетками и губками, обувь из замши специальными щетками и резинками, обувь из искусственной кожи, текстильных и синтетических материалов влажной тканью. Нельзя использовать в уходе за обувью средства не предназначенные для этого.

Обувь, внутренние детали которой выполнены из кожи, рекомендуется обрабатывать раствором детского мыла по ГОСТ 28546 или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде с температурой не более 40 С, путем протирания внутренних деталей ватой или салфеткой, смоченной в растворе.

Возможные побочные действия медицинского изделия: не выявлены

Комплектность:

Обувь – одна пара.

Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Условия транспортирования транспортирование обуви может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения В сухом проветриваемом помещении, защищенном от влаги и солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре воздуха от 14 до 25 градусов С и относительной влажности от 50 до 80%. При длительном (сезонном) хранении рекомендуется помещать обувь в картонные коробки

или бумажные пакеты, предварительно набив внутрь обуви сухую бумагу.

Утилизация обуви производится с бытовыми отходами.

Гарантии изготовителя изготовитель гарантирует соответствие обуви установленным требованиям, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на подошву из резины, термоэластопласта – 70 дней;

- на остальные детали обуви – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей»

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок службы обуви – не менее шести месяцев.

Срок хранения – один год.

Адрес производства медицинского изделия: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Налбандяна, 63, литер Б

Адрес уполномоченного представителя производителя медицинского изделия, на который могут быть направлены претензии по качеству обуви, замечания и пожелания: 399059, г. Грязи, ул. Коммунальная, д.11/5, тел. 8 (960) 143-74-86 , e-mail: gormed2012@yandex/ru .

В данной редакции прошито,
пронумеровано и скреплено

печатью

лист 2 а

подпись

