

ОКП 93 9800

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЦСРМИ»



Ф. Зубарев
2010 г.


Инструкция по применению

**Контейнеры для разделения, хранения и транспортировки компонентов
крови TACSI PL KIT**

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ Р 50444-92
и технической документации изготовителя

2010

TACSI™ KIT

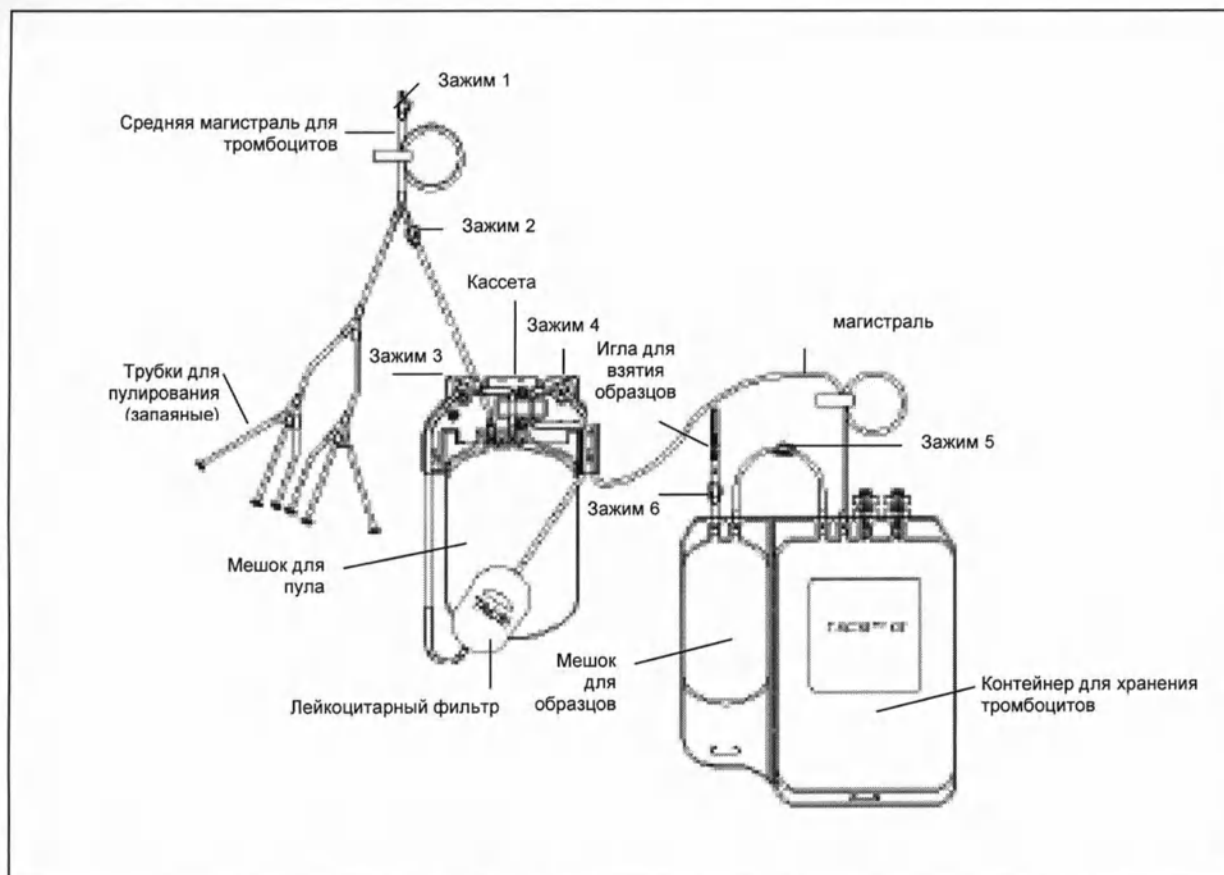

Апирогенно внутри изделия



Не использовать, если изделие, его стерильный барьер или упаковка повреждены или имеют следы износа.



Не продувать



Контейнер для хранения тромбоцитов



Номинальный объем контейнера



Содержимое

TACSI является зарегистрированным товарным знаком TERUMO CORPORATION в Европейском Союзе.

TERUMO®



TERUMO EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium

CE 0197

06/2009 LC-XXXX

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

- Комплект TACSI предназначен для использования с автоматизированным аппаратом TACSI производства корпорации TERUMO.
- Комплект можно использовать для пулирования до шести доз ЛТС. Он снабжен кассетой, фильтром для удаления лейкоцитов, встроенным мешком для хранения тромбоцитов, в котором тромбоциты можно хранить при температуре 22 ± 2 °C при постоянном помешивании до семи дней, а также иглой для многократного отбора проб для контроля качества (кк).
- Стерилизовано оксидом этилена. Стерильность гарантирована только если упаковка не была открыта или повреждена.
- Апиrogenно внутри изделия

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для одноразового использования. Не использовать повторно. Не стерилизовать повторно.
- Не использовать, если изделие или упаковка его компонентов повреждены или имеют следы износа.
- После использования все компоненты комплекта следует утилизировать безопасным способом в соответствии с процедурами утилизации, действующими в вашем лечебном учреждении.
- Хранить неиспользованные упаковки с комплектами при температуре от 0 °C до 35 °C.
- Перед использованием дождитесь, пока комплект TACSI нагреется до комнатной температуры.
- Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Процедура пулирования

1. Откройте упаковку, сняв защитное покрытие, захватив его за специальный уголок. Извлеките комплект TACSI.
2. Перекройте зажим 1 и 2 и зажимы на кассете (зажим 3 и 4).
3. С помощью аппаратов для стерильного соединения магистралей соедините мешок с плазмой/дополнительным раствором с магистралью для тромбоцитов, а мешки с ЛТС с трубками для пулирования. Придерживайтесь инструкций производителя аппаратов для стерильного соединения магистралей.
4. Подвесьте мешки с ЛТС и мешок с плазмой/дополнительным раствором, а мешок для пула положите на стол (Рис. 2).
5. Откройте зажим 2, чтобы ЛТС попали в мешок для пулирования.

2. Процедура промывки

6. Закройте зажим 2. Откройте зажим 1, чтобы перелить плазму/дополнительный раствор в мешки для ЛТС. Тщательно промойте мешки для ЛТС. Затем откройте зажим 2, чтобы перелить содержимое в мешок для пулирования.
7. После сбора и промывания сожмите мешок для пула, чтобы выдавить воздух в пустые мешки для ЛТС, герметично перекройте трубку на расстоянии 5 см от узла мешка для пула с кассетой и утилизируйте пустые мешки из-под ЛТС (Рис. 3).
8. Перекройте зажимы 5 и 6.

3. Осадок, сепарация и фильтрация с помощью TACSI.

9. Монтаж комплектов с помощью системы TACSI, а также установка параметров процесса описаны в инструкции к устройству TACSI.
10. После завершения процесса извлеките комплект из устройства TACSI. Зажимы на кассете должны быть закрыты.
11. Запаяйте магистраль между мешком для хранения тромбоцитов и узлом кассеты. Утилизируйте использованный фильтр и узел сборного пакета с кассетой (Рис. 4).

4. Процедуры удаления воздуха из мешка для хранения тромбоцитов и сбора образцов для контроля качества

12. Встряхните мешок с тромбоконцентратом для равномерного распределения тромбоцитов.
13. Слегка наклоните мешок, чтобы воздух собрался в том углу мешка, который ближе к мешку для сбора образцов.
14. Откройте зажим 5 и слегка надавите на мешок с тромбоцитами, чтобы переместить остатки воздуха и желаемый объем тромбоцитов в мешок для отбора образцов (Рис. 5). Перекройте зажим 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: если сбора образца тромбоцитов не требуется, перекройте зажим 5 после того, как из мешка с тромбоцитами будет удален весь воздух.

15. Запаяйте магистраль между мешком с тромбоцитами и мешком для сбора образцов.
16. Отделите мешок для сбора образцов от мешка с тромбоцитами.
17. Чтобы получить образец тромбоцитов для бактериологического и (или) другого анализа, снимите вращательным движением защиту с иглы для многократного сбора. Подсоедините иглу к держателю VENOSAFE™ (резьбовое соединение) и возьмите образец тромбоцитов с помощью вакуумных пробирок для сбора крови VENOSAFE™ (Рис. 6).
18. Откройте зажим 6 перед сбором образца.

ВНИМАНИЕ для бактериологического анализа образец следует получать в условиях ламинарного потока.

19. Для предотвращения разбрызгивания компонентов крови, перекройте зажим 6 после получения образца.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО.
ПРОЦЕДУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТА (ОВ)

