

«Утверждаю»
Генеральный
Директор ООО «Стоматорг»
Э.Х. Девлетбаева



дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Материал стоматологический оттискной поливинилсилоксановый Betasil»

наименование изделия медицинского назначения

Соответствует требованиям национальных стандартов

Инструкции

Betasil light fast set

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, текучий материал.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Цвет-розовый

Время схватывания- 1 минута.

Время окончательной готовности массы для снятия слепка- 1 минута

Конечная жесткость- Shore A35

Обладает мятым вкусом

Betasil vario light

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, чрезвычайно текучий.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Время схватывания - варьируется до 2 минут. Материал схватывается, при внесении в рот, если же не вносить гот.массу в рот, мат-л начинает твердеть через 2 минуты.

Время выдерживания во рту – 2 минуты

Общее время затвердевания – от 2 до 4 минут

Деформация под давлением – 3 %

Восстановление после деформации – 99,6 %

Линейное изменение размеров – 0,16 %

Обладает мятым вкусом

Смешивается автоматически (Пистолет)

Betasil vario medium

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, средней текучести.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Цвет-сиреневый

Время схватывания - варьируется до 2 минут. Материал схватывается, при внесении в рот, если же не вносить гот.массу в рот, мат-л начинает твердеть через 2 минуты.

Время выдерживания во рту – 2 минуты

Общее время затвердевания – от 2 до 4 минут

Деформация под давлением – 2 %

Восстановление после деформации – 99,6 %

Линейное изменение размеров – 0,13 %

Обладает мятым вкусом

Смешивается автоматически (Пистолет)

Инструкции

Betasil light fast set

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, текучий материал.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Цвет-розовый

Время схватывания- 1 минута.

Время окончательной готовности массы для снятия слепка- 1 минута

Конечная жесткость- Shore A35

Обладает мятным вкусом

Betasil vario light

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, чрезвычайно текучий.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Время схватывания - варьируется до 2 минут. Материал схватывается, при внесении в рот, если же не вносить гот.массу в рот, мат-л начинает твердеть через 2 минуты.

Время выдерживания во рту – 2 минуты

Общее время затвердевания – от 2 до 4 минут

Деформация под давлением – 3 %

Восстановление после деформации – 99,6 %

Линейное изменение размеров – 0,16 %

Обладает мятным вкусом

Смешивается автоматически (Пистолет)

Betasil vario medium

Корректирующий слой, с низкой вязкостью, средней текучести.

Гидрофильный материал b

с тиксотропными свойствами для слепков высокой точности. Эластичен, не течет во время схватывания, до извлечения слепка изо рта.

Цвет-сиреневый

Время схватывания - варьируется до 2 минут. Материал схватывается, при внесении в рот, если же не вносить гот.массу в рот, мат-л начинает твердеть через 2 минуты.

Время выдерживания во рту – 2 минуты

Общее время затвердевания – от 2 до 4 минут

Деформация под давлением – 2 %

Восстановление после деформации – 99,6 %

Линейное изменение размеров – 0,13 %

Обладает мятным вкусом

Смешивается автоматически (Пистолет)

Инструкция по эксплуатации

Betasil vario putty soft (синий)

Соответствует нормам ИСО 4823

Высоковязкий поливинилсилоксановый материал для однофазных и/или двухфазных техник снятия слепков, ложечный материал.

Время замешивания руками около 30 секунд

Продолжительность пребывания во рту 2 минуты

Время схватывания варьируется, в зависимости от температуры, при внесении в ротовую полость готовой массы моментально начинает схватываться, но масса не схватывается в течение 2 минут, если не вносить её в ротовую полость.

Применение: Мягкой консистенции

Дозировка: база/катализатор 1:1

Конечная жесткость: А 60

Обладает мятным вкусом

Защита от деформации: 99,4%

Усадка при давлении: 2%

*при комнатной температуре в 23 С, относительной влажности воздуха 50-55%, более высокие температуры сокращают, а более низкие температуры увеличивают указанное время.

Технология смешивания: База и корректирующий слой смешиваются в пропорции 1:1, руками до получения однородной массы, синего цвета.

ВАЖНО!

-При смешивании не использовать перчаток из латекса

-Банки емкости сразу после использования снова плотно закрыть

-Не менять дозировочные ложки и пробки

Переработка, применение и использование поставленных нами продуктов находится полностью на Вашей ответственности в виду того, что мы не имеем никакой возможности контроля. После того как нами была осуществлена консультация по техническому использованию, будь то устно, письменно или экспериментально, эта консультация рассматривается как необязательное указание также в отношении различных защитных прав третьих лиц.

Этим вы не освобождаетесь от собственной проверки поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей и технологий.

Наша ответственность ограничивается в любом случае и для любого ущерба стоимостью поставленного и использованного Вами товара.

Безупречное качество наших продуктов гарантируется в соответствии с нашими общими условиями заключения сделки.