

КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ


VIVO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

VIVO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

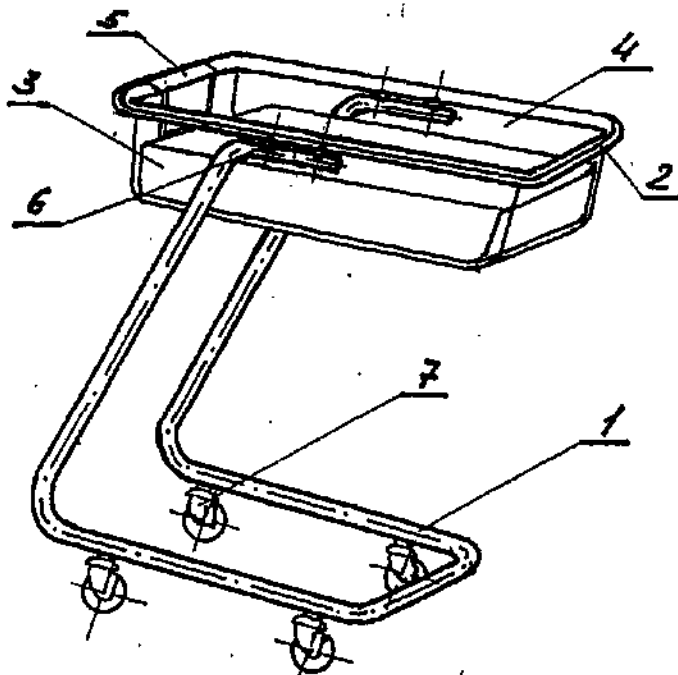

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

длина основания	- 740 мм
длина ванночки	- 734 мм
ширина ванночки	- 464 мм
высота	- 920 мм
масса	- 8,5 кг
допустимая нагрузка	- 15 кг

Изготовитель: STOLTER SP. ZO.O.,
Grubno 63, 86-212 Stolno, ПОЛЬША
Тел. +48 56 677 14 01
Факс: +48 56 677 14 10
e-mail: stolter@stolter-stolno.pl

ПРИМЕНЕНИЕ

Кроватка для новорожденных VIVO применяется в родильных отделениях учреждений здравоохранения и применяется для перевозки новорожденных.

КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Кроватка для новорожденных имеет постоянную высоту. Ее основными элементами являются:

- каркас основания /1/, изготовлен из стальных труб, гнутый и покрытый печным лаком,
- рама комплектная /2/ и подпорка /5/, изготовлены из стальных труб и прутка покрытых никелево-хромовым покрытием,
- ванночка /4/, изготовлена из прозрачного плексигласа и наложена свободно на комплектную раму /2/.

Рамка комплектная соединена с каркасом с помощью винтов через дистанционные втулки /6/. Ходовые колеса /7/ укреплены в основании каркаса с помощью резьбы. Матрац /3/ изготовлен из полиуретановой пенки и обшит обивочной тканью (порофлексом). Он вкладывается свободно в ванночку.


КОНСЕРВАЦИЯ

Перед эксплуатацией законсервированные металлические части следует протереть чистой сухой тряпкой.

Во время эксплуатации для удержания чистоты и стерильности кроватки следует применять моющие средства, употребляемые для этой цели в учреждениях здравоохранения.

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА JUNIOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

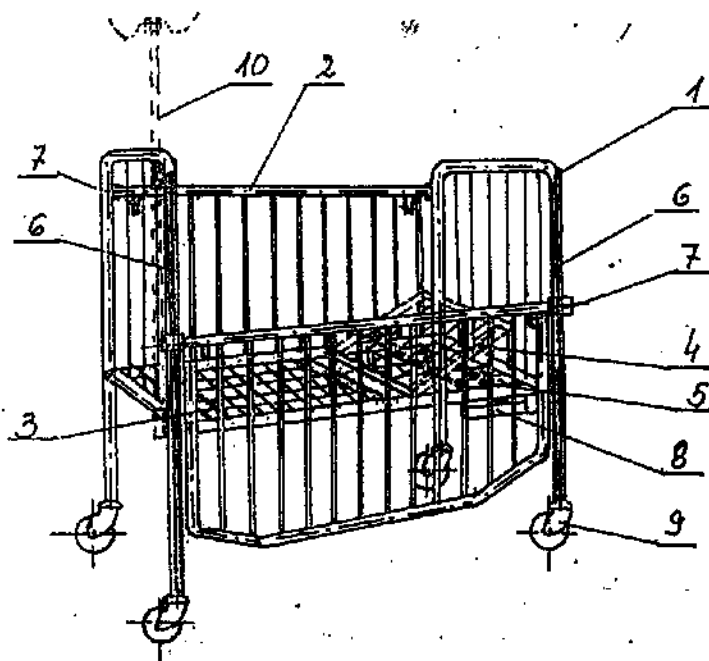

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

длина	- 1450 мм
ширина	- 765 мм
высота	- 1480 мм
высота места для лежания	- 550 мм
регулировка высоты ограждения	- 915÷1410 мм
регулировка угла наклона изголовья	-
масса	- кг
допустимая нагрузка	- 60 кг

Изготовитель: STOLTER SP. ZO.O.,
Grubno 63, 86-212 Stolno, ПОЛЬША
Тел. +48 56 677 14 01
Факс: +48 56 677 14 10
e-mail: stolter@stolter-stolno.pl

ПРИМЕНЕНИЕ

Кроватка Junior предназначена для оборудования детских отделений больниц.

КОНСТРУКЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроватка Junior изготовлена из стальных труб, прутков и профилей покрытых печным лаком. Она разборная и состоит со следующих элементов: торец комплектный /1/, ограждение /2/, рама комплектная /3/, изголовье /4/, рамка /5/, направляющий пруток /6/, рычаг защелки /7/, гребенка /8/, ходовые колеса /9/.

Заголовок можно устанавливать под соответствующим углом скачкообразно с помощью рамки /5/ и гребенки /8/, прикрепленной к несущей раме. Ограждения можно опускать и поднимать скачкообразно с помощью направляющего прутка /6/ и пружинной защелки /7/. При опускании защелки с обеих сторон ограждения следует переместить во внутрь и затем опускать ограждение вниз на соответствующую высоту. При подъеме ограждения нет необходимости перемещать защелки.

Дополнительное оборудование:


1. Вешалка для капельных вливаний /10/ - К-02
4. Матрац - М-04

КОНСЕРВАЦИЯ

Для удержания чистоты и стерильности кровати следует применять моющие средства, употребляемые для этой цели в учреждениях здравоохранения. Консервация стола заключается в основном в систематическом осмотре оборудования и затягивании всех резьбовых соединений.

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА JUNIOR PLUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

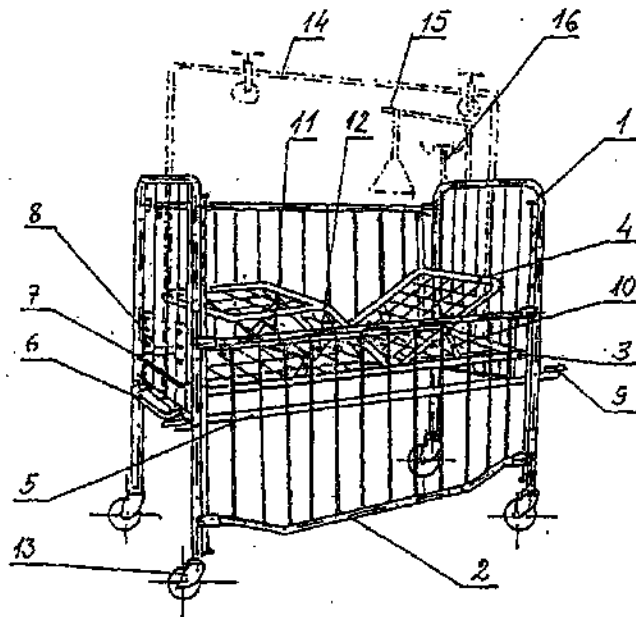

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

длина	- 1640 мм
ширина	- 765 мм
высота	- 1480 мм
высота места для лежания	- 550 мм
регулировка высоты ограждения	- 915÷1410 мм
регулировка угла наклона места для лежания	- 0°÷6°
регулировка угла наклона 3*-сегментного места для лежания:	
а) спинка	- 70°
б) средний сегмент	- 45°
масса	- кг
допустимая нагрузка	- 60 кг

Изготовитель: STOLTER SP. ZO.O.,
Grubno 63, 86-212 Stolno, ПОЛЬША
Тел. +48 56 677 14 01
Факс: +48 56 677 14 10
e-mail: stolter@stolter-stolno.pl

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровать JUNIOR PLUS предназначена для оборудования больничных детских ортопедических отделений.

КОНСТРУКЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кровать изготовлена из стальных труб, прутков и профилей покрытых печным лаком. Она разборная и состоит со следующих элементов: торцевой комплектный /1/, ограждение /2/, место для лежания комплектное /3/, несущая рама /5/, 3^х - сегментное место для лежания /4/ (дополнительное оборудование). Основное место для лежания /3/ можно устанавливать под углом скачкообразно до положения Транделенбурга и анти-Транделенбурга. Регулировка осуществляется с помощью соединения места для лежания посредством рамки /7/, повешенной на гребенке /8/. Трехсегментное место для лежания /4/, укрепленное на раме основного места для лежания /1/, имеет возможность установки отдельных сегментов под любым углом с помощью подпорок /10, 11, 12/. Ограждение /2/ установлено на направляющем прутке, укрепленном на ноге торца /1/. Его можно скачкообразно опускать и поднимать вверх с помощью пружинных защелок. При опускании ограждения защелки с обеих сторон ограждения следует переместить во внутрь и затем опускать ограждение вниз. В качестве упоров использованы 4 колеса, укрепленные на кронштейнах /9/. Прикрепленный к раме держатель /6/ служит для вождения кровати. Ходовую систему составляют 4 орбитальных колеса /13/.

Кровать может быть оснащена дополнительным оборудованием:

1. Вытяжная рама /14/ - W-03
2. Консоль с держателем для руки /15/ - W-02
3. Вешалка для капельных вливаний /16/ - K-02
4. Матрац состоящий из трех частей - M-05
5. Трехсегментное место для лежания /4/ - L-01

К оборудованию прилагаются дополнительно элементы для крепления.

КОНСЕРВАЦИЯ

Для удержания чистоты и стерильности кровати следует применять моющие средства, употребляемые для этой цели в учреждениях здравоохранения. Консервация стола заключается в основном в систематическом осмотре оборудования и затягивании всех резьбовых соединений.