

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «КонваТек»
Игорь О.А.
2012 г.
М.п.



ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения:

Очиститель для кожи КонваТек Нилтак (ConvaTec Niltac) для безболезненного удаления адгезивов (салфетки, спрей)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Очиститель для кожи КонваТек Нилтак (ConvaTec Niltac) для безболезненного удаления адгезивов (салфетки, спрей) предназначен для быстрого и безболезненного удаления медицинских адгезивных изделий для стомированных пациентов и пациентов с недержанием, различных медицинских повязок (раневых покрытий) с адгезивными компонентами и фиксирующих.

Данная инструкция распространяется на формы выпуска спрей, салфетки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска - спрей:

Объем баллончика 50 мл

Форма выпуска - салфетки:

Кол-во в упаковке, шт. – 30

Размер салфетки, мм – 120x160

Номинальное содержание средства на 1 салфетку – 3г

СОСТАВ

Форма выпуска - спрей:

Гексаметилдисилоксан (Hexamethyldisiloxane 0.65cst CAS No 107-46-0)

Декаметилциклопента-силоксан (Decamethylcyclopenta-siloxane CAS No 541-02-06)

Пропеллент (HFC 134a)

Форма выпуска - салфетки:

Гексаметилдисилоксан (Hexamethyldisiloxane 0.65cst CAS No 107-46-0)

Октаметилдисилоксан (Octamethyldisiloxane CAS No 107-51-7)

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Форма выпуска: спрей.

- Распылите очиститель для кожи ConvaTec Niltac™ по краю адгезива (клеевого покрытия) и подождите несколько секунд.
- Аккуратно удалите адгезив с кожи. При необходимости нанесите дополнительное количество средства для облегчения удаления адгезива.
Очиститель для кожи ConvaTec Niltac™ высыхает спустя несколько секунд и не препятствует последующей надежной адгезии средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.
- ConvaTec Niltac™ можно распылять, перевернув аэрозоль; при этом избегайте длительного использования в горизонтальном положении, чтобы обеспечить наличие распыляющего вещества до полного использования содержимого.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте, следуя инструкции.
- Не используйте на нежных или чувствительных участках кожи (глаза, рот, уши, нос, влажные)
- Протестируйте очиститель на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии раздражения.
- При возникновении раздражения прекратите использование средства.
- Избегайте непосредственного вдыхания средства.
- Не курите во время использования.

Форма выпуска: салфетки.

- Надорвите пакетик и разверните салфетку.
- Удалите салфеткой остатки адгезива.
ConvaTec Niltac™ высыхает за несколько секунд, очищая поверхность кожи. В дальнейшем не препятствует последующей надежной адгезии средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте, следуя инструкции.
- Не используйте на нежных или чувствительных участках кожи (глаза, рот, уши, нос, влажные)
- Протестируйте средство на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии раздражения.
- При возникновении раздражения прекратите использование средства.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Флакон находится под давлением. Защищайте от солнечных лучей и не подвергайте воздействию температур выше 50°C. Не прокалывайте и не сжигайте флакон даже после использования. Не распыляйте вблизи открытого огня или какого-либо раскаленного материала. Храните в недоступном для детей и животных месте. Легко воспламеняется.

Срок хранения изделия: 4 года.



Всего 3 листа, прошнуровано,
3 скреплено печатью
листа (ов)

