

8

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Медэксперт»



Е.Е. Дмитриев

Инструкция пользователя

изделия медицинского назначения:

«Средство абсорбирующее DIAMOND для стомированных больных»

Описание

Пакет-саше с гелеобразующим материалом высокой абсорбирующей способности

Предполагаемые сферы применения

Средство абсорбирующее DIAMOND для стомированных больных специально разработан для преобразования в гель содержимого мешка илеостомии.

Средство абсорбирующее DIAMOND содержит систему дезодорирования ActiveOne™ - испытанное средство для уменьшения и, в частых случаях, полного удаления нежелательных запахов и «вздутия» (чрезмерного скопления газов).

Инструкции по применению:

1 - Разместить один полный пакет-саше в ваш мешок. Пакет-саше не вскрывать.

2 - Очистить и вынуть содержимое мешка как обычно.

После завершения очистки допускается использовать дополнительные пакеты-саше через выпускное отверстие в мешке.

Внимание:

Полученный в результате состав может иметь более темную окраску по сравнению с обычной и/или может содержать черные частицы. Это является визуальным показателем действия системы дезодорирования ActiveOne™. Если требуется контролировать цвет состава, временно прекратить использование системы.

Предупреждение:

ХРАНИТЬ ВНЕ ДОСТУПНОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. НЕ ГЛОТАТЬ.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ЧИСТОЙ ВОДОЙ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте.

Изготовлено в Великобритании: Trio Healthcare Ltd, Skipton, BD23 3AE, UK. Tel: +44 (0) 1756 700599