


«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛ

ООО «Полимертест» СПб

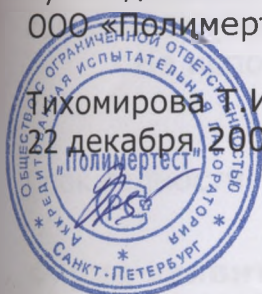


Тихомирова Т. И.

22 декабря 2007 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Самарин»

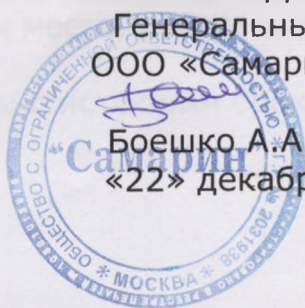

Боешко А.А.

«22» декабря 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

презервативы гладкие, текстурированные, ребристые, ароматизированные и не ароматизированные

НАЗНАЧЕНИЕ:

применяется в домашних условиях как гигиеническое средство индивидуального назначения для профилактики венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Для эффективного пользования презервативом, рекомендуется соблюдать следующее:

- Осторожно достаньте презерватив, вытянув его из индивидуального пакетика из фольги, при этом следите за тем, чтобы не повредить презерватив острыми или режущими предметами (например, ногтями, кольцами и т.п.)

- Сдавите закругленный конец презерватива (резервуар) большим и указательным пальцами для того, чтобы выдавить воздух, так как наличие воздуха влияет на чувствительность пениса.

Разверните презерватив в длину на расстояние в 1-2 см

- Презерватив следует надевать на пенис перед каждым половым актом

- Полностью оденьте презерватив на пенис в состоянии эрекции

- Прекратите все контакты после эякуляции

- В момент извлечения, придержите край презерватива руками, чтобы не допустить вытекания спермы из презерватива

- Отложите презерватив в сторону до окончания эрекции и избегайте контактов между пенисом, использованным презервативом и женскими половыми органами.

- Чтобы полностью избежать риска заражения венерическими заболеваниями, пенис и женские половые органы следует тщательно помыть сразу после каждого полового контакта.

- После использования заверните презерватив в бумагу и выбросите

- Используйте новый презерватив при каждом половом акте