

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ИЛ
ООО «Полимертест» СПб



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Самарин»

Боешко А.А.
«22» декабря 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

презервативы гладкие, текстурированные, ребристые, ароматизированные и не ароматизированные

НАЗНАЧЕНИЕ:

применяется в домашних условиях как гигиеническое средство индивидуального назначения для профилактики венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Для эффективного пользования презервативом, рекомендуется соблюдать следующее:

- Осторожно достаньте презерватив, вытянув его из индивидуального пакетика из фольги, при этом следите за тем, чтобы не повредить презерватив острыми или режущими предметами (например, ногтями, кольцами и т.п.)

- Сдавите закругленный конец презерватива (резервуар) большим и указательным пальцами для того, чтобы выдавить воздух, так как наличие воздуха влияет на чувствительность пениса.

Разверните презерватив в длину на расстояние в 1-2 см

- Презерватив следует надевать на пенис перед каждым половым актом

- Полностью оденьте презерватив на пенис в состоянии эрекции

- Прекратите все контакты после эякуляции

- В момент извлечения, придержите край презерватива руками, чтобы не допустить вытекания спермы из презерватива

- Отложите презерватив в сторону до окончания эрекции и избегайте контактов между пенисом, использованным презервативом и женскими половыми органами.

- Чтобы полностью избежать риска заражения венерическими заболеваниями, пенис и женские половые органы следует тщательно помыть сразу после каждого полового контакта.

- После использования заверните презерватив в бумагу и выбросите

- Используйте новый презерватив при каждом половом акте

- При использовании в качестве противозачаточного средства рекомендуется воспользоваться средствами, разрушающими сперматозоиды, чтобы усилить действие презерватива.

- Хранить в сухом и прохладном месте, избегать действие солнечных лучей

- Не использовать презервативы с истекшим сроком годности

Срок годности: Пять лет

Фирма-заявитель: ООО «Самарин»,
Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 37/51, корп.1

Фирма-производитель:
*Jinzhou Songpu Latex Co. Ltd, №1, NEW AND HIGH-TECH DEVELOPMENT
ZONE 121000, JINZHOU, LIAONING PROVINCE, CHINA*

«Jinzhou Songpu Latex Co. Ltd» имеет Сертификат качества ISO 9001:2000 на проектирование, производство и дистрибуцию изделий.

В КНР изделия проходят соответствующий контроль, испытания производятся в Отделе Контроля Качества контрольной лаборатории.