

Общество с ограниченной ответственностью «Спецдеталь»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Спецдеталь»

Перелыгин А.В.

_____ 2018 г.

Инструкция по применению на медицинское изделие

БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ

ТУ 9393-004-88976097-2008

2018 год

Собственность ООО «Спецдеталь»:

Не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Содержание

1. Описание медицинского изделия.....	3
2. Показания к применению.....	3
3. Противопоказания к применению.....	3
4. Инструкция по применению.....	3
5. Условия хранения.....	4
6. Срок годности.....	4

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты представляют собой полосы медицинской марли определенной ширины, с закрепленным на ней гипсом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Иммобилизация переломов; иммобилизация патологически измененных костей и суставов; коррекция деформаций; профилактика деформаций; безотлагательное гипсование; иные случаи, когда требуются фиксирующие повязки/

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повреждение крупных сосудов, в том числе после перевязки сосудов до выяснения жизнеспособности конечности; инфекционные осложнения огнестрельной или послеоперационной раны (анаэробная инфекция, флегмона, гнойные затеки); обширный глубокий ожог или отморожение; гангрена конечности на почве повреждения сосудов; значительный отек конечности, флебиты и тромбофлебиты всей конечности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Накладывать гипсовый бинт рекомендуется в медицинских перчатках.



2. Следует вскрыть упаковку и изъять бинт из упаковки.



3. Бинт замочить в воде под углом 45° к уровню воды до окончания появления пузырьков воздуха. Время погружения в воду 5 секунд. Если для наложения повязки требуется больше одного бинта, то мочить бинты следует по одному.



4. Вынуть бинт из воды и отжать излишек воды руками, нажимая мягко на концы рулона по направлению к середине. Не допустимым является оставлять повязку в воде!



5. Накладывайте бинт непрерывно, не выпуская из рук. Процесс наложения должен быть закончен до начала схватывания гипсовой композиции.
6. После окончания процесса моделирования потребуется 2-4 минуты (БСХ) или 5-10 минут (типовые) для схватывания, таким образом, иммобилизирующая повязка должна быть корректно смоделирована в этот период. Пациент не должен нагружать гипсовую повязку до 30 минут, от этого зависит результат наложения повязки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бинты в упаковке завода изготовителя должны храниться на складах изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов.

Директор ООО «Спецдеталь» А.В. Перелыгин А.В.

