


Руководство по эксплуатации
Иглы фистульные

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «ФАРМАЦЕВТ»

«  » _____ А.Ю. Строкач
2010 г.

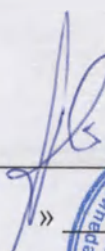


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Иглы фистульные для гемодиализа, модели 15G, 16G, 17G
(артериальные, венозные),
производства Bioteque Corporation, Китай, Тайвань**

Руководство по эксплуатации иглы фистульной

Назначение:

Предназначена для проведения процедуры гемодиализа. Обеспечивает доступ к сосудистому руслу пациента, создавая замкнутый экстракорпоральный контур крови.

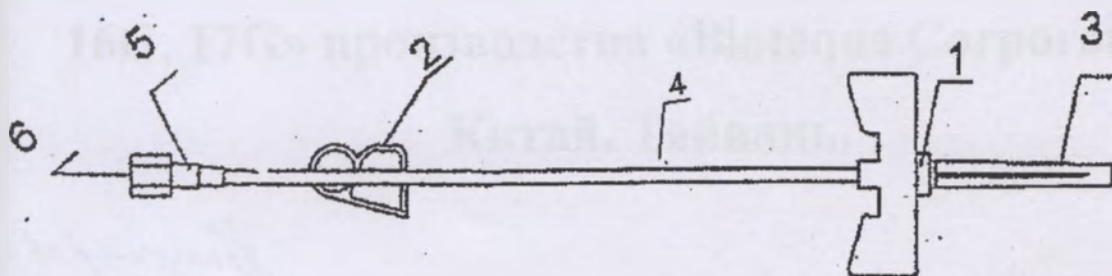

1. Наконечник иглы фистульной.
2. Зажим.
- 3, 6. Колпачок защитный.
4. Трубка соединительная.
5. Коннектор

Внимание!

- Соблюдать правила асептики.
- Не применять при загрязнении и нарушении целостности потребительской тары.
- Однократного применения.
- Повторной стерилизации не подлежит.
- Беречь от влаги и высоких температур.
- Выдержать не менее 24 часов при нормальных климатических условиях после транспортировки в условиях отрицательных температур.
- Утилизировать после использования.

Порядок применения:

1. Закрывать зажим. (2).
2. Удалить колпачок защитный (3) с наконечником иглы фистульной (1).
3. Ввести наконечник иглы фистульной (1) в вену или фистулу пациента.
4. Закрепить ее пластырем или бинтом на руке пациента.
5. Открыть зажим (2) заполнить магистраль кровью.
6. Закрывать зажим (2)
7. Снять с коннектора (5) защитный колпачок (6).
8. Подсоединить коннектор (5) к основной магистрали.
9. Открыть зажим (2), провести процедуру гемодиализа.
10. Закрывать зажим (2).
14. Удалить наконечник фистульной иглы (1) из вены пациента.

Уполномоченный по контролю

за качеством

лекарств

Свердловской области

Исходящий № _____ от _____ 20__ г.



Григорьев
И.И. Григорьев
1 место

