

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»

О.И. Шабров

2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Гели-смазки для предупреждения повреждения
слизистых оболочек и кожных покровов
производства: KAREX INDUSTRIES SDN. BHD., Малайзия»
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Назначение

Гель-смазка имитирует естественную вагинальную смазку, оказывает увлажняющее действие, устраняет неприятные и болезненные ощущения во время полового акта.

Гель-смазка предотвращает раздражение наружных половых органов, прекрасно восполняет недостаток естественной вагинальной смазки, устраняет дискомфорт при сухости слизистых оболочек влагалища и тем самым препятствует повреждению эпителия. Ее могут использовать женщины, у которых нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования, это может происходить в период менопаузы после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм).

Гель-смазка поможет избавиться от чувства дискомфорта при половом акте и наладит вашу интимную жизнь.

2. Основные характеристики

Гель-смазка не наносит вреда здоровью и не представляет опасности для пользователя при правильном ее применении.

Основные характеристики геля-смазки:

- объем – 5, 30, 50, 60, 100, 125 мл;
- внешний вид – однородная гелеобразная масса без посторонних примесей;
- цвет – бесцветный (прозрачный);
- запах – нейтральный (неприятный запах отсутствует);
- плотность – 1,1600 г/мл;
- вязкость – 1900 мПа;
- водородный показатель pH – 5,5;
- массовая доля сухого вещества – 2,2%;
- объемная доля этилового спирта – отсутствует;
- массовая доля суммы тяжелых металлов – менее 1 мкг/кг;
- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) – менее 10^3 (КОЕ/г);
- дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы – отсутствуют;
- наличие бактерий: Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus – отсутствуют;
- термостабильность – стабилен.

Основные характеристики геля-смазки не меняются в течение всего срока годности.

Гель-смазка совместима с презервативами и любыми изделиями из натурального латекса, легко смывается водой и не пачкает белье. Без красителей, не токсична и не вызывает аллергии. Гель-смазка не содержит

своем составе спирта, имеет нейтральный показатель pH и не вызывает раздражения.

Состав геля-смазки: вода, этоксидигликоль, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, полисорбат-20, метилхлороизолинон, лимонная кислота.

Входящие в состав геля-смазки ингредиенты являются безопасным как для людей, так и для экологии.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость ингредиентов, входящих в состав геля.

4. Подготовка к работе

Перед применением геля-смазки необходимо убедиться, что срок годности не истек, вымыть руки с мылом и вскрыть упаковку. Изделие готово к использованию.

5. Порядок работы изделия

Перед осуществлением полового акта необходимо нанести небольшое количество геля на половые органы и/или презерватив. Частота применения геля и количество определяется самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей организма.

Гель-смазка совместима с презервативами и любыми изделиями из натурального латекса, легко смывается водой и не пачкает белье.

6. Правила хранения и использования

В случае возникновения дискомфорта, следует прекратить использование геля-смазки и обратиться к врачу. Не допускать попадания геля-смазки в глаза, если контакт все же произошел, необходимо тщательно промыть глаза водой.

Гель-смазку следует хранить в заводской упаковке при комнатной температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении гель-смазка должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей. Гель-смазку следует хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. После вскрытия упаковки ее следует хранить не более 3 месяцев.

Срок годности геля-смазки – 5 лет с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

