


«УТВЕРЖДАЮ»

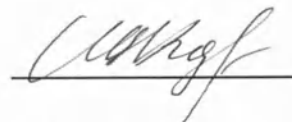

Редзюк Ирина Владимировна
Директор по регуляторным
вопросам ООО "Тева"



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ингалятор индивидуальный Револайзер

Производства компании:

Cipla Ltd., India

«СОГЛАСОВАНО»

Гл. врач ГБ № 8

Дуленков А.Б.



Москва, 2010


Ингалятор индивидуальный Револайзер

Ингалятор индивидуальный Револайзер предназначен только для использования с капсулами с порошком для ингаляций фирмы «Ципла»




Руководство по эксплуатации Ингалятора индивидуального Револайзер


Откройте, придерживая **Револайзер** одной рукой за основание. Потяните мундштук, как изображено на картинке, до соприкосновения черных стрелок.

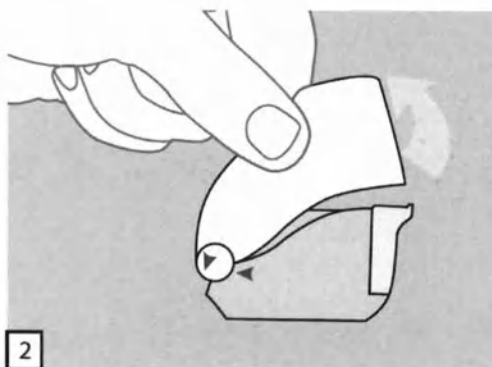

Вставьте капсулу с порошком для ингаляций прозрачным концом вниз в камеру для капсулы.

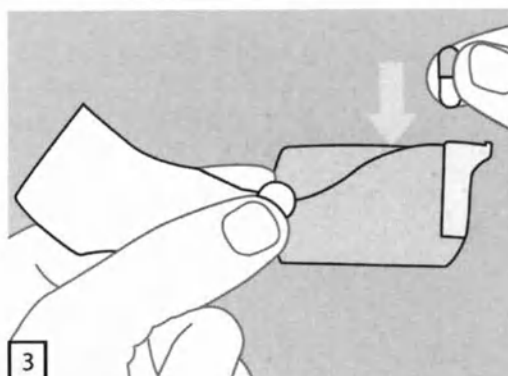


Плотно закройте мундштук. Щелчок укажет на правильность закрытия Револайзера.

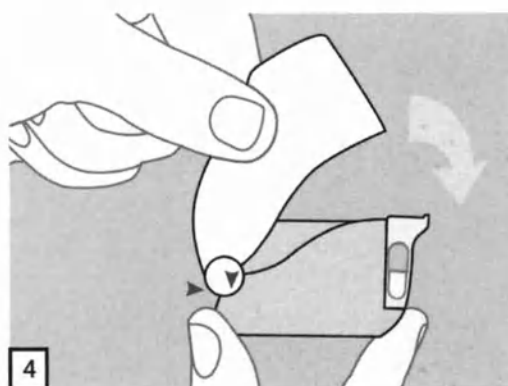

Сделайте глубокий выдох ртом




Зажмите мундштук между зубами и плотно обхватите его губами. Сядьте или встаньте вертикально, держите голову прямо и сделайте насколько сможете глубокий вдох через рот. Если все сделано правильно, то Вы услышите вибрирование капсулы внутри Револайзера. Вытащите Револайзер изо рта и задержите дыхание примерно на

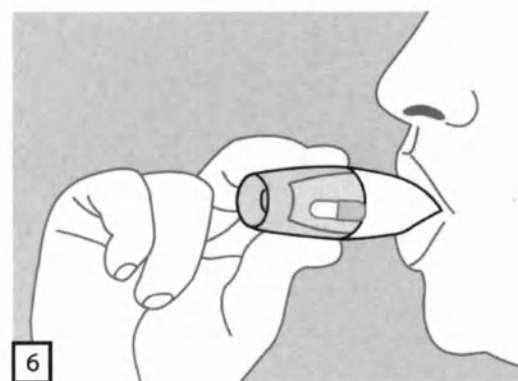

10 секунд.

Следует повторить действия 4-5, чтобы убедиться, что весь порошок был ингалирован; также это можно увидеть через прозрачную камеру для капсулы.


После каждого использования необходимо открывать мундштук изделия и извлекать использованную капсулу. Закройте мундштук и уберите Револайзер в полиэтиленовый пакет. Для повторного использования Револайзера необходимо, чтобы изделие было чистым. Повторите действия 1-6.

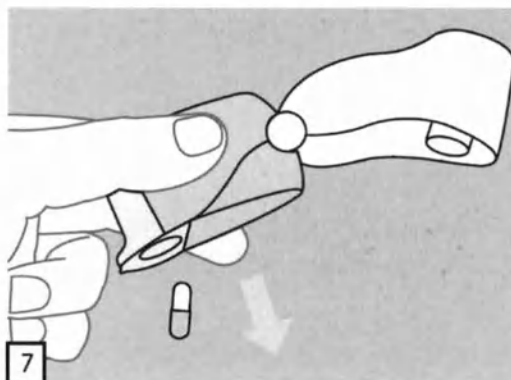

ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Необходимо очищать Револайзер не реже двух раз в неделю.

- Откройте мундштук ингалятора
- Вытащите пустую капсулу из камеры для капсулы
- Прополощите мундштук и камеру для капсул в проточной воде
- Как следует встряхните изделие для удаления лишней воды и дайте высохнуть. (около 6 часов). Предпочтительно очистить Револайзер и оставить сушиться на ночь. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур.

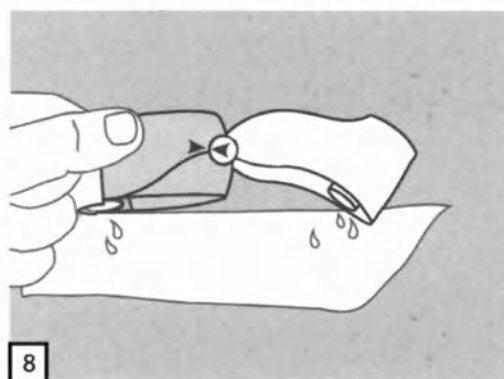

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТКАНЬ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕВОЛАЙЗЕРА	
ПОМНИТЕ • Ингалятор индивидуальный Револайзер должен быть сухим и чистым. Не используйте влажный ингалятор. • Рекомендуется менять Револайзер каждые 6 месяцев. • Точно следуйте указаниям врача. Если рекомендуемая доза не облегчает симптомы или состояние пациента ухудшается, проконсультируйтесь с врачом. • Во избежание попадания влаги необходимо хранить контейнер с капсулами плотно закрытым. Капсулы с порошком для ингаляций следует вставлять в Револайзер непосредственно перед их использованием. • Иногда на капсуле после использования может оставаться тонкий слой порошка. Это не влияет на эффективность препарата. • Храните ингалятор индивидуальный Револайзер вместе с капсулами с порошком для ингаляций фирмы «Ципла» в удобном переносном мешочке.	

ПОМНИТЕ

- Ингалятор индивидуальный Револайзер должен быть сухим и чистым. Не используйте влажный ингалятор.
- Рекомендуется менять Револайзер каждые 6 месяцев.
- Точно следуйте указаниям врача. Если рекомендуемая доза не облегчает симптомы или состояние пациента ухудшается, проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание попадания влаги необходимо хранить контейнер с капсулами плотно закрытым. Капсулы с порошком для ингаляций следует вставлять в Револайзер непосредственно перед их использованием.
- Иногда на капсуле после использования может оставаться тонкий слой порошка. Это не влияет на эффективность препарата.
- Храните ингалятор индивидуальный Револайзер вместе с капсулами с порошком для ингаляций фирмы «Ципла» в удобном переносном мешочке.

Знаменщикова Т.В.
Специалист
по регистрации



Всего прошнуровано,
пронумеровано и реплено
печатью 5 л а(ов).