



ИНСТРУКЦИЯ по применению материала **ТрАпекс-гель** в стоматологии

Описание. Паста (гель) белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 1 мл.

Состав: Является композицией ГИДРОКСИАПОЛА (гидроксиапатита, трикальцийфосфата), оксида цинка, дексаметазона с органическими составляющими. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения.

Показания к применению. Используется при лечении гранулирующего периодонтита в деструктивной стадии, для резорбции кистогранулем и небольших кист при незаконченном формировании оболочки.

Методика применения. При лечении периодонтита (гранулирующего или гранулематозного в стадии ремиссии) каналы тщательно обрабатываются механически и медикаментозно. Удаляются ткани распада пульпы, после чего эндодонтическим инструментом обрабатываются стенки каналов.

С помощью сильных антисептиков - хлоргексидин (Россия), крезифен (Франция) и др. - производят промывку и окончательную подготовку канала. При обострении хронического гранулирующего или гранулематозного периодонтита подготовка каналов происходит по обычной методике в течение нескольких дней при сочетании местной и общей терапии.

ТрАпекс-гель выводят в *небольшом* количестве за верхушку корня зуба, что способствует ликвидации воспалительного процесса и построению костной ткани в зоне повреждения, закрывая на 7-10 дней временной пломбой. Пломбирование канала через 7-10 дней по общепринятой методике. Использование геля на основе ГИДРОКСИАПОЛА препятствует развитию ранних и поздних осложнений при лечении периодонтита и способствует восстановлению костной ткани в тканях периодонта.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25°C.

Противопоказания. Активный (гнойный) воспалительный процесс.

- Л- импрегнация линкомицина;

