



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ИНДОСТ-гель +**
в стоматологии

Описание. Паста белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 1– 2 мл. Содержит гранулы ортофосфатов кальция, а также композицию факторов роста.

Может содержать линкомицин (буква Л).

Свойства. Является композицией ортофосфатов кальция с неорганическими и органическими составляющими неживотного происхождения. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Отличается повышенными остеоиндуцирующими свойствами. Относится к нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных нежелательных последствий.

Показания к применению. Используется при возмещении небольших костных дефектов различного генеза в челюстно-лицевой области посредством их заполнения. Возможно сочетанное использование с различными остеопластическими материалами.

Методика применения. ХИРУРГИЯ в пародонтологии: слизисто-надкостный лоскут и поверхность корня разобщают, после тщательного кюретажа и дезэпителизации лоскута костный карман заполняют гелем. После имплантации материала слизистую ушивают, в каждом межзубном промежутке на 7-8 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики.

При заполнении различных костных полостей после цистэктомии, секвестрэктомии и др. материалом заполняется костная полость, после чего костный дефект закрывается лоскутом. Допускается использование материала **ИНДОСТ-гель +** с другими материалами: ГАП 99г, КОЛАПОЛ КП-2, мембраной ПАРОДОНКОЛ и др. Швы стараться располагать выше или ниже полости.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25°C.

Противопоказания. Активный воспалительный процесс (во время операции).



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала ИНДОСТ гель
в стоматологии

Описание. Паста белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 1 – 2 мл.

Свойства. Является композицией гидроксиапатита с органическими составляющими. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Отличается повышенными остеиндуцирующими свойствами. Относится к нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных нежелательных последствий.

Показания к применению. Используется при возмещении небольших костных дефектов различного генеза в челюстно-лицевой области посредством их заполнения, при сочетанном использовании различных остеопластических материалов, а также при хирургическом и терапевтическом лечении пародонтита (пародонтоза) средней и средне-тяжелой степени.

Методика применения. ТЕРАПИЯ. После кюретажа и тщательной медикаментозной обработки заполняют костный карман материалом, после чего на несколько дней накладывают липкую или твердеющую повязку.

ХИРУРГИЯ: слизисто-надкостный лоскут и поверхность корня разобщают, после тщательного кюретажа и дезэпителизации лоскута костный карман заполняют остеопластическим материалом Колапол КП-2, ИНДОСТ 2 (пластины). Для лучшего контакта в карман дополнительно имплантируют ИНДОСТ гель. После имплантации материала слизистую ушивают, в каждом межзубном промежутке на 6-7 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики.

При заполнении различных костных полостей после цистэктомии, секвестрэктомии и др. материалом заполняется костная полость, после чего костный дефект закрывается лоскутом. Допускается использование материала ИНДОСТ гель с другими материалами: ГАП 99г, КОЛАПОЛ КП-2, мембраной ПАРОДОНКОЛ и др.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25°C.

Противопоказания. Активный воспалительный процесс (во время операции).



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ТрАпекс-гель**
в стоматологии

Описание. Паста (гель) белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 1 мл.

Состав: Является композицией ГИДРОКСИАПОЛА (гидроксиапатита, трикальцийфосфата), оксида цинка, ПВП с органическими составляющими. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения.

Показания к применению. Используется при лечении гранулирующего периодонтита в деструктивной стадии, для резорбции кистогранулем и небольших кист при незаконченном формировании оболочки.

Методика применения. При лечении периодонтита (гранулирующего или гранулематозного в стадии ремиссии) каналы тщательно обрабатываются механически и медикаментозно. Удаляются ткани распада пульпы, после чего острым эндодонтическим инструментом обрабатываются стенки каналов.

С помощью сильных антисептиков - хлоргексидин (Россия), крезифен (Франция) и др. - производят промывку и окончательную подготовку канала. При обострении хронического гранулирующего или гранулематозного периодонтита подготовка каналов происходит по обычной методике в течение нескольких дней при сочетании местной и общей терапии.

ТрАпекс-гель выводят в *небольшом* количестве за верхушку корня зуба, что способствует ликвидации воспалительного процесса и построению костной ткани в зоне повреждения, закрывая на 7-10 дней временной пломбой. Пломбирование канала через 7-10 дней по общепринятой методике. Использование геля на основе ГИДРОКСИАПОЛА препятствует развитию ранних и поздних осложнений при лечении периодонтита.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25⁰С.

Противопоказания. Активный (гнойный) воспалительный процесс.

- Л- импрегнация линкомицина;