



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1
Ц5040.00.000 ПС

ОКП 94 5214

1 Назначение изделия, технические характеристики, комплектность

1.1 Кресло гинекологическое с ручным приводом предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах. Кресло применяется в медицинских учреждениях. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры приведены на рисунке.

1.3 Масса кресла в комплекте с приспособлениями, не более, кг - 75.

1.4 Номинальная нагрузка на кресло, кг - 120.

1.5 Угол наклона сиденья от горизонтали от 0° до 20 °С с предельным отклонением ± 5°; спинки от вертикали - от 20° до 100 °С с предельным отклонением ± 5°.

1.6 Усилие, необходимое для перемещения таза, не более, Н(кгс) - 50(5)

1.7 Усилия, прилагаемые к рукояткам зажимов для фиксации съемных приспособлений и к зажимному винту стойки, не более, Н (кгс) - 100(10).

1.8 Усилие, необходимое для расфиксации спинки при переводе из одного положения в другое, не более, Н (кгс) - 120(12).

1.9 Средний срок службы, не менее, лет - 5.

1.10 Комплектность, нагрузка указаны в таблице

Обозначение документа	Наименование	Кол-во на комплект	Величина номинальной нагрузки, не более, кг	№ поз. по чертежу
Ц5040.00.000	Кресло гинекологическое с ручным приводом (без съемных частей)		120 - на сиденье 60 - на спинку 120 - на подножку	8 7 2
Съемные части				
гЦД1.130.05.000	Подколенник	2	20 на каждый	3
ГЕ.001 или Ц5040.11.000	Тазик или тазик со сливом	1	4	19
гЦД1.111.00.001	Упор для рук левый	1	20	4
гЦД1.111.00.002	Упор для рук правый	1	20	5
(Поставляются по заявке потребителя)				
Ц5040.10.000	Столик инструментальный	1		
гЦД1.111.04.000	Секция ножная	1		
гЦД1.130.08.000	Штатив для вливаний	1		
гЦД1.130.05.130	Подголовник	1		
Эксплуатационная документация				
Ц5040.00.000 ПС	Паспорт	1 экз.		
гЦД1.130.00.000 ПС				

Примечание - Допускается съемные части закреплять на изделии (поставка в собранном виде), а также поставка кресел любой комплектности из указанной в таблице в соответствии с условиями договора на поставку.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, меры безопасности

2.1 Основание 15 кресла снабжено: двумя роликами 1 для передвижения, шарнирной подножкой 2, сиденьем 8 и спинкой 7 с механизмами наклонов и подушками 6, съемными приспособлениями.

2.2 Распаковать кресло, установить съемные приспособления согласно рисунка в необходимое положение, закрепить винтами, зажимами 18(см.п.2.5).

2.3 Для регулировки наклона сиденья вывести тазик или тазик со сливом из зоны сиденья, поднять собачку 11 вверх, повернуть в сторону буквы «П» (подъем) или «О» (опускание) движением рукоятки 16 влево - вправо, регулировать наклон, регулировку производить с боку сиденья при поднятых вверх стержней подколеника и штанги поз.3, 17.

2.4 Для регулировки наклона спинки, удерживая рукой спинку от падения. Поднять рукоятку 9 вверх, установленную на коробке 13, отрегулировать наклон, зафиксировать его нажатием рукоятки 9 вниз.

2.5 Под сиденьем в кассете 20 разместить выдвижной тазик или тазик со сливом 19 для сбора жидкости. Кассету 20 (см.рис.), при поставке не в сборе с креслом, установить согласно рисунка и сечения А-А, закрепив ограничительные шайбы винтами на торцах направляющих после установки во втулки под сиденьем кресла.

2.6 Подножку 2 установить в необходимое положение.

2.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** - регулировка частей с пациентом, размещенным на кресле; эксплуатация неисправного кресла. Перед каждым использованием убедитесь в надежности фиксирования закрепления всех частей кресла.

2.8 Перед пользованием съемными приспособлениями 3, 5 убедиться в надежности их фиксации зажимами 17. При установке ручек 4, 5 обратить внимание, чтобы лыска была расположена к зажимному винту.

2.9 Во избежание самопроизвольного опускания спинки, при расфиксации, необходимо поддерживать рукой спинку.

2.10 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия, его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание

3.1 Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервировать кресло промывкой моющими растворами, проверить отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей кресла, убедиться в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепить, произвести санитарную обработку перед использованием и после каждого использования.

3.2 Проверку технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводить: проверкой углов наклона по п.1.5 спинки и сиденья с помощью любых доступных угломеров или средств; - проверкой усилий по пп.1.6, 1.7, 1.8 с помощью динамометров ДПУ-0,2-2-УХЛ2 по ГОСТ 13837; - проверкой работы механизма фиксации спинки размещением на ней равномерно-распределенной нагрузки 90 кг, после выдержки в течение 2 часов спинка не должна смещаться вниз под нагрузкой; - проверкой комплектности по п.1.9 и других параметров.

3.3 Характерные неисправности кресла:

ослабление крепежных резьбовых и других элементов устранить подтягиванием или заменой на годные элементы, затруднение наклона сиденья устранить разборкой, при необходимости заменой изношенных деталей на годные, последующей смазкой трущихся поверхностей консистентной смазкой и сборкой стакана 12 с собачкой 11 и винтом 10, установленных в стойке 14.

4 Консервация

4.1 Металлические детали кресла и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1, зав.№ _____ подвергнуто в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-021-07614107-2004.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого

вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя(поставщика)

6.1. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-021-07614107-2004.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2. Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3. Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение – владелец изделия.

6.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность кресла и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь(сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приеме

Кресло гинекологическое с ручным приводом

"КТ-1"

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Служба качества



М.П.

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

www.dzmo.ru

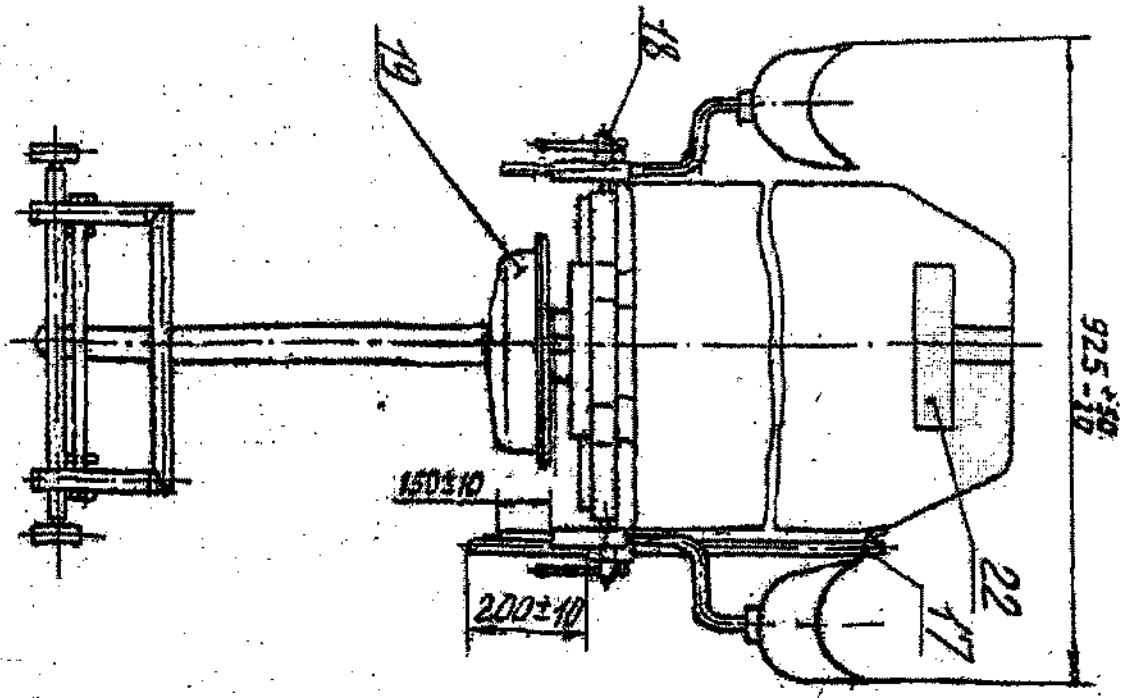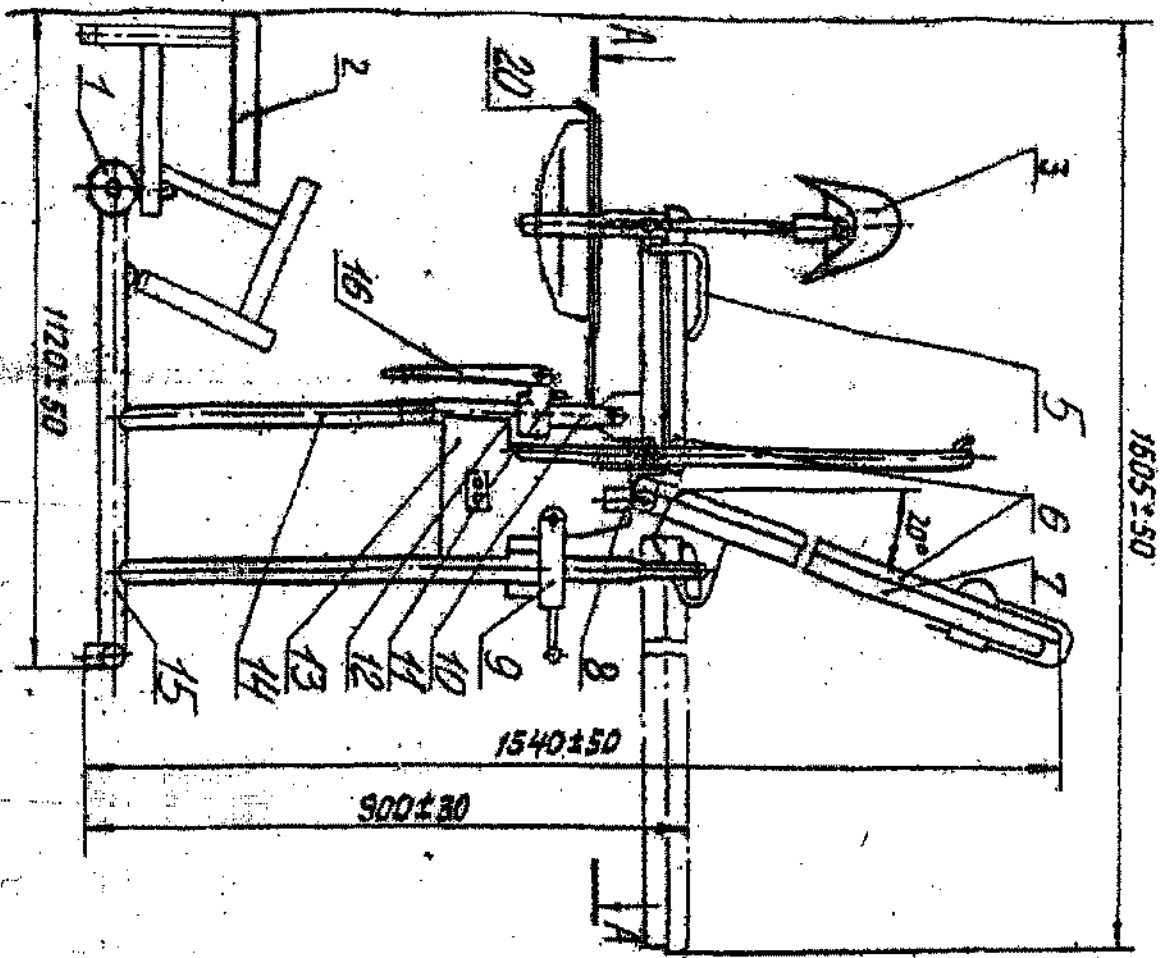

...информовано,

Пр...

На

Ген. директор

