



Открытое акционерное общество

Досчатинский завод медицинского оборудования



АЯ74

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

ОКП 94 5150

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ, СО СЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ТБС-01 Паспорт тЦД3.531.001 ПС

1. Назначение изделия, технические характеристики, комплектность.

1.1. Тележка предназначена для перевозки больных внутри больничного корпуса.

Тележка применяется в медицинских учреждениях.

Климатическое исполнение тележки УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2. Габаритные размеры, мм.:

длина – 2100 ± 5 ; ширина – 605 ± 10 ; высота – 800 ± 10 .

1.3. Масса, кг, не более

40

1.4. Номинальная нагрузка на тележку, массой, кг

80 ± 1

1.5. Средний срок службы, лет

5

1.6. Усилие перемещения тележки, кгс, не более

15

1.7. Усилие включения тормоза, кгс, не более

15

1.8. Угол наклона подголовника (при наличии подголовника)

от горизонтали

$45^\circ \pm 5^\circ$

1.9. Комплектность приведена в таблице

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Тележка (без съемных приспособлений) <u>Съемные части</u>	тЦД3.531.001	1
2. Панель с подголовником или панель без подголовника	тЦД6.122.048 тЦД6.122.070	1 1
3. Матрац	тЦД6.154.008	1
Паспорт	тЦД3.531.001 ПС	1

Примечание – Поставка вариантов панели поз. 2 и матрац поз.3 оговаривается при заказе тележки.

2. Устройство, подготовка к работе и указание мер безопасности.

2.1. Тележка состоит из основания, установленного на 4 колеса, два из которых с тормозом, съемной панели с ножками. Ложе съемной панели имеет подголовник с регулировкой угла наклона или без подголовника.

2.2. Для подголовника к работе распакуйте тележку и очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно разделу 3 паспорта. Выполните санитарную обработку тележки.

2.3. Запрещается эксплуатация с превышением допускаемой нагрузки на тележку (носилки).

2.4. Запрещается эксплуатация с неисправными колесами и тормозом, а также погнутыми стойками основания и другими частями тележки.

3. Техническое обслуживание

3.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений и деталей (периодичность раз в полгода), замене, при необходимости годными деталями поломанных или изношенных, смазке раз в два года консистентной смазкой подшипников колес.

3.2. Проверку технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования проводить на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

4. Консервация

4.1 Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).

4.2 Тележка для перевозки больных, со съемной панелью ТБС-01, зав.№ _____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9451-045-07614107-2007.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5. Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Гарантии изготовителя(поставщика)

6.1. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9451-045-07614107-2007.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2. Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3. Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7. Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.:(83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь(сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок(разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки больных, со съемной панелью ТБС-01

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контролер ОТК

М.П.

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число