

2.2 Для подготовки к работе распакуйте шкаф и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, промойте горячей водой с моющими средствами и просушите.

2.3. Проверьте целостность покрытий и целостность стеклянных полок и дверей.

2.4. Проверьте комплектность.

2.5. Осуществите сборку согласно инструкции.

Инструкция по сборке

Сборку производить на плоской поверхности!

1. Вставьте пластмассовые втулки из комплекта Петель для стекла 13 и 14 в Верх шкафа 9 и в Полку среднюю 11 сверху, и из комплекта поставки в Основание 10 и в Полку среднюю 11 снизу.

2. Положите на плоскую поверхность Верх шкафа 9 резьбовыми втулками вверх.

3. Установите Стенку заднюю 1 на Верх шкафа 9 до совпадения отверстий с резьбовыми втулками, предварительно определив направление установки Стенки задней 1 по совпадению резьбовых втулок с соответствующими отверстиями в Стенках боковых 2 и 3, которые устанавливаются на резьбовые втулки Верха шкафа так, чтобы технологические вырезы «А» были направлены в сторону Основания 10. Зафиксируйте Стенку заднюю 1 Винтами с Шайбами из комплекта поставки (см. рис. 2).

4. Соедините Стенки боковые 2 и 3 со Стенкой задней 1 и Верхом шкафа 9. Для этого нужно завести Стенки боковые сверху в отгибы задней стенки так, чтобы технологические вырезы «А» были направлены в сторону Основания 10.

5. Установите Полку среднюю 11 плоскостью согласно швеллерам Стенок боковых 2 и 3 до совпадения отверстий с резьбовыми втулками и соедините их между собой и Стенкой задней 1 Винтами с Шайбами из комплекта поставки.

6. Установите Основание 10, до совпадения отверстий с резьбовыми втулками, на Стенки боковые 2 и 3 и Стенку заднюю 1, соедините их все между собой Винтами с Шайбами из комплекта поставки. Винт около оси Дверки 4 завернуть на 2-3 оборота.

7. Поставьте Дверку нижнюю 4, установив её оси в пластмассовые втулки Основания 10 и в Полке средней 11.

8. Заверните Винт с Шайбой из комплекта поставки около оси Дверки нижней 4 в Основание 10.

9. Заверните в Основание 10 Опоры 6 (см. рис. 5).

10. Поставьте шкаф на Опоры 6 и, выворачивая их поочередно, выставьте такое положение шкафа, при котором Дверки 4 открываются и закрываются свободно.

11. Установите замок 12 Дверки 4, входящий в комплект поставки.

12. Установите с помощью Винтов (саморезов) и отрегулируйте магнитные защёлки 16 на Полке средней 11, всё из комплекта поставки.

13. Уложите Полки 8 на уголки Стенок боковых 2 и 3 в нижней части шкафа.

14. Установите Петли для стекла верхнюю 13 и нижнюю 14 в пластиковые втулки, установленные в Верх шкафа 9 и в Полку среднюю 11 соответственно, винтами для крепления стекла – внутрь шкафа.

15. Вложите пластмассовые вкладыши из комплекта в Петли для стекла 13 и 14, установите Дверку стеклянную 5 и закрепите в Петлях винтами крепления стекла так, чтобы Дверка стояла без перекосов и открывалась свободно.

16. Установите Ручку для стекла 15 на Дверку стеклянную 5 напротив магнитной защёлки.

17. Уложите Полки стеклянные 7 на уголки Стенок боковых 2 и 3 в верхней части шкафа.

18. Проверьте затяжку винтов!

Схема сборки шкафа ШМ-1 (разборный)
т.4,43.562.001 (Вариант 1)

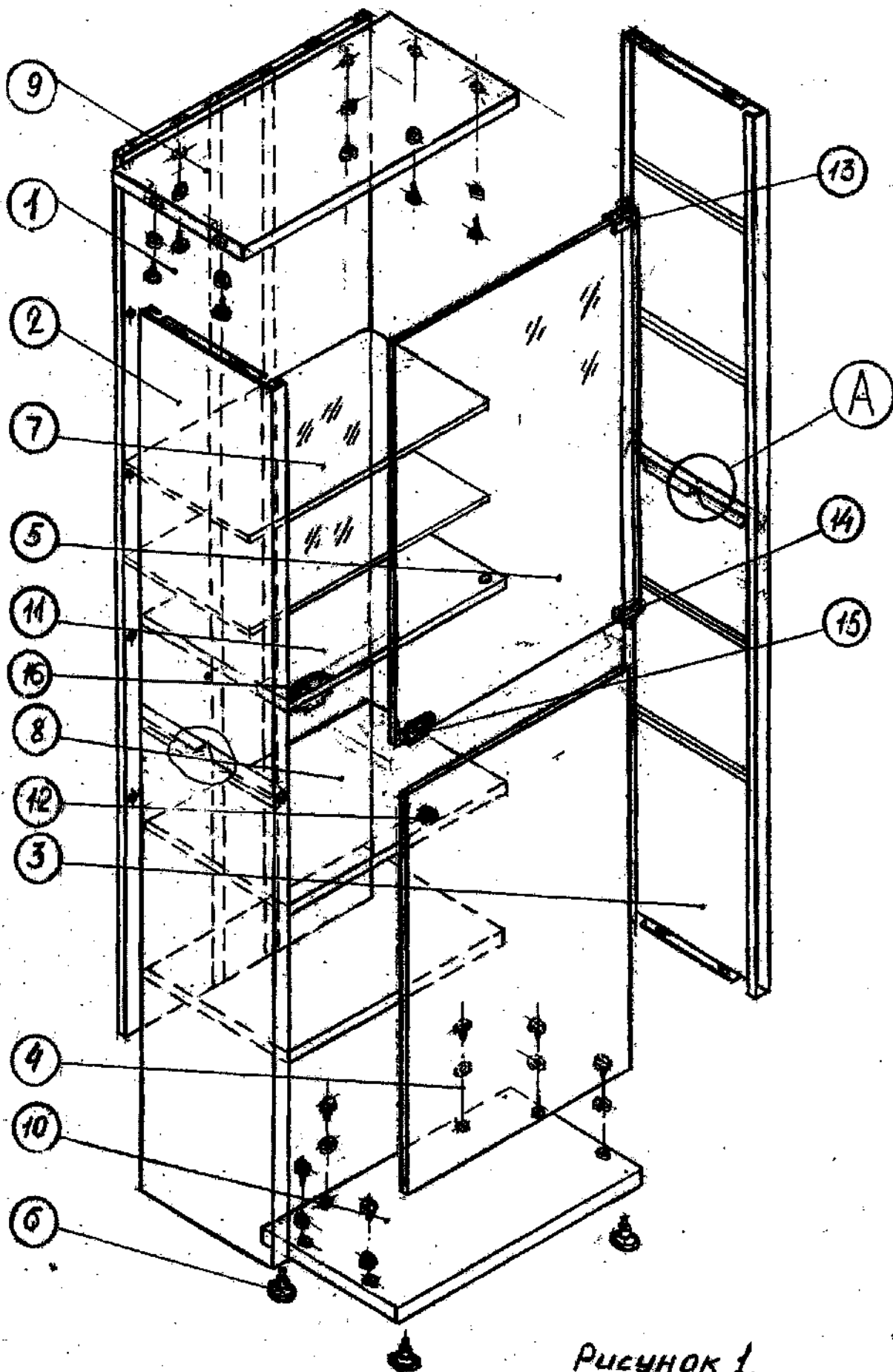


Рисунок 1.

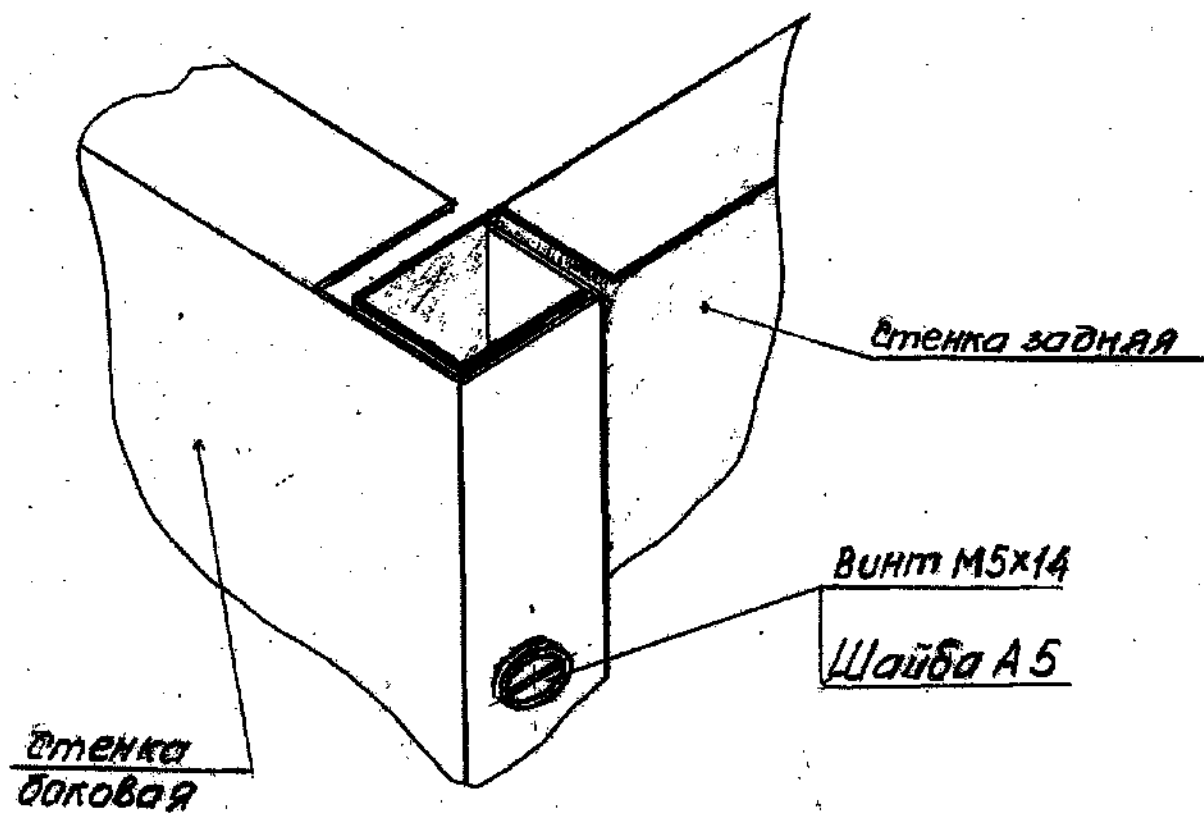


Рис. 2

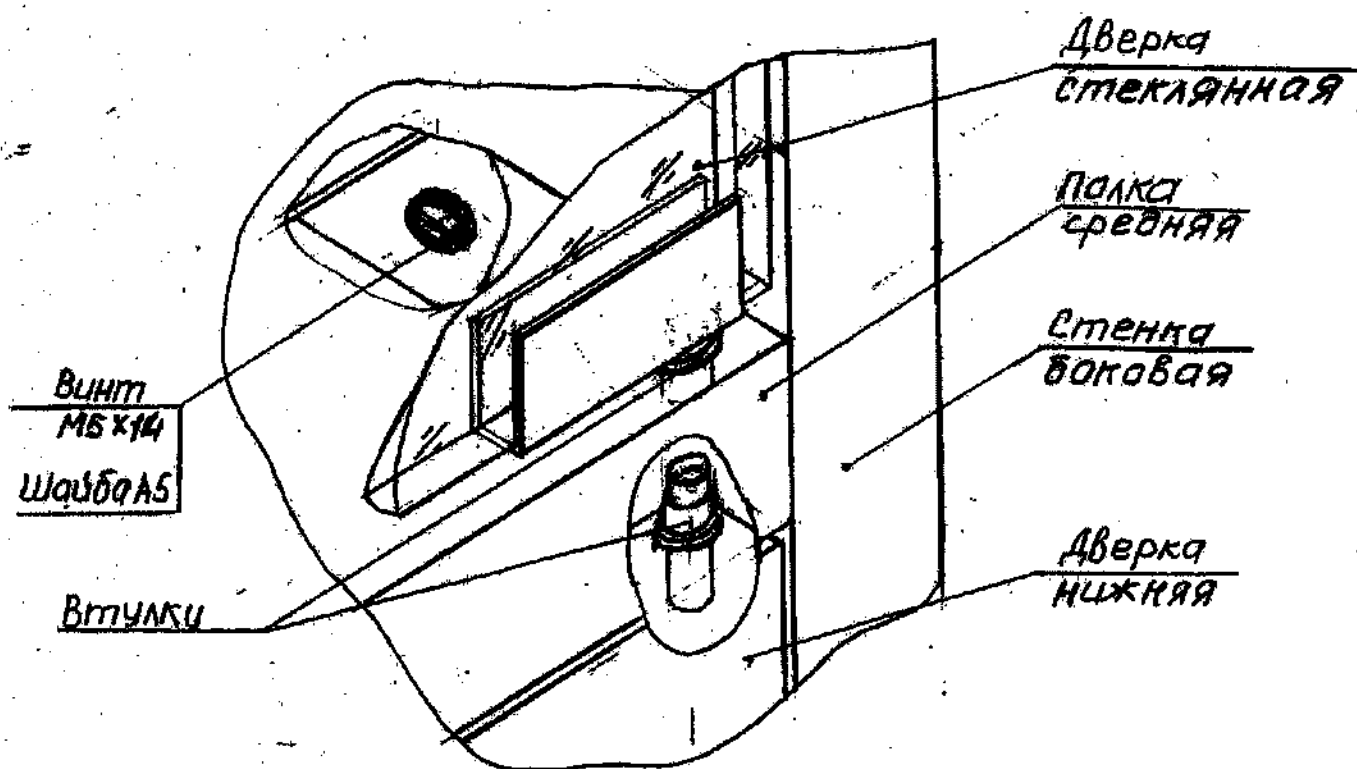


Рис. 3.

Шкаф медицинский ШМ (разборный)

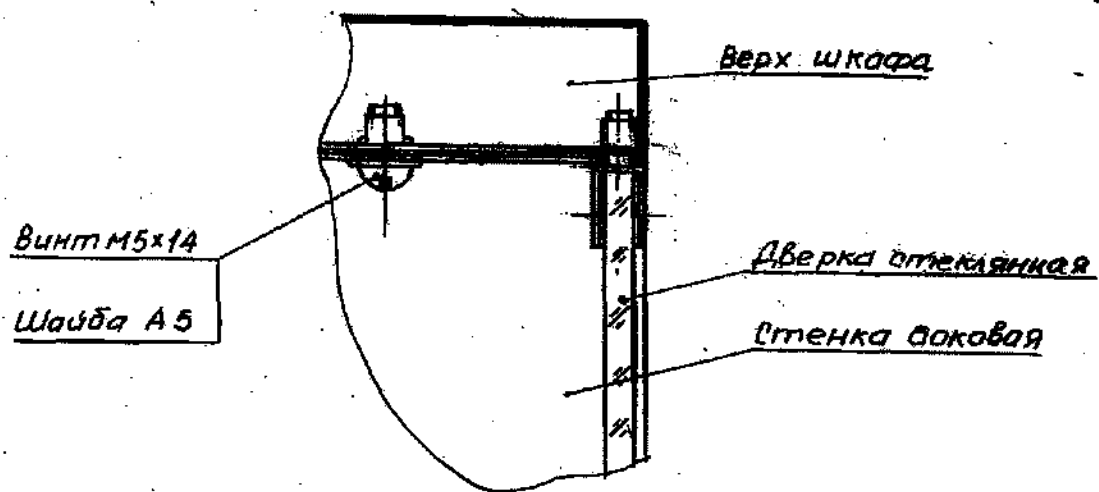


Рис.4

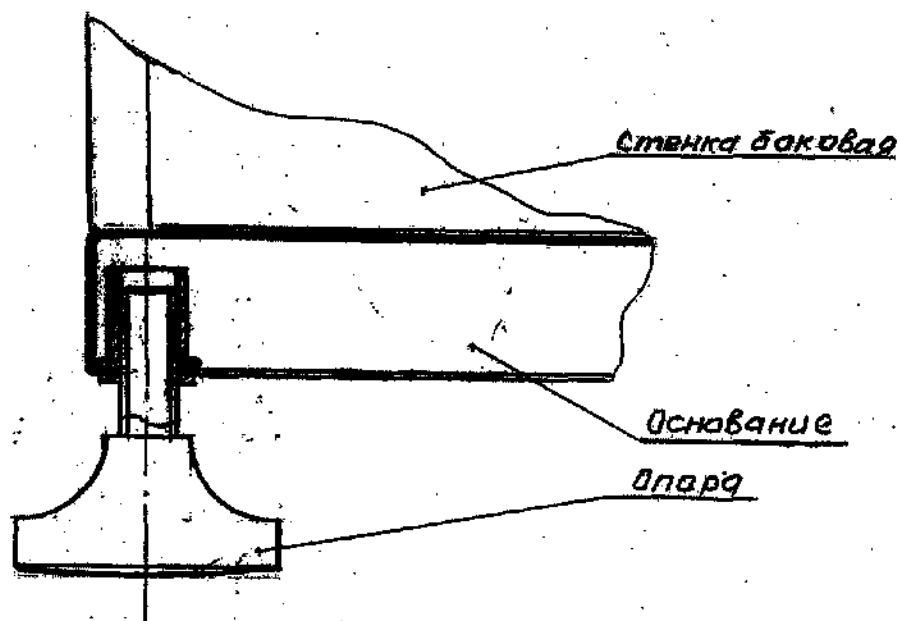


Рис.5

Шкаф медицинский ШМ (разборный)

3 Указание мер безопасности

3.1 К сборке и эксплуатации шкафов допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию шкафов.

3.2 Необходимо помнить, что стеклянные полки могут выдержать равномерно распределенную нагрузку не более 10 кг.

3.3 Банки, колбы и т.п. предметы, имеющие небольшую площадь опоры, хранимые на стеклянных полках, должны быть весом не более 5 кг.

Грузы более 5 кг необходимо устанавливать на металлические полки в нижней части шкафа.

4 Техническое обслуживание

4.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке шкафа.

4.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования шкафа, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

4.3 Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот.

4.7. Не нагружать полки шкафа более, чем указано выше.

4.4 Периодически проверяйте крепление дверок. При необходимости подтягивайте винты крепления стеклянной дверки в петлях.

4.5 Шкафы могут транспортироваться на всех видах транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5 Консервация

5.1 Металлические детали шкафа должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

5.2 Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1 (разборный), зав.№ _____ подвергнуто в ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-010-07614107-99.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование шкафа должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

6.2 Шкаф в упаковке изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре – 50 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3 Изделия, транспортировавшиеся или хранившиеся при температуре ниже 0 °С перед вскрытием упаковки и перед эксплуатацией должны быть выдержаны в помещении с температурой не ниже 18 °С в течение 4 часов.

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-010-07614107-99.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

7.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

7.3. Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

7.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- несоблюдения правил эксплуатации;
- небрежности при хранении и транспортировке.

8 Сведения о рекламациях

8.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

8.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

8.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

8.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

9 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский одностворчатый

ШМ-1

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

М.П.

Ген. дир



листах
А.В. Костров