



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



АЯ74

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

ОКП 94 5210

Кровати медицинские КФ2-2, КТ2-2, КК2-2
Паспорт тЦД1.98.00.000 ПС

1. Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1. КФ2-2 - кровать функциональная детская.

КТ2-2 - кровать травматологическая детская.

КК2-2 - кровать ортопедическая детская.

Кровати предназначены для помещения на них больных детей в возрасте от 1 года до 5 лет и применяются в медицинских учреждениях, для оснащения лечебных учреждений.

1.2. Габаритные размеры, мм:

длина – 1360 ±50; ширина – 775 ±20; высота – 1200 ±30.

1.3. Размеры подматрачной рамы, мм: длина – 1200 ±10; ширина - 640 ±6.

1.4. Высота подматрачной рамы от пола без матраца, мм – регулируемая от 520 до 790 (±20).

1.5. Масса, кг, не более 65

1.6. Допускаемая нагрузка массой, кг, не более 80

1.7. Усилие перемещения, кгс, не более 10

1.8. Усилие включения тормоза колеса, кгс, не более 15

1.9. Угол наклона от горизонтали подматрачной рамы
в сторону головы (вниз), град., не менее 10

1.10. Средний срок службы, лет, не менее 5

1.11. Угол наклона от горизонтали подматрачной рамы
в сторону ног (вниз), град., не менее 10

1.12. Комплектность приведена в таблице.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во шт. по типам кроватей			Примеч.
			КФ2-2	КТ2-2	КК2-2	
1.	Кровать (без съемных частей, указанных ниже)	тЦД1.98.00.000 тЦД1.99.00.000 тЦД1.100.00.000	1	1	1	
Съемные части (поставляются по заявке потребителя)						
2.	Упор для ног	тЦД1.98.03.000	1	1	1	
3.	Корзина под горшок	НУ-98	1	1	1	
4.	Матрац в чехле из ткани	тЦД1.98.12.000-1	1	1	1	
5.	Матрац в чехле из винилискожи	тЦД6.409.009-02	1	1	1	
6.	Матрац в чехле из ткани и винилискожи	тЦД6.409.009-03	1	1	1	
7.	Паспорт	тЦД1.98.00.000ПС	1	1	1	

Допускается поставка кроватей в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенными в отдельный пакет. В соответствии с условиями договора допускается поставка любой комплектности.

2. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1. Кровать (при максимальной комплектности) (см. рис.) состоит из основания 1, установленного на колеса, подматрачной рамы 9 со спинками 10 и матраца 5, двух ограждений 3, упора для ног 2, корзины 6 под горшок.

Принцип работы кроватей основан на создании условий для лечебного процесса и обслуживания посредством применения устройств и приспособлений с возможностью их ручного регулирования.

2.2. Распаковать кровать и очистить от упаковочного материала, после сборки провести техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта.

2.3. Порядок сборки кроватей.

- установить спинки 10 на буши основания 1 кровати и закрепить в четырех местах болтами 11 (M8x20) с шайбами;
- навесить подматрачную раму 9 на гребенки 12 спинок 10;
- уложить матрац 5 и установить стойки 13 упора 2 для ног в два отверстия на каркасе панели, винтами 14 зафиксировать упор в необходимом положении, винтом 22 отрегулировать наклон упора 2;
- установить ограждение 3 в кронштейны 21, зафиксировать его направляющими 4, которые должны пройти через отверстия кронштейнов 16. Поднимая и опуская ограждение 3, отрегулировать свободный ход, для чего ввернуть или вывернуть кронштейн 16, предварительно вынув направляющую 4. Закрепить направляющие 4 установив гайки 17 (M10). Для поднятия или опускания ограждения 3 нажать на защелку 20, удерживая ее до момента вывода ограждения из кронштейнов 15 или 21.
- установить планки 7 на подматрачную раму и закрепить винтами 18 (M10x20) (только в кроватях КТ2-2, КК2-2);
- на скобу основания 1 навесить корзину 6 для горшка с удобной для обслуживания стороны;
- для изменения положения подматрачной рамы перевесить рамки 19 в пазах гребенок 12 на требуемую высоту;
- зажим 8 служит для закрепления навесных приспособлений (только в кроватях КТ2-2, КК2-2);
- для затормаживания кровати нажать ногой вниз на педали тормозов колес, для растормаживания поднять педаль вверх.

2.4. Запрещается использование кровати с погнутыми деталями ограждений, спинок, с нарушенными резьбовыми соединениями, а также с другими неисправностями.

2.5. В связи с дальнейшим совершенствованием изделия. Его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3. Техническое обслуживание.

3.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений и деталей (периодичность раз в полгода), замене, при необходимости годными деталями поломанных или изношенных, смазке раз в два года любой консистентной смазкой подшипников колес, горизонтальной и вертикальной оси, промывке моющими растворами и санитарной обработке кровати.

3.2. Проверку технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования проводить на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

4. Консервация

4.1. Металлические детали кроватей и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кровать _____ (тип кровати), зав. № _____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-020-07614107-2003.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5. Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.


6. Гарантии изготовителя (поставщика).

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-020-07614107-2003.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

а) несоблюдения правил эксплуатации;
б) небрежности при хранении и транспортировке.

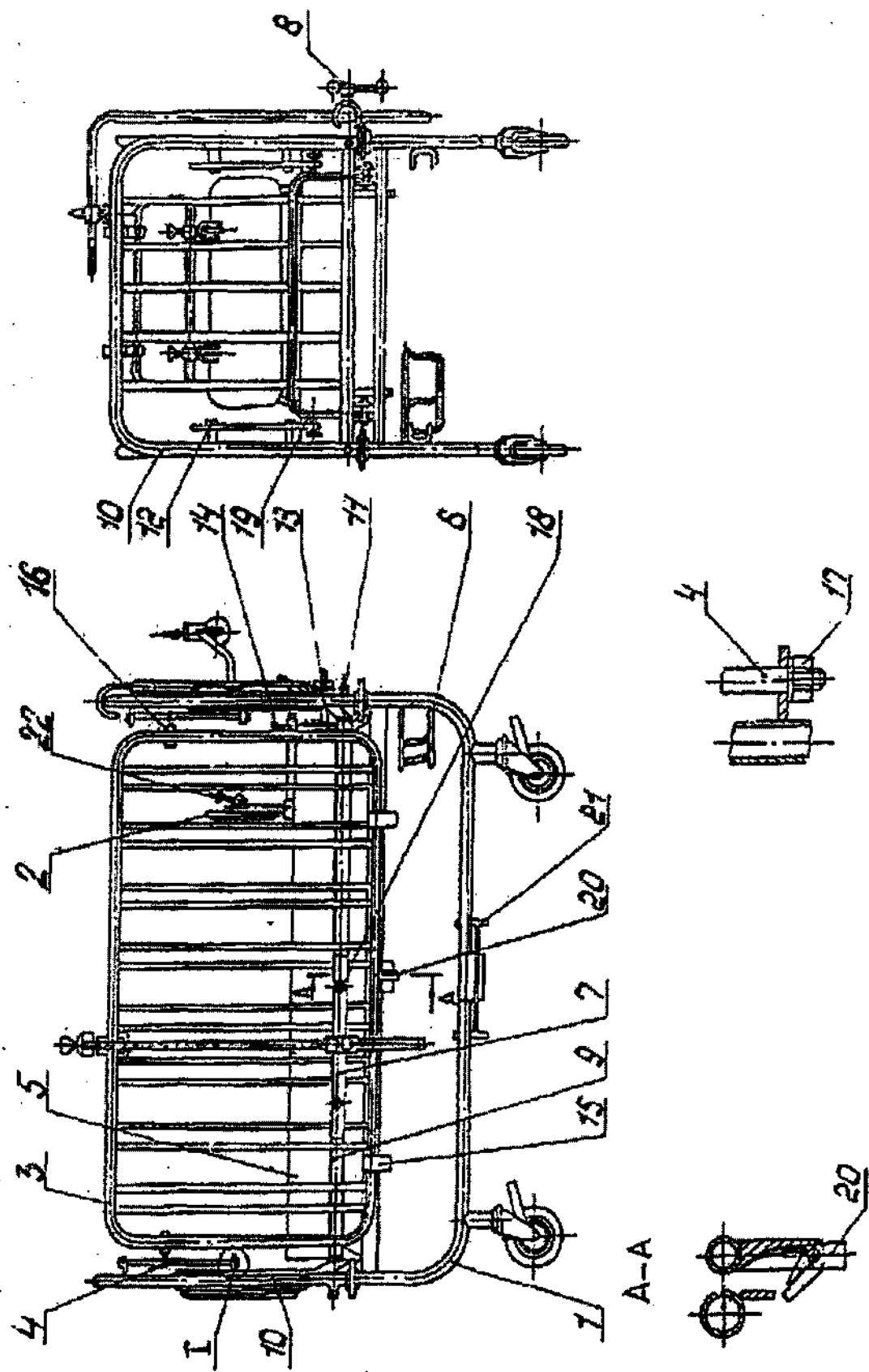

Прошнуровано,
Пронумеровано и скре
Н. *Генеральный директор*
Гендиректор

