



Открытое акционерное общество

**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



ОКП 94 5210

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

**ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК (БИКСОВ), ПСК-«ДЗМО»
ПАСПОРТ
ПСК.00.000 ПС**



1 Назначение изделия, технические характеристики, комплектность

1.1 Подставка для стерилизационных коробок (биксов), далее подставка, предназначена для установки на ней стерилизационных коробок в операционных и перевязочных кабинетах медицинских учреждений. Стол обеспечивает установку и зажим круглых и прямоугольных коробок.

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры, мм.:

высота - 1165±50

высота стола подставки над уровнем пола - 850±50

1.3 Усилие, для фиксации держателей подставок, Н(кгс), не более - 100 (10)

1.4 Усилие на педаль, для подъема рычага (без коробки) подставки, Н(кгс), не более - 150 (15)

1.5 Предельная рабочая нагрузка, не более, Н(кгс) - 150(15)

1.6 Масса подставки, не более, кг. - 12

1.7 Средний срок службы, не менее, лет - 5

1.8 Комплектность указана в таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Подставка для стерилизационных коробок, ПСК-«ДЗМО»	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
2	Паспорт	1

2 Устройство, подготовка и порядок работы, меры безопасности

2.1 Подставка (см. рисунок 1) выполнена из стальных труб, с нанесением полимерного порошкового и гальванического покрытия.

2.2 Для подготовки к работе распакуйте подставку и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку подставки.

2.3 Для работы подставки необходимо освободить зажимной винт 6, выдвинуть держатели 5 до конца и установить на стол 2 стерилизационную коробку, после чего коробку зафиксировать держателями, зажим 6 завернуть.

2.4 Карабин 8, закрепленный на цепочке 4, закрепить на ручке стерилизационной коробки. Открыть все замки на стерилизационной коробке.

2.5 При нажатии на педаль 7, консоль 3 откидывается вверх, тянет за собой цепочку 4 тем самым осуществляя открывание крышки стерилизационной коробки.

2.6 Запрещается использование неисправной подставки и использование не по прямому назначению.

2.7 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание

3.1 Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервировать подставку промывкой моющими растворами, проверить отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей подставки, убедиться в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепить.


3.2 Чистку и дезинфекцию подставки производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. Салфетка должна быть отжата, после чистки подставку необходимо вытереть насухо.

3.2 Характерные неисправности подставки: ослабление крепежных резьбовых и других элементов. Устранить подтягиванием или заменой на годные элементы.

ВНИМАНИЕ!



Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.

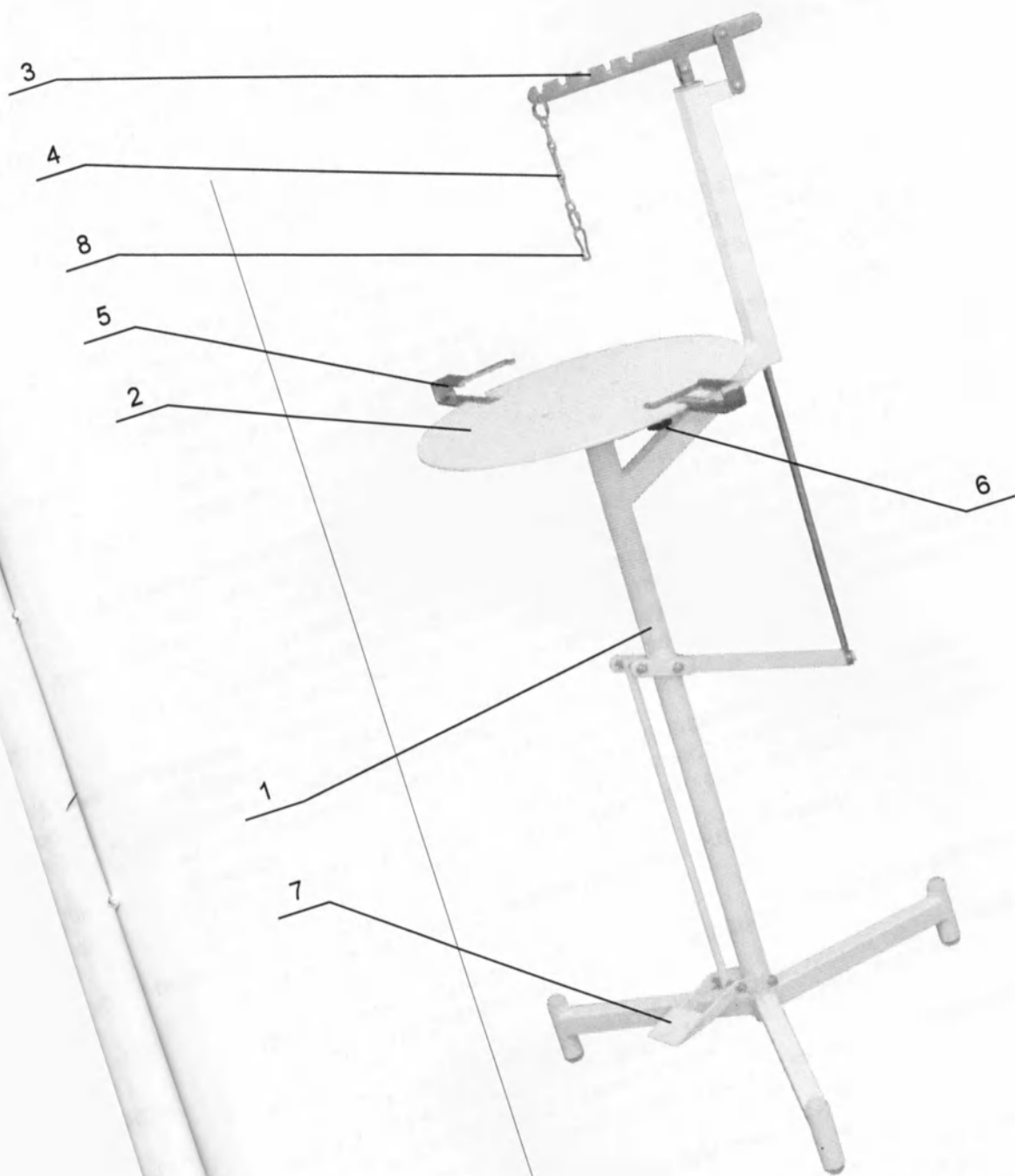

1 – основание; 2 – стол, 3 – консоль; 4 – цепочка; 5 – держатель;
 6 – зажимной винт; 7 – педаль; 8 – карабин.

Рисунок 1

4 Консервация

4.1 Металлические детали подставки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Подставка для стерилизационных коробок ПСК-«ДЗМО», зав.№ _____ подвергнуто в ОАО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование подставки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Подставка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение – владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность столика и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
- в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

6.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "ДЗМО"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.

e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru.

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку подставка для стерилизационных коробок не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Подставка для
стерилизационных коробок
наименование изделия

ПСК-«ДЗМО»
обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества


подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число



Место для печати

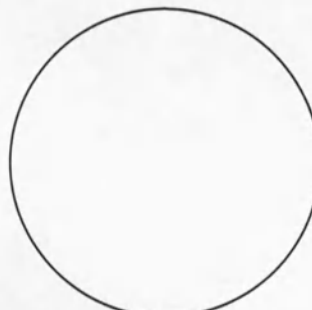

Место для голограммы

Открытое акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

Копия верна.

Прошнуровано, пронумеровано и

скреплено печатью

5

(пять) лист об.

Генеральный директор ОАО «ДЗМО»

А. В. Костров

А.В.Костров





Открытое акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования



ОКП 94 5210

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ, СЗК-«ДЗМО»
ПАСПОРТ
СЗК.00.00 ПС



1 Назначение изделия, технические характеристики, комплектность

1.1 Столик для забора крови (далее столик) предназначен для удобства забора крови или внутривенных манипуляций в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры, мм.:

высота - 800±100

ширина - 370±50

длина - 550±50

1.3 Масса столика, не более, кг. - 10

1.4 Предельная рабочая нагрузка, не более, Н(кгс) - 300(30)

1.5 Средний срок службы, не менее, лет - 5

1.6 Комплектность указана в таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Столик для забора крови, СЗК-«ДЗМО»	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
2	Паспорт	1 экз.

П р и м е ч а н и е - Допускается поставка столика в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, меры безопасности

2.1 Столик для забора крови (см. рисунок 1) имеет каркас, выполненный из стальных труб, с нанесением полимерного порошкового покрытия и состоит из 2^х боковин 1 и двух стяжек 2.

2.2 Верхняя часть - панель 3 выполнена из ДСП, поролона и обтянута искусственной кожей.

2.3 Столик установлен на 4 регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое положение даже на не ровном полу.

2.4 Порядок сборки столика (см. рисунок 1):

Распаковать и очистить от упаковочного материала. Взять боковины 1, закрепить на них верхнюю часть – панель 3 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Затем установить две стяжки 2 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Установить регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрить соединение гайками М8. Все резьбовые соединения должны быть прочно затянуты. Выполните санитарную обработку столика.

2.3 Запрещается использование неисправного столика.

2.4 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание

3.1 Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервировать столик промывкой моющими растворами, проверить отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей столика, убедиться в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепить.


3.2 Чистку и дезинфекцию столика производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. Салфетка должна быть отжата, после чистки столик необходимо вытереть насухо.

3.2 Характерные неисправности столика: ослабление крепежных резьбовых и других элементов. Устранить подтягиванием или заменой на годные элементы.


ВНИМАНИЕ!



Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.

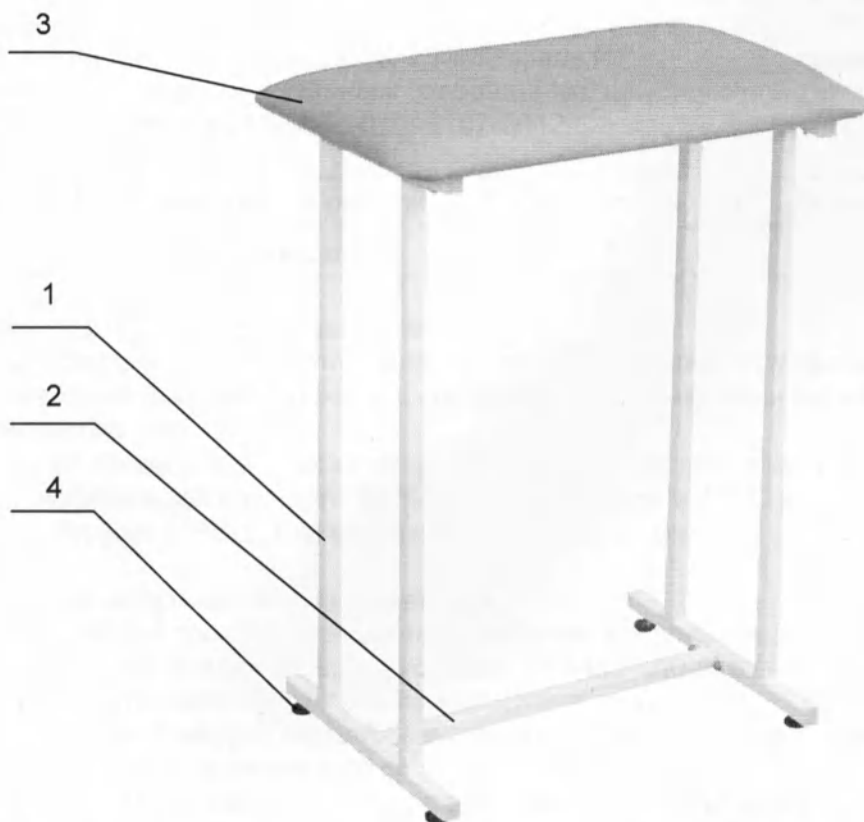

Крепление панели 3 к боковине 1

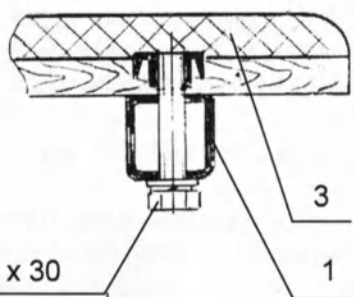


Болт М6-6g x 30

Шайба 6.65Г

Шайба А.6.01.08кп

Крепление стяжки 2 к боковине 1

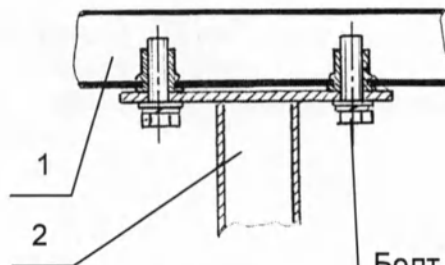


Болт М6-6g x 20

Шайба 6.65Г

Шайба А.6.01.08кп

Крепление регулируемых опор 4

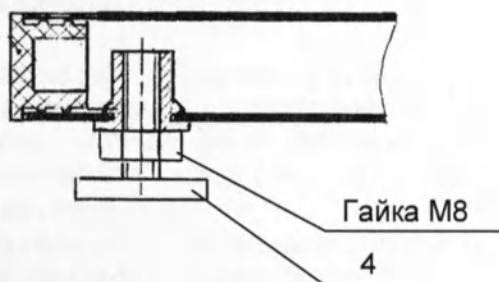

Гайка М8

1 – боковина; 2 – стяжка; 3 – панель; 4 – регулируемая опора.

Рисунок 1

4 Консервация

4.1 Металлические детали столика должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО», зав.№ _____ подвергнуто в ОАО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование столика для забора крови должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение – владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность столика и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
- в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

6.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "ДЗМО"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.

e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru.

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Столик для забора крови

наименование изделия

СЗК-«ДЗМО»

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Место для печати

Место для голограммы

Открытое акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

Копия верна.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 5

(12.12.16) лист 1

Генеральный директор ОАО «ДЗМО»

А. В. Костров А.В. Костров





Открытое акционерное общество

Досчатинский завод
медицинского оборудования



ОКП 94 5210

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

**ТАБУРЕТ МЕДИЦИНСКИЙ, ТМ-1 «ДЗМО»
ПАСПОРТ
ТМ-1.00.00 ПС**



1 Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1 Табурет предназначен для оснащения медицинских кабинетов.

1.2 Климатическое исполнение УХЛ4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Диаметр сиденья, мм.:

- 350±50

1.4 Регулируемая высота сиденья, мм:

min

- 470±50

max

- 600±50

1.5 Масса, кг., не более

- 7,5

1.6 Допускаемая нагрузка массой, кг., не более

- 130

1.7 Средний срок службы, лет, не менее

- 5

1.8 Комплектность приведена в таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО»	1
<u>Принадлежности (поставляются по заявке потребителя)</u>		
2	Подставка для ног	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
3	Паспорт	1

П р и м е ч а н и е – При поставке табурета в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1 Табурет (см. фото) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья, обтянутого винилискожей.

2.2 Для подготовки к работе распакуйте табурет и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку табурета.

2.3 В случае поставки табурета в разобранном виде проведите его сборку следующим образом:

2.3.1 Вкрутите до упора в лучи основания самоориентирующиеся колёса.

2.3.2 Установите газ-лифт в основание.

2.3.3 Основание с нажимной рукояткой закрепить к сиденью, используя по 4 шт.

Винт М6 х 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.

2.3.4 Установить на газ-лифт сиденье в отверстие основания с нажимной рукояткой.

2.4 Запрещается использование неисправного табурета. Во избежание падения, запрещается вставать на сиденье и использовать не по прямому назначению.

2.5 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке.

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных, или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке табурета.

3.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования табурета, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, надёжной фиксации газ-лифта в любом положении.

4 Консервация

4.1 Металлические детали табурета должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО», зав.№ _____ подвергнут в ОАО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование табурета должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Табурет должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50°C до +40°C, при относительной влажности 80% при температуре +25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
- в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

6.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "ДЗМО"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.

e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru.

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку табурет не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Табурет медицинский

наименование изделия

ТМ-1 «ДЗМО»

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Место для печати

Место для голограммы

Открытое акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

Копия верна.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4

(четыре) листа.

Генеральный директор ОАО «ДЗМО»

А. В. Костров А.В. Костров





Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



ОКП 94 5210

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

**СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ, СМ-1 «ДЗМО»
ПАСПОРТ
СМ-1.00.00 ПС**



1 Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1 Стул предназначен для оснащения медицинских кабинетов.

1.2 Климатическое исполнение УХЛ4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Диаметр сиденья, мм.:

- 350±50

1.4 Регулируемая высота сиденья, мм:

min

- 490±50

max

- 620±50

1.5 Масса, кг., не более

- 10

1.6 Допускаемая нагрузка массой, кг., не более

- 130

1.7 Средний срок службы, лет, не менее

- 5

1.8 Комплектность приведена в таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО»	1
<u>Принадлежности (поставляются по заявке потребителя)</u>		
2	Подставка для ног	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
3	Паспорт	1

П р и м е ч а н и е – При поставке стула в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

2 Устройство, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1 Стул (см. фото) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья и спинки, обтянутых винилискожей, опорной дуги спинки в защитном гофрированном чехле.

2.2 Для подготовки к работе распакуйте стул и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку стула.

2.3 В случае поставки стула в разобранном виде проведите его сборку следующим образом:

2.3.1 Вкрутите до упора в лучи основания самоориентирующиеся колёса.

2.3.2 Установите газ-лифт в основание.

2.3.3 Вставить опорную дугу в защитный гофрированный чехол, плоской частью чехла в сторону спинки.

2.3.4 Закрепить спинку к опорной дуге через кронштейн со скобой спинки, используя по 2 шт. Винт М6 х 25, Шайба 6.65Г, Шайба А.6. Спинка должна качаться свободно на опорной дуге.

2.3.5 Вставить опорную дугу в защитном гофрированном чехле в сборе со спинкой в основание с нажимной рукояткой и закрепить зажимным винтом.

2.3.6 Закрепить к сиденью основание с нажимной рукояткой в сборе со спинкой, используя по 4 шт. Винт М6 х 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.

2.3.7 Установить на газ-лифт сиденье в сборе со спинкой в отверстие основания с нажимной рукояткой.

2.4 Запрещается использование неисправного стула. Во избежание падения, запрещается вставать на сиденье и использовать не по прямому назначению.

2.5 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке.

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных, или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке стула.

3.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования стула, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, надёжной фиксации газ-лифта в любом положении.

4 Консервация

4.1 Металлические детали стула должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО», зав.№ _____ подвергнут в ОАО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование стула должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Стул должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50°C до +40°C, при относительной влажности 80% при температуре +25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
- в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

6.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "ДЗМО"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.:(83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.

e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru.

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку стул не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Стул медицинский

наименование изделия

СМ-1 «ДЗМО»

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Место для печати

Место для голограммы

Открытое акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru