



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



АЯ74

Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

ОКП 94 5210

Кровать травматологическая детская КТЗ-2
Паспорт тЦД1.102.00.000 ПС

1 Назначение, технические характеристики, комплектность

1.1 Кровать предназначена для помещения на ней больных детей в возрасте от 5 лет до 14 лет. Кровать применяется в медицинских учреждениях.

Климатическое исполнение кровати УХЛ 4. 2 по ГОСТ 15150.

1.2 Габаритные размеры, мм:

длина	1750 ± 50
ширина (по зажимам навесных приспособлений)	887 ± 20
высота	1000 ± 30
Размеры подматрачной рамы, мм:	1600 ± 10 x 700 ± 6

высота рамы от пола

(при горизонтальном положении панелей), мм 500 ± 20

1.3 Масса, кг, не более 80

1.4 Допускаемая нагрузка массой, кг, не более 120

1.5 Средний срок службы, лет 5

1.6 Усилие перемещения кровати, кгс, не более 15

1.7 Усилие включения тормоза колеса, кгс, не более 15

1.8 Углы наклона от горизонтали, не менее

спинной панели, вверх - 45°; тазобедренной панели - 25°; рамы в сторону головы, вниз - 10°.

1.10 Комплектность приведена в таблице.

№ п/п.	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Примеч.
1.	Кровать травматологическая детская КТЗ-2(без съемных частей, указанных ниже)	тЦД1.102.00.000	1	
Съемные части (поставляются по заявке потребителя)				
2.	Упор для ног	тЦД1.102.05.000	1	
3.	Приспособление для подтягивания	тЦД6.153.003-01	1	
4.	Штатив для вливаний	2055312000	1	
5.	Матрац в чехле из ткани	тЦД1.101.23.000-1	1	
6.	Матрац в чехле из винилискожи	тЦД6.409.009-01	1	
7.	Матрац в чехле из ткани и винилискожи	тЦД6.409.009-04	1	
8.	Паспорт	тЦД1.102.00.000ПС	1	

Допускается поставка кроватей в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенными в отдельный пакет. В соответствии с условиями договора допускается поставка любой комплектности

2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

2.1 Кровать (см. рис.) состоит из основания 1, установленного на колеса 2, с тормозом 3, подрамника 6, подматрачной рамы состоящей из спинной 5, тазобедренной 7, ножной 16 панелей со спинками 4, снабженных съемными стенками 18, матраца, подставки под судно 9, приспособления для

подтягивания штатива для вливаний.

Кровать снабжена упором для ног поз.8 (см. рис.1).

2.2 Принцип работы кровати основан на ручном регулировании положений панелей и приспособлений и создании условий для лечебного процесса и обслуживания.

2.3 Перед подготовкой к работе распаковать кровать, установить съемные части согласно рисунка:

- установить спинки 4 на буши основания 1 и закрепить в четырех местах болтами 14 с шайбами;
- уложить матрац;
- стойки 17 упора для ног установить в отверстия зажимов на боковых рейках ножной панели,

зафиксировать винтами зажимов в необходимом положении по высоте и длине кровати, установить подушки упора, зафиксировать зажимом 13.

2.4 Для подъема спинной панели поднять ее до нужного положения и зафиксировать опорной рамкой 10 в пазах гребенок 11, для опускания приподнять ее, вывести опорную рамку 10 из пазов гребенок 11, и зафиксировать рамкой 10 в требуемом положении.

2.5 Изменение положения подрамника 6 осуществлять аналогично изменению положений спинной секции при помощи опорной рамки 15 и гребенок 12.

2.6 Для подъема тазобедренной панели кровати поднять ее за ручку на требуемый угол, зафиксировать угол ножной панелью в гребенках. Ножная панель при этом устанавливается в наклонное положение.

2.7 Для затормаживания колеса нажать ногой вниз на педаль 3, для растормаживания поднять педаль вверх.

2.8 Запрещается использование кровати с погнутыми деталями ограждений, спинок, фиксаторов, гребенок, с нарушенными резьбовыми и сварными соединениями, а также с другими неисправностями.

2.9 В связи с дальнейшим совершенствованием изделий, их конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений и деталей (периодичность раз в полгода), замене, при необходимости годными деталями поломанных или изношенных, смазке раз в год любой консистентной технической смазкой подшипников горизонтальной и вертикальной оси колес, промывке моющими растворами и санитарной обработке кровати.

3.2 Проверку технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования проводить на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

4 Консервация

4.1 Металлические детали кровати и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кровать травматологическая детская КТЗ-2, зав.№ _____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-020-07614107-2003.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40°С, при относительной влажности 80% при температуре +25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-020-07614107-2003.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность кровати и не гарантирует ее работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9 Свидетельство о приемке

Кровать травматологическая детская

КТЗ-2

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.


Служба качества

подпись

М.П.

расшифровка подписи

год, месяц, число

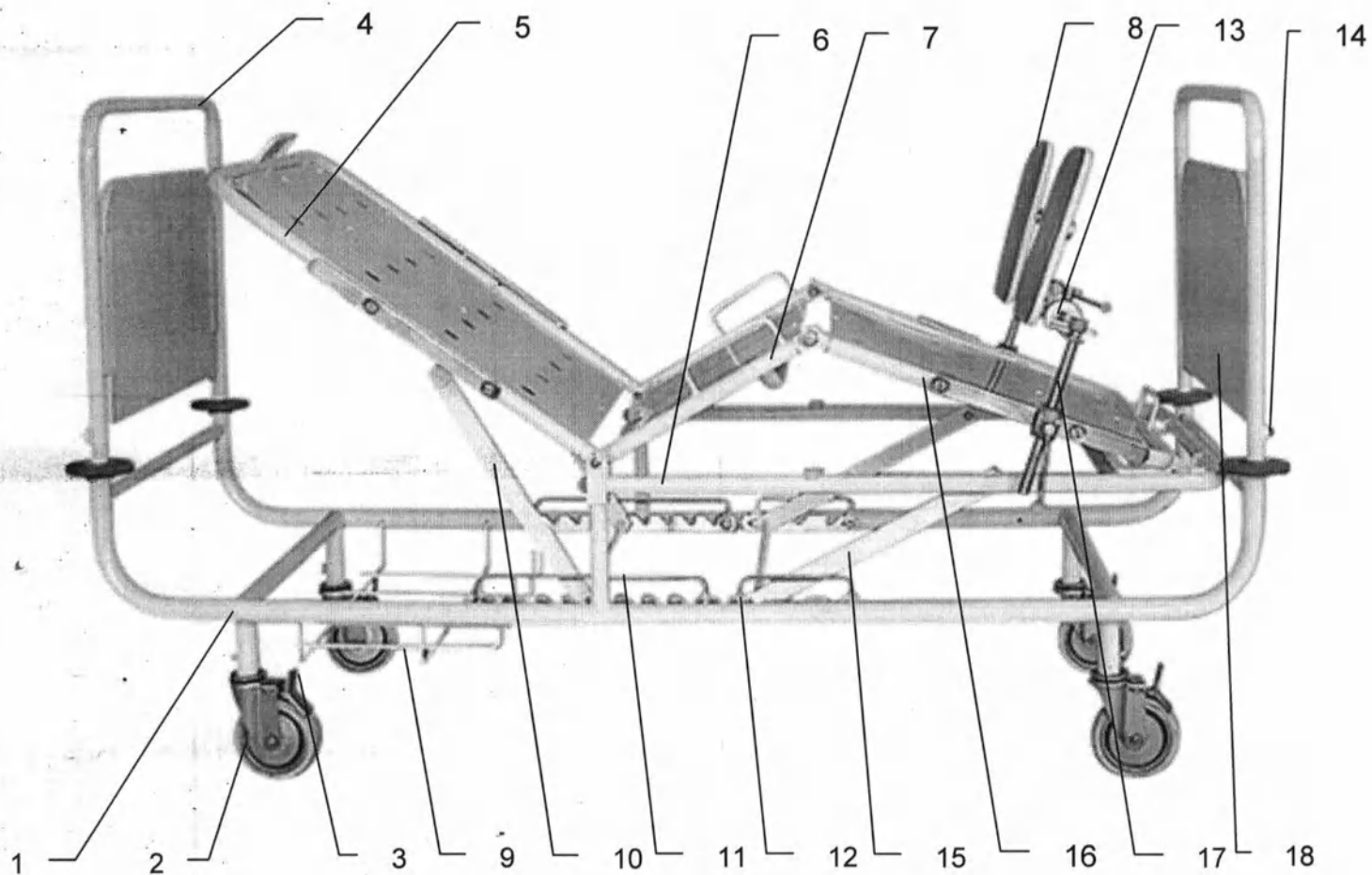

Прошнуровано,
Пронумеровано и
На
Ген.директор



скреплено печатью
листах
А.В.Костров