



Открытое акционерное общество
**Досчатинский завод
медицинского оборудования**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)

ОКП 94 5210

Кровать ортопедическая КК4-2
Паспорт тЦД3.541.001 ПС

1 Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1 Кровать предназначена для помещения на ней взрослых больных.

Кровать применяется в медицинских учреждениях.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина – 2360 ± 50 ; высота – 1100 ± 30 ; ширина – 986 ± 20

Габарит ширины установлен по зажимам навесных приспособлений.

1.3 Размеры подматрачной рамы, мм $2000 \pm 10 \times 800 \pm 6$

Высота рамы от пола без матраца 600 ± 20

1.4 Масса, кг, не более 120

1.5 Допускаемая нагрузка на кровать,
массой, кг, не более 160

1.6 Углы наклона от горизонтали не менее:
спинной панели – 60° , тазобедренной панели – 30° ,
рамы в сторону головы (вниз) – 10° .

1.7 Средний срок службы, лет, не менее 5

1.8 Усилие перемещения кровати, кгс, не более 20

1.9 Усилие на рукоятках при изменении углов
спинной и тазобедренной панелей с допускаемой
нагрузкой, кгс, не более 5

1.10 Усилие расфиксирования ножной секции
панели, кгс, не более 12

1.11 Усилие включения тормоза, кгс, не более 15

Комплектность приведена в таблице.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Примеч.
1.	Кровать ортопедическая КК4-2 (без съемных частей, указанных ниже)	тЦД3.541.001	1	
Съемные части (поставляются по заявке потребителя)				
2.	Корзина под судно	тЦД6.122.008	1	
3.	Упор для ног	тЦД6.278.001	1	
4.	Приспособление для подтягивания	тЦД6.153.003-01	1	
5.	Штатив для вливаний	2055312000	1	
6.	Матрац в чехле из ткани	тЦД6.409.000-1	1	
7.	Матрац в чехле из винилискожи	тЦД6.409.009	1	
8.	Матрац в чехле из ткани и винилискожи	тЦД6.409.009-05	1	
9.	Паспорт	тЦД3.541.001ПС	1	

Допускается поставка кроватей в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенными в отдельный пакет. В соответствии с условиями договора допускается поставка любой комплектности.

По отдельному заказу кровать может комплектоваться:

- Установкой для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей УВК – «ДЗМО».

2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

Кровать при максимальной комплектации состоит из основания 1, установленного на колеса 18 с тормозом 19, подматрачной рамы, состоящей из спинной 3, тазобедренной 5 и ножной 7 панелей (секций), скоб 2 и 8, стенок 10, корзины под судно 17, матраца, приводов 14 и 15, фиксатора 16.

Кровать снабжена боковыми ограждениями 4, упором для ног, приспособлением для подтягивания, штативом для вливаний.

2.2 Принцип работы кровати основан на создании условий для лечебного процесса и обслуживания посредством ручного регулирования положений панелей и различных приспособлений и устройств.

2.3 Распаковать кровать, установить съемные части согласно рисунка, спинку закрепить винтами 9.

2.4 Панели кровати могут устанавливаться в следующие основные положения: «Полусидя», «Кресло», «Согнувшись», «Тренделенбург» или любые промежуточные им. Установку положений производить вращением рукояток 14 спинной и 15 тазобедренной панелей и поднятием рукой ножной панели. Опускание ножной панели производить после нажатия вверх рукоятки 16 фиксатора, при этом необходимо удерживать панель от резкого падения другой рукой. При опускании ножной панели и подъеме тазобедренной не допускать соприкосновение ее с основанием. При опускании тазобедренной панели необходимо своевременно опускать ножную панель, если она находится в приподнятом положении.

Для снятия стенок 10 приподнять стенку, вывести ее вправо (влево) до выхода стержней из увеличенного отверстия с одной стороны, снять стенку.

Для снятия скоб 2 и 8 вывернуть до упора винты 9.

Для перестановки корзины 17 под судно отогнуть стопорную шайбу, отвернуть гайку и переставить на другую сторону основания. Порядок крепления обратный.

Для опускания боковых ограждений 4 приподнять ее и повернуть на 180°.

Для затормаживания колеса нажать ногой вниз на педаль 19, для растормаживания поднять педаль вверх.

2.5 Запрещается использование неисправной кровати.

2.6 Следить за тем, чтобы при подъеме спинной и тазовой секции панелей руки больного не находились в зоне перемещения ограждения.

2.7 Не допускается одновременная работа механизмами привода панелей. Нерабочая рукоятка должна быть опущена вниз.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание кровати перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями изношенных, смазке раз в два года подшипников колес, включая на вертикальной оси, а так же винтов и подшипников механизма подъема, промывке моющими растворами и санитарной обработке частей кровати.

3.2 Проверку технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования кровати проводить на соответствие техническим характеристикам и комплектности раздела 1, при этом проверить отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, работу тормозов колес.

3.3 Возможные неисправности кровати: ослабление крепежных, резьбовых и других элементов устранить подтягиванием. При затрудненном вращении колес и винтов механизмов смажьте подшипники колес и винтов тяг. А также винты любой консистентной технической смазкой, предварительно очистив трущиеся поверхности.

4 Консервация

4.1 Металлические детали кровати и съемных приспособлений должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

4.2 Кровать ортопедическая КК4-2, зав. № _____ подвергнута в ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-020-07614107-2003.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-020-07614107-2003.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

6.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность кровати и не гарантирует ее работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru www.dzmo.ru

7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

7.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее количество часов работы изделия с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8 Сведения об утилизации

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.


9 Свидетельство о приемке

Кровать ортопедическая

наименование изделия

КК4-2

обозначение

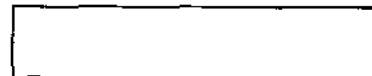

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.


Служба качества

М.П.

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

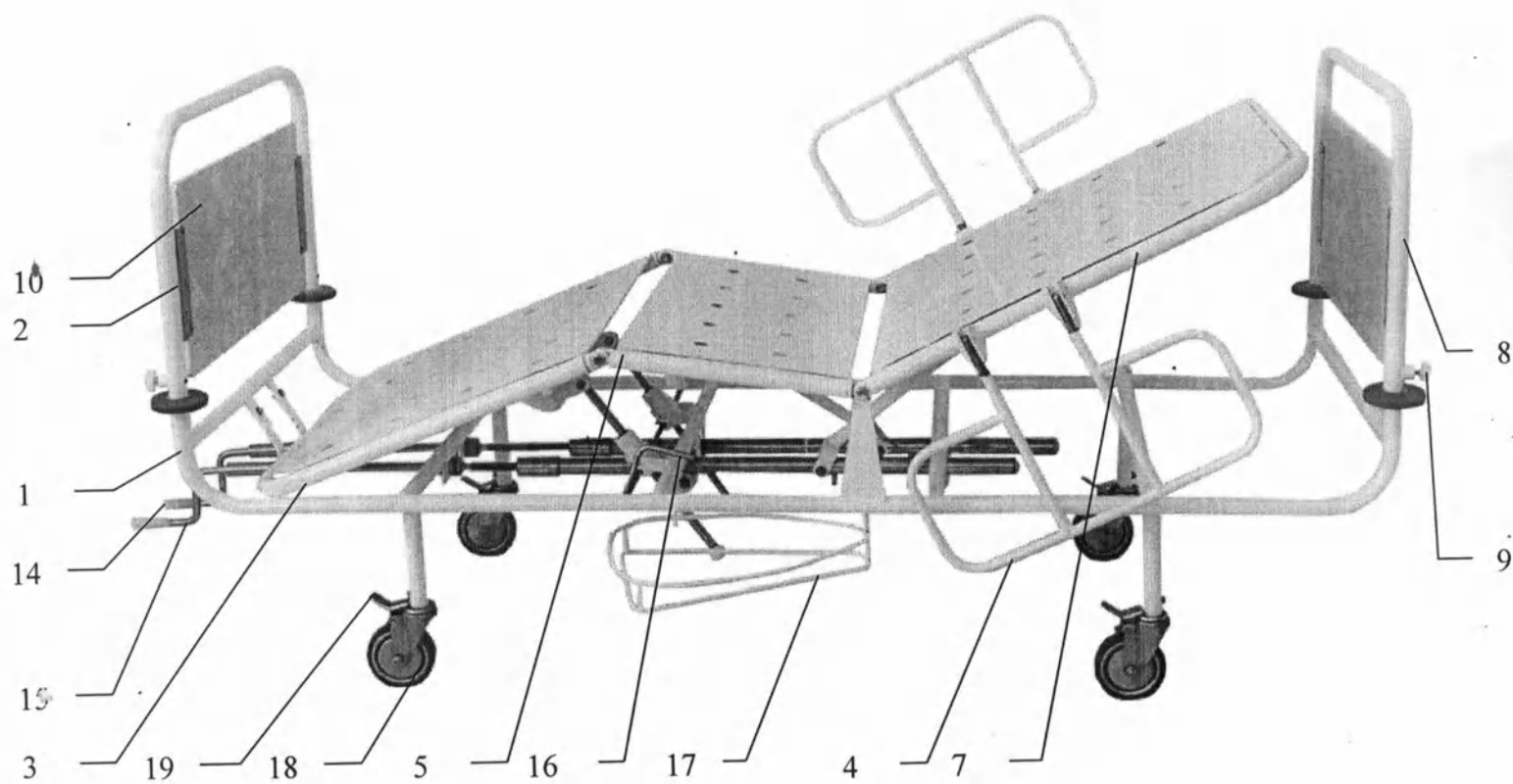

Прошнуровано,
Пронумеровано
На *И.И.И.И.И.*
Ген.директор



и скреплено печатью
листах
А.В.Костров