

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ
ВНУТРИКОРПУСНАЯ, ТПБВ-01 «Д»
ПАСПОРТ
УИЮР 942811.002 ПС**

1 Назначение, технические характеристики, комплектность

1.1 Тележка предназначена для перемещения больных внутри
больничных помещений.

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры, мм

длина - 2030 ± 30

ширина - 675 ± 10

высота - 1000 ± 10

1.3 Высота ложа над полом, мм - 800 ± 10

1.4 Масса, кг, не более - 45

1.5 Номинальная нагрузка массой, кг - 80

1.6 Усилие перемещения, кгс, не более - 15

1.7 Средний срок службы до списания, лет, не менее - 5

1. Угол наклона подголовника в верхнем положении должен
быть не менее, град. - 35

1.9 Комплектность указана в таблице.

Наименование	Обозначение	Кол-во
Тележка для перевозки больных внутрикор- пусная, ТПБВ-01 «Д»	УИЮР942811.002	1
Паспорт	УИЮР 942811.002 ПС	1 экз.


2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

2.1 Тележка (см.рис.) представляет собой каркас 1, сваренный из стальных труб, на котором закреплены ложе и подголовник 3. Тележка установлена на четыре колеса 4 с тормозом 10, и снабжена ручками 5 и откидывающимися ограждениями 6 по бокам ложа, четырьмя амортизаторами 8, которые служат для смягчения ударов при наезде на препятствия. Подголовник устанавливается в наклонное положение вручную при помощи гребенок 7 и крючков 9.

2.2 Распакуйте тележку и очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку тележки.

2.3 Запрещается эксплуатация тележки с неисправными колесами и ограждениями.

2.4 В связи с дальнейшим использованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

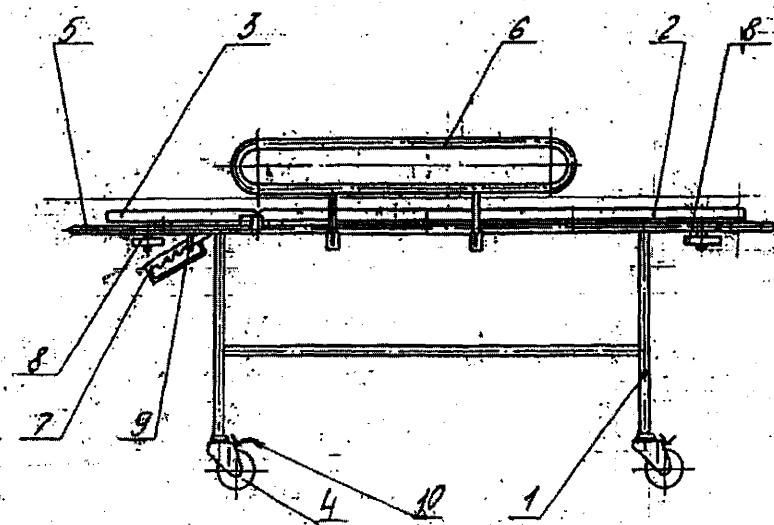

3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.

3.2 Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования тележки проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

3.3 Тележки в упаковке изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98 % при $+25^{\circ}\text{C}$. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Могут транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

3.4 Срок хранения без консервации – 3 года.

4 Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях

4.1 Гарантийный срок эксплуатации тележек – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет тележку или ее части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт с указанием адреса, где находится изделие, номер телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости. Рекламации на тележку и ее части, подвергнутые ремонту у потребителя, заводом не удовлетворяются.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Тележка для перевозки больных внутрикорпусная, ТПБВ-01 «Д» заводской номер _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признана годной для эксплуатации.

Контролер ОТК

Мастер

М.П.

личная подпись

личная подпись

(расшифровка подписей)

год, месяц, число

ОАО Досчатинский завод медоборудования
607033 г.Выкса Нижегородской области п.Досчатое

ТАЛОН №

На гарантийный ремонт _____

Техническое обслуживание _____

_____, изготовленного _____

изделия _____

дата изготовления _____

Заводской № _____

Продан (а) магазином № _____

наименование _____

торга _____

« _____ » _____ 200 г.

Штамп магазина _____

личная подпись _____

Владелец и его адрес _____

личная подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей _____

механик цеха (ателье) _____

дата _____

Владелец _____

личная подпись _____

Утверждаю _____

Зав. цехом (ателье) « _____ » _____ 200 г.

личная подпись _____

Корешок талона №

На гарантийный ремонт

Техническое обслуживание

Изъят _____ 200 г. Гл. механик

цеха (ателье)

фамилия, личная подпись

линия отреза

Прошнуровано,
Пронумеровано и скреплено печатью
На 4 (четыре) листах
Ген. директор А.В. Костров

