

ОКП 94 5210

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ МАССАЖНАЯ, КММ – 1 Паспорт УИЮР 324432.003 ПС

1. Назначение изделия, технические характеристики, комплектность.

1.1. Кушетка предназначена для размещения на ней пациентов при проведении массажных и других процедур.

Кушетка применяется в медицинских и других лечебно-профилактических учреждениях, для эксплуатации внутри помещения.

1.2. Габаритные размеры, мм:

длина – 1900 ± 30 ; ширина – 870 ± 30 ; высота – 760 ± 20 .

1.3. Масса, кг, не более

40

1.4. Допускаемая нагрузка массой, кг
на ложе – 80, на подножку – 80.

1.4. Угол наклона подголовника изменяется от горизонтали от 0 до 35 градусов с предельным отклонением $\pm 5^\circ$.

1.6. Усилие для поворота подножки, кгс, не более

12

1.7. Средний срок службы, не менее, лет

5

1.8. Комплектность приведена в таблице

№№	Наименование	Обозначение	Кол – во, шт
1.	Кушетка медицинская, КММ-1	УИЮР 324432.003	1
2.	Паспорт	УИЮР 324432.003 ПС	1

Примечание – По требованию заказчика подголовник может изготавливаться с вырезом под лицо, а также в комплект поставки может входить держатель для рулона бумаги, валик и подушка.

2. Устройство, подготовка к работе, указание мер безопасности.

2.1. Кушетка состоит из каркаса 1, подголовника 2, поворотной подножки 3 и ложа 4.


2.2. Для подготовки к работе распакуйте кушетку и очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку кушетки.

2.3. Для придания подголовнику наклонного положения, поднять его и установить гребенки 5 на крючки.



2.4. Запрещается использование неисправной кушетки.

2.5. Перед каждым использованием кушетки убедитесь в надежности фиксирования подголовника 2, при этом в пазы гребенок 5 должны входить крючки.

Установить подножку 3 в рабочее положение.

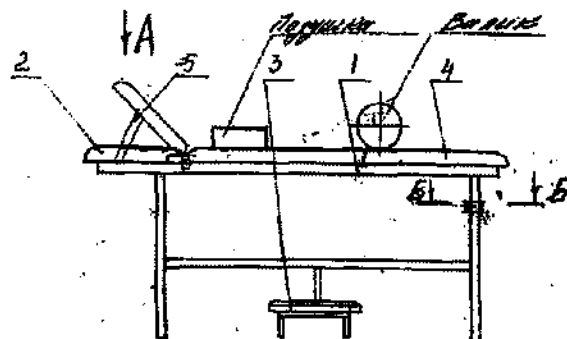

А (вариант) *Установка для измерения*

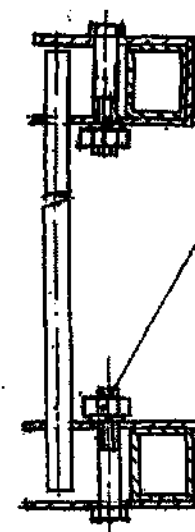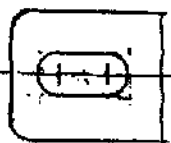

Болт М8-6x40
Гайка М8-6Н
Шайба 8-65Г

3. Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке.

3.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кушетки.

3.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кушетки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

3.3. Кушетка в упаковке изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от - 50 °С до + 40 °С и относительной влажности 98 % при 25 °С, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Может транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

3.4. Срок хранения без переконсервации – 3 года.

4. Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

4.2. В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетку или ее части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона дефектной ведомости, составленной комиссией с заявкой на ремонт с указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости. Рекламации на кушетку и ее части подвергнутые ремонту у потребителя не удовлетворяются.

5. Свидетельство о приемке.

Кушетка медицинская массажная, КММ-1 заводской № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9452-044-07614107-2007 и признана годной для эксплуатации.

Контролер ОТК

Мастер

М.П.

личная подпись

личная подпись

(расшифровка подписей)

год, месяц, число

Корешок талона №

На гарантийный ремонт
Техническое обслуживание

Изыят _____ 200 г. Гл. механик
цеха (ателье)

фамилия, личная подпись

линия отреза

ОАО Досчатинский завод медоборудования
607033 г.Выкса Нижегородской области п.Досчатое

ТАЛОН №

На гарантийный ремонт _____

Техническое обслуживание _____

_____, изготовленного _____

изделия _____

дата изготовления _____

Заводской № _____

Продан (а) магазином № _____

наименование _____

торга _____

« _____ » _____ 200 г.

Штамп магазина _____

личная подпись _____

Владелец и его адрес _____

личная подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей _____

механик цеха (ателье) _____

дата _____

Владелец _____

личная подпись _____

Утверждаю _____

Зав. цехом (ателье) _____ « _____ » _____ 200 г.

личная подпись _____

Прошнуровано,
Пронумеровано и скреплено
На 4 (четыре)
Ген. директор

